

# Wyrób medyczny: Orteza kręgosłupa szyjno-piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego

## Wersja: Korektor postawy (MEK 2002)

### (ze stalkami przykręgosłupowymi)

#### 1. Opis:

- Wyrób medyczny Korektor postawy (2002) (ze stalkami przykręgosłupowymi) wykonany jest z nowoczesnej elastycznej, oddychającej tkaniny, która zapewnia niezawodną mikro-cyrkulację powietrza oraz pozwala na stworzenie niezbędnego usztywnienia i podparcia.
- Stabilizacja górnej obręczy barkowej odbywa się za pomocą pasów naramiennych, których siłę napięcia można niezależnie regulować dzięki odpinanej konstrukcji.
- Wyposażony w dwie stalki umieszczone przykręgosłupowo.
- Wyrób medyczny dostępny jest w 5 rozmiarach – patrz punkt 5 Instrukcji.
- Wyrób jest wyrobem wielokrotnego użytku. Ze względów higienicznych i medycznych zaleca się stosowanie tylko przez jednego użytkownika. Wyrób nie wymaga sterylizacji przed ponownym użyciem. Porady dotyczące standardowej pielęgnacji opisane są w punkcie 6 instrukcji używania.

#### 2. Funkcje:

- Stosowany do treningu mięśniowego przy osłabionych mięśniach klatki piersiowej.
- Eliminuje asymetrię napięcia mięśni i tworzy stereotyp „prawidłowej postawy”.
- Przy długotrwałym obciążeniu kręgosłupa piersiowego zmniejsza napięcie mięśni, ból i zmęczenie.

#### 3. Wskazania do stosowania:

- Zapobieganie zaburzeniom postawy u dzieci i dorosłych.
- Korekta zgarbienia, deformacji skoliozycznych kręgosłupa w początkowej fazie.
- Odciążenie kręgosłupa piersiowego.
- Osteochondroza odcinka piersiowego kręgosłupa,

nerwoból międzyżebrowy, zapalenie mięśni, Choroba Scheuermanna.

- Wsparcie w okresie rekonwalescencji po kontuzjach.

#### 4. Przeciwwskazania:

- Reakcje alergiczne, nadwrażliwość, nietolerancja materiału, z którego wykonany jest wyrób.
- Urazy skóry w miejscu stosowania wyrobu.
- Obecność w miejscu aplikacji owrzodzeń troficznych, kontaktowego zapalenia skóry i innych zapalnych zmian skórnych.

#### 5. Instrukcja obsługi:

Zaleca się zakładanie wyrobu na odzież.

- Dobierz rozmiar na podstawie obwodu brzucha i tabeli rozmiarów.
- Załóż korektor na ramiona.
- Zapnij główny pas na rzep.
- Przeprowadź pasy naramienne do przodu, a następnie pod pachami na plecy (na krzyż).
- Chwyć pasy dociągające lewą i prawą ręką, rozciągnij je na boki w celu naciągnięcia, a następnie zapnij na rzep.

S	obwód talii	70-80 cm
M		80-90 cm
L		90-100 cm
XL		100-110 cm
XXL		110-120 cm

#### 6. Porady dotyczące pielęgnacji:

- Przed praniem zapnij wszystkie zapięcia.
- Zalecane pranie ręczne w wodzie o temperaturze nieprzekraczającej 30 stopni z użyciem łagodnych detergentów. Nie wybielać, nie gotować.
- Suszyć na płasko, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, nie prasować.

#### 7. Ostrzeżenia:

- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

- W przypadku braku poprawy pomimo stosowania wyrobu medycznego, należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.



- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.

**Kolor: czarny, beżowy**

Data wydania instrukcji używania: 10.2021; wersja: 01



MEK-ORTO sp. z o.o.  
ul. Tadeusza Kościuszki 26/13  
02-495 Warszawa



2002

Wyjaśnienie zastosowanych symboli:

	Wytwórca
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Ostrzeżenie
	Data produkcji
	Kod UDI
	Zapoznaj się z instrukcją używania
	Wyrób medyczny
	Numer modelu
	Jeden pacjent- wielokrotne użycie
	Oznakowanie zgodności CE

# ***Korektor postawy ze stawkami przykręgosłupowymi MEK 2002***