

PULSOKSYLOMETR

SYMBOL: 01527

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. ZASTOSOWANIE I OPIS URZĄDZENIA

- Pulsoksymetr działa na zasadzie pomiaru pochłaniania przez czerwone krwinki w naczyniach włosowatych promieniowania o dwóch różnych długościach fali – czerwonego i podczerwonego. Mierzony sygnał składa się z dwóch składowych: stałej i zmiennej (pulsującej). Składowa zmienna opisuje absorpcję pulsującej krwi tętnicznej. Na podstawie pomiaru oblicza się stopień nasycenia hemoglobiny tlenem. Pulsoksymetr mierzy również tętno.
- Pulsoksymetr napalcowy jest niewielkim urządzeniem, służącym do szybkiego pomiaru takich parametrów życiowych jak puls. Prawidłowy poziom saturacji tlenem powinien wynosić od 94 do 99%.
- W czasie badania należy pamiętać, że nie powinno się badać tętna po wysiłku fizycznym albo w stanie przeżyć emocjonalnych. Przeciętna częstotliwość tętna jest uzależniona od wieku. Badanie pulsometrem najlepiej wykonywać w pozycji siedzącej, nie wykonując wcześniej dużego wysiłku fizycznego.
- Pulsoksymetr jest to urządzenie, które powinno znaleźć się w każdym domu.
- Jest przeznaczony, głównie dla osób, które mają trudności z oddychaniem, osób chorujących przewlekłe na choroby płuc, przy astmie, w nagłych przypadkach niedotlenienia, przy schorzeniach kardiologicznych, przy dużym wysiłku fizycznym i w wielu innych przypadkach, jak również do codziennego monitorowania stanu zdrowia.

2. SPECYFIKACJA PRODUKTU

- Szybka i prosta obsługa
- Zakres pomiaru natlenienia: od 70% do 99%
- Dokładność pomiaru natlenienia w zakresie 80% - 99% to 2%
- Dokładność pomiaru natlenienia w zakresie 70% - 99% to 3%
- Zakres pomiaru tętna: od 30 do 240 BPM
- Dokładność pomiaru tętna: +/- 1 BPM
- Automatyczne wyłączanie
- Możliwość obrotu funkcji na wyświetlaczu: pionowa lub pozioma
- Kolorowy wyświetlacz OLED
- Urządzenie można używać w temperaturach: od 5 do 40 stopni Celsjusza
- Zasilanie: 2 x AAA (brak w zestawie)
- Wskaźnik poziomu baterii
- Smycz do zawieszania
- Wymiary wyświetlacza: 22mm x 11mm
- Wymiary urządzenia: 55mm x 30mm x 30mm

3. SPOSÓB UŻYCIA

- Należy rozsunąć klips, naciskając na górze przycisk PUSH
- Wsunąć do środka palec, tak aby znajdował się równolegle do podłoża
- Włączyć pulsoksymetr białym przyciskiem
- Odczytać uzyskany pomiar
- Wyjąć palec z pulsoksymetru, po chwili urządzenie się wyłączy.

4. KONSERWACJA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Do czyszczenia używaj miękką, antystatyczną ściereczkę, która nie pozostawia kłaczek.
- Nie używaj szorujących ani chemicznych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie
- Urządzenie odkładamy na stabilną powierzchnię

5. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:- został uszkodzony, - nie działa prawidłowo, - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Uwaga! Ryzyko oparzenia! Głowica bardzo nagrzewa się podczas pracy. Nigdy nie dotykaj jej żadną częścią ciała.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ŻYTYM OPAKOWANIEM

Żużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadów, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

IMPORTER/EINFUHRER/DOVOZCE:

VERK GROUP SP. Z O.O. SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND

www.verkgroup.pl

www.internetowa-hurtownia.pl

www.internetowa-hurtownia.chh.pl