



DRENAŻ LIMFATYCZNY

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


POLSKI

Na wstępie dziękujemy za wybór naszego produktu! Mamy nadzieję, że sprawdzi się on idealnie dla każdego salonu i gabinetu kosmetycznego oraz zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje o produkcie.

KONSTRUKCJA

Pompa elektryczna, kombinezon (na poszczególne części ciała: ręce, nogi, odcinek lędźwiowy)

- A. Włącznik
- B. Regulator czasu
- C. Uchwyt
- D. Regulator ciśnienia
- E. Wtyczka

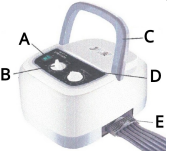

PARAMETRY

- Zakres ciśnienia: 0-30 kPa → 3kPa
- Timer: 0-30 min
- Napięcie znamionowe: 220V, 50Hz
- Moc: 25 Watt
- Materiał: TPU

ZASADA DZIAŁANIA

Drenaż limfatyczny pomaga w redukcji obrzęków, redukuje cellulit, ujędrnia skórę i oczyszcza organizm z toksyn. Drenaż jest formą masażu pobudzającego tkanki i tkankę tłuszczową przez co jest ona podatna na zmiany. Urządzenie wtłacza powietrze w kolejne sektory, wytwarza podciśnienie, które stymuluje pracę układu limfatycznego. Pobudza przy tym komórki i wspomaga cyrkulację krwi w organizmie.

CECHY

- Każda część kombinezonu ma wiele worków powietrznych, po dostosowaniu odpowiedniego ciśnienia każdy worek powietrzny ma pewną ilość ciśnienia. Kiedy pierwszy worek powietrzny osiągnie dane ciśnienie, następny woreczek powietrzny zacznie się napełniać i tak dalej.
- W produkcji zastosowaliśmy grubszy materiał TPU, jest nietoksyczny. Poza tym jest wodoodporny i solidny. Osoby noszące kombinezon, nie czują się przy tym niekomfortowo.
- Urządzenie zaprojektowane zgodnie z ergonomią i kombinacją tradycyjnego Chińskiego masażu. Możesz używać części kombinezonu pojedynczo: na ramionach, plecach, odcinku lędźwiowym, biodrach, nogach itd. Możesz również używać ich razem.
- Odpowiednie dla osób: z paraliżem, długo siedzących lub stojących, odczuwających ból, zmęczenie mięśni.

FUNKCJE

- Ułatwia przepływ krwi i krążenie limfy
- Zapobiega żylakom
- Zapobiega atrofii mięśni

JAK KORZYSTAĆ

- Podłącz rurę do pompy
- Podłącz zasilanie
- Załóż kombinezon i włącz przełącznik

UWAGA

- Połóż urządzenie na czystym i płaskim miejscu
- Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem dorosłych
- Upewnij się, że urządzenie jest z dala od wszelkiego rodzaju źródeł ciepła. Jeśli wtyczka kabla jest uszkodzona lub zużyta – nie podłączaj urządzenia do prądu
- Po użyciu wyłącz pompę, a następnie wyciągnij wtyczkę
- Nie podłączaj urządzenia do innego sprzętu, ani nie wymieniaj komponentów produktu
- Trzymaj kombinezon z dala od ostrych przedmiotów, takich jak igła, nożyczki itp.
- Zdejmij biżuterię oraz wyciągnij rzeczy z kieszeni przed nałożeniem kombinezonu
- Przeciwwskazania: Obrzęk płuc, głębokie zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie skóry, choroby skóry (dermatoza)

SPOSÓB OBSŁUGI

- A) Przed pierwszym użyciu należy odkręcić śrubę, która znajduje się pod spodem urządzenia. Wmontowana śruba służyła do blokady ruchu podczas transportu, oraz jako dodatkowe zabezpieczenie towaru.
- B) Załóż kombinezon do preferowanej części ciała:
- Masażer nóg: otwórz zamek błyskawiczny, załóż go na nogę, zamknij zamek i przymocuj samoprzylepny pasek mocujący.
 - Masażer ramienia: ramię tworzy się w formę rękawa, samoprzylepny pasek mocujący należy przełożyć przez plecy, a następnie pod pachą drugiej ręki (niemasowanej)
 - Masażer talii: talii: owiń pas wokół talii z odpowiednią ciasnością i przymocuj samoprzylepny pasek mocujący.
- C) Włóż rurkę powietrzną do interfejsu wyjściowego, wtyczka powinna zostać włożona głęboko.
- D) Podłącz zasilanie i włącz wyłącznik zasilania.
- E) Ustaw przycisk timera zgodnie z ruchem wskazówek zegara do żądanej pozycji, czasu można regulować w zakresie 0-30 minut +/- 3 min.
- F) Ustaw pokrętko ciśnienia zgodnie z ruchem wskazówek zegara do wygodnej pozycji, ciśnienie napełniania można regulować w zakresie 0-30 Kpa +/- 3 Kpa.
- G) Jeśli czujesz się niekomfortowo podczas zabiegu, natychmiast wyłącz przełącznik pompy powietrza i odłącz tchawicę.
- H) Po użyciu najpierw wyłącz zasilanie pompy powietrza, otwórz zamek błyskawiczny rękawa, a następnie zdejmij rękaw, wyciągnij zatyczkę tchawicy i uwolnij powietrze z rękawa.

PRZECIWWSKAZANIA

Drenaż limfatyczny niestety nie może być stosowany przez wszystkich. Przeciwwskazaniem do wykonania tego typu masażu są:

- wszelkiego rodzaju zaburzenia działania układu krążenia takie jak: zakrzepica, choroby serca, czy posiadanie rozrusznika serca
- zapaleniem naczyń i węzłów chłonnych
- niewydolności jakichkolwiek narządów organizmu
- zdiagnozowana padaczka
- ciąża
- grypa
- Zaleca się również, aby osoby nie zmagające się z powyższymi chorobami unikały masażu w okresie przeziębienia oraz miesiączkowania.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Prawidłowa utylizacja tego produktu ten znak oznacza, że produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, prosimy o odpowiedzialny recykling celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych.

KONSERWACJA I NAPRAWA

Nie zaleca się naprawy sprzętu na własną rękę. Każdorazowo należy skontaktować się z producentem i poddać towar ocenie i ewentualnej naprawie wykwalifikowanej osobie.

GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi 1 rok w przypadku zakupu produktu przez przedsiębiorcę, 2 lata jeśli sprzęt zakupiony został przez osobę prywatną. W przypadku pytań lub problemów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

KONTAKT

Enzo Polska

ul. Anny Jagiellonki 24A 44-109 Gliwice

Telefon: +48 32 555 04 75

E-mail: sklep@enzopolska.pl

Godziny pracy:

- Pon – czw: 7-15
- Piątek: 7-14

Wadliwe urządzenia elektroniczne nie należą do zwykłych odpadów domowych. Prosimy o ich oddanie w wyznaczonych punktach zbiórki odpadów elektronicznych. Dla informacji o lokalizacjach i przepisach, zalecamy kontakt z lokalnymi instytucjami. Nasz produkt jest zgodny z europejskimi dyrektywami dla produktów medycznych (CE 0124), co gwarantuje jego bezpieczeństwo i jakość.

