



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

PRZEZNACZENIE

Rękawice jednorazowe zabezpieczają przed działaniem wyłącznie zagrożeń minimalnych (niezagrożających ani życiu, ani zdrowiu człowieka) takich jak:

UŻYTKOWANIE

Każdorazowo przed przystąpieniem do użytkowania rękawic należy sprawdzić czy nie utraciły swoich właściwości ochronnych oraz czy nie posiadają uszkodzeń mechanicznych: przetarcia, rozdarcia, trwałe i mocne zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, rękawice powinny być niezwłocznie wycofane z użytkowania i wymienione na nowe. Rozmiar rękawic powinien być dobrany do wielkości dłoni użytkownika.

Na opakowaniach rękawic ochronnych Hynex widnieją daty wyprodukowania rękawic oraz okres ich przydatności.

Materiały użyte do produkcji rękawic, nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie użytkownika. Jednakże komponenty zawarte w materiale produktu lub będące składową produktu mogą być alergenami, np.: nitryl, u osób wrażliwych mogą powodować reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

PRZECHOWYWANIE, KONSERWACJA I TRANSPORT

Przechowywać w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych i zaciemnionych, z dala od rozpuszczalników organicznych, kwasów i zasad, w temperaturze pomiędzy 5-20°C. Zbyt duża wilgotność powietrza, temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość rękawic. Przechowywać i transportować w oryginalnych opakowaniach. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady lub uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwych warunków i zasad przechowywania, oraz użytkowania. Produkt jednorazowego użycia, nie czyścić, nie prać. Po użyciu, ostrożnie zdjąć rękawice i umieścić w miejscu zbiórki odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Objaśnienia do piktogramów zamieszczonych na opakowaniu produktu		Produkt jednorazowego użytku
		Nazwa i adres producenta
		Data produkcji
		Data upływu terminu ważności
		Produkt może być używany w kontakcie z żywnością
		Numer serii
		Wyrób niejałowy
		Bez lateksu

		Chronić przed działaniem promieni słonecznych
		Chronić przed wilgocią
		Ochrona przed zagrożeniami chemicznymi
		Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami

JAK ZAŁOŻYĆ RĘKAWICE:



- Wyjmij jedną rękawiczkę z opakowania i sprawdź, czy nie ma na niej różnych plam ani rozdarć
- Jeśli rękawiczki są oburęczne, można je nosić na dowolnej ręce, jeśli nie, przed założeniem należy wyrównać palce i kciuk rękawic z właściwą ręką
- Włóż pięć palców do mankietu i załóż mankiet na rękę

JAK ZDEJMOWAĆ RĘKAWICE:



- Chwyc zewnętrzną krawędź rękawicy w pobliżu nadgarstka
- Zdejmij rękawiczkę z dłoni, wywracając ją na lewą stronę. Trzymaj drugą dłoń w rękawiczce
- Zdejmij pozostałą rękawicę od środka, tworząc „torbę” zawierającą obie rękawiczki

www.hynex.nl

Kontakt: biuro@vadelo.pl

