

SK — PARTIMANN-HECO Sp. z o.o. ul. ...

PL Instrukcja używania

Opis produktu

Cosmopor transparent to samoprzylepny, przezroczysty opatrunek foliowy ze znajdującą się pośrodku warstwą chłonną wykonany z półprzepuszczalnej, wodoodpornej i przezroczystej warstwy poliuretanu pokrytej klejem poliakrylanowym. Warstwa chłonna jest wykonana z włókien wiskozowych i pokryta siatką polietylenową. Pełni ona rolę nieprzywierającej warstwy stykającej się z raną.

Właściwości

Warstwa chłonna pochłania wysięk z rany i nie przywiera do jej powierzchni. Półprzepuszczalna warstwa poliuretanu jest pokryta klejem. Warstwa ta ułatwia swobodne przenikanie pary wodnej i gazów oraz jest wodoodporna.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Cosmopor transparent to nieinwazyjny, samoprzylepny, przezroczysty opatrunek foliowy przeznaczony do jednorazowego użytku. Jest przeznaczony do użytku w warunkach sterylnych przez personel medyczny i osoby bez przeszkolenia medycznego u ludzi w pooperacyjnej pielęgnacji ran z niewielkim wysiękiem, w celu utworzenia bariery ochronnej przed wnikaniem bakterii oraz w celu sterylnego opatrywania drobnych obrażeń ciała. Wyrób można pozostawić

w miejscu nałożenia do pięciu dni. Niemniej jednak zaleca się ocenę medyczną stanu rany w celu określenia, czy opatrunek wymaga wymiany. Nowy wyrób można natychmiastowo zastosować. Całkowity czas użycia opatrunku nie powinien przekraczać trzydziestu dni.

Wskazania

Cosmopor transparent może być używany w pooperacyjnej pielęgnacji ran z niewielkim wysiękiem, w celu utworzenia bariery ochronnej przed wnikaniem bakterii oraz w celu sterylnego opatrywania drobnych obrażeń ciała.

Przeciwwskazania

Cosmopor transparent nie wolno stosować w przypadku intensywnie krwawiących ran z klinicznie potwierdzonym zakażeniem, ran z dużym wysiękiem ani owrzodzeń.

Sposób stosowania (patrz piktogramy I–IV)

Obszar skóry, na który ma zostać założony opatrunek, należy dokładnie oczyścić i osuszyć a także upewnić się, że nie jest pokryty kremem lub maścią. W przypadku obszarów skóry z owłosieniem przed założeniem opatrunku Cosmopor transparent należy usunąć owłosienie. (I) Otworzyć torebkę i wyjąć z niej opatrunek. Opatrunek Cosmopor transparent jest zabezpieczony czterema warstwami ochronnymi z oznaczeniami od 1 do 4, które odpowiadają kolejności ich zdejmowania podczas zakładania opatrunku. Częściowo odsunąć warstwy ochronne oznaczone numerami 1 i 2, a następnie (II) przyłożyć opatrunek Cosmopor transparent stroną z klejem i warstwą chłonną do rany, zwracając uwagę na to, aby warstwa chłonna całkowicie pokrywała ranę. Całkowicie zdjąć warstwy ochronne oznaczone numerami 1 i 2, a następnie delikatnie docisnąć cały opatrunek do skóry, dopasowując go do kształtu ciała. (III) Zdjąć warstwę ochronną oznaczoną numerem 3, a następnie (IV) zdjąć warstwę ochronną z numerem 4 i delikatnie docisnąć do skóry. Opatrunek Cosmopor transparent można usunąć w praktycznie bezbolesny sposób, naciągając materiał. W tym celu należy poluzować krawędź opatrunku i ostrożnie go usunąć, naciągając materiał.

Szczególne środki ostrożności

Ponowne użycie wyrobu medycznego przeznaczonego do jednorazowego użytku jest niebezpieczne. Przygotowywanie wyrobów do ponownego użycia może poważnie naruszyć ich integralność i wpłynąć na prawidłowość ich działania. Informacje dostępne na życzenie.

Działania niepożądane

Reakcje niepożądane mogą wystąpić u pacjentów z uczuleniem lub nadwrażliwością na klej akrylowy.

Zgłaszanie incydentów

Dotyczy pacjentów/użytkowników/osób trzecich w Unii Europejskiej lub w krajach o takim samym systemie regulacyjnym (Rozporządzenie (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych): jeśli podczas lub wskutek użytkowania niniejszego wyrobu doszło do poważnego incydentu, należy zgłosić to producentowi i/lub jego autoryzowanemu przedstawicielowi oraz właściwym organom krajowym.

Utylizacja produktu

Aby zminimalizować ryzyko potencjalnego zakażenia lub zanieczyszczenia środowiska, materiały jednorazowego użytku zawarte w wyrobie medycznym należy utylizować zgodnie z procedurami określonymi przez stosowne lokalne przepisy i regulacje oraz normy dotyczące zapobiegania zakażeniom. Wyrób medyczny należy utylizować razem z odpadami domowymi.

Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu: 2021-02-17