



DRENAŻ LIMFATYCZNY

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

POLSKI

Na wstępie dziękujemy za wybór naszego produktu! Mamy nadzieję, że sprawdzi się on idealnie dla każdego salonu i gabinetu kosmetycznego oraz zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje o produkcie.

PRZED UŻYCIEM

PRZED URUCHOMIENIEM PRODUKTU NALEŻY POZOSTAWIĆ URZĄDZENIE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ I ODCZEKAĆ 24H!

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania. Uwaga! Produkt należy trzymać z dala od dzieci oraz osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych, a także osób bez doświadczenia i wiedzy na temat korzystania ze sprzętu, chyba, że korzystanie z produktu następuje pod nadzorem lub wyżej wymienione osoby zostać przeszkolone. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy upewnić się, iż osoba korzystająca jest świadoma zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu oraz związanych z użytkowaniem zagrożeń.

MANKIETY

Jedna noga
Dwie nogi
Talia
Mankiet na ramię

FUNKCJE I CECHY

1. Funkcja pomiaru czasu: 10,20,30 minut opcjonalnie.
2. Trzy tryby masażu, 10 trybów mocy do wyboru w celu zaspokojenia różnych potrzeb.
3. Wybierz swój indywidualny masaż.

Opis urządzenia:

1. Wtyczka
 2. Urządzenie
- A. Jeden mankiet poduszki powietrznej
B. Dwa mankiety poduszki powietrznej
C. Pierwsze gniazdo
D. Drugie gniazdo
E. Trzecie gniazdo (brak rzeczywistej funkcji)



SPECYFIKACJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Używaj zwykłego napięcia.
2. Nie używaj go w łazience i innych miejscach o dużej wilgotności, nie zanurzaj go w wodzie lub w pobliżu wody, aby uniknąć zwarcia lub porażenia prądem.
3. Podczas czyszczenia, nieprawidłowego użytkowania, po użyciu należy odłączyć gniazdo zasilające.
4. W przypadku burzy nie należy podłączyć do zasilania, aby nie spowodować spalenia urządzenia przez nadmierny prąd.
5. Przed użyciem, sprawdzić wtyczkę, w przeciwnym razie może to spowodować niepożądane wewnętrzne uruchomienie produktu.
6. Podczas podłączenia wtyczki, nie ciągnij bezpośrednio za przewód zasilający.
7. Zaleca się, aby każde użycie nie trwało dłużej niż 60 minut.

OSTRZEŻENIE

Przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem, jeśli użytkownikami są osoby cierpiące na:

- Nowotwory
- Osteoporozę
- Choroby serca
- Problemy z krzepnięciem krwi lub zakrzepica
- Nadwyrężenie pleców
- Infekcje skórne
- Kruchość i urazy szkieletu, zwłaszcza kręgosłupa
- Urazy kręgosłupa

Osoby po operacji, w ciąży lub krótko po porodzie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa produktu : drenaż limfatyczny
Napięcie znamionowe: AC100-240V
Moc znamionowa: 18W
Konstrukcja bezpieczeństwa

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Prawidłowa utylizacja tego produktu ten znak oznacza, że produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, prosimy o odpowiedzialny recykling celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych.

KONSERWACJA I NAPRAWA

Nie zaleca się naprawy sprzętu na własną rękę. Każdorazowo należy skontaktować się z producentem i poddać towar ocenie i ewentualnej naprawie wykwalifikowanej osobie.

GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi 1 rok w przypadku zakupu produktu przez przedsiębiorcę, 2 lata jeśli sprzęt zakupiony został przez osobę prywatną. W przypadku pytań lub problemów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

KONTAKT

Enzo Polska
ul. Anny Jagiellonki 24A 44-109 Gliwice
Telefon: +48 32 555 04 75
E-mail: sklep@enzopolska.pl
Godziny pracy:
• Pon – czw: 7-15
• Piątek: 7-14

Wadliwe urządzenia elektroniczne nie należą do zwykłych odpadów domowych. Prosimy o ich oddanie w wyznaczonych punktach zbiórki odpadów elektronicznych. Dla informacji o lokalizacjach i przepisach, zalecamy kontakt z lokalnymi instytucjami. Nasz produkt jest zgodny z europejskimi dyrektywami dla produktów medycznych (CE 0124), co gwarantuje jego bezpieczeństwo i jakość.

