

LD Special LD SteTime

Little Doctor®

Stethoscope LD *Instruction Manual*

ENG

Stetoskop LD *Instrukcja obsługi*



POL



Model LD Special

długość przewodu 56 lub 72 cm

Stetoskop wielofunkcyjny typu SPRAGUE RAPPAPORT

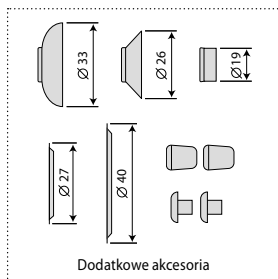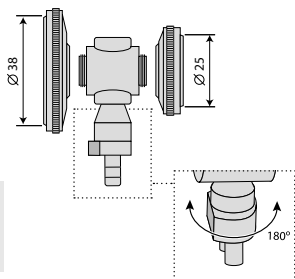

Opis i wyposażenie modelu LD Special:

- Wielofunkcyjny wysokiej jakości stetoskop (typ SPRAGUE RAPPAPORT) przeznaczony jest do osłuchiwania serca, płuc, naczyń krwionośnych, przewodu pokarmowego u dzieci i dorosłych.
- Specjalne wyposażenie umożliwia wykorzystanie stetoskopu w 4 konfiguracjach: od zwykłej (dla dorosłych) do neonatalnej (dla noworodków).
- Wykonana według specjalnego projektu dwustronna metalowa głowica (LD-S018) z dużą (dla dorosłych) i małą (dla dzieci) diafragmami – 1 szt. Średnica robocza dużej diafragmy wynosi 38 mm, małej - 25 mm. Każda diafragma wyposażona jest w przezroczystą plastikową membranę. Konstrukcja głowicy pozwala na wymianę każdej z diafragm na lejek potrzebnego rozmiaru. Diafragmy i lejki są nakręcane na głowicę. W celu zmiany roboczej strony głowicy należy przekręcić trzonek o 180 stopni. Płaska strona trzonka pod głowicą wskazuje, która jej strona jest obecnie używana.

W kolorowym wykonaniu «Black Matt» stetoskop wyposażony jest w głowicę LD-S018bm w czarnym matowym kolorze.

- Dwa pogrubione przewody akustyczne (dreny) o długości 56 lub 72 cm (długość zaznaczono na pudełku) – 1 kompl.
- Dwa metalowe przewody słuchawkowe ze sprężyną i oliwkami (lira) - 1 kompl.



W kolorowym wykonaniu «Black Matt» stetoskop wyposażony jest w przewody słuchawkowe w czarnym matowym kolorze.

Dodatkowe akcesoria dołączone do zestawu:

- Lejek plastikowy duży (średnica 33 mm) – 1 szt.
- Lejek plastikowy mały (średnica 26 mm) – 1 szt.
- Lejek plastikowy neonatalny (średnica 19 mm) – 1 szt.
- Membrana duża (średnica 40 mm) – 1 szt.
- Membrana mała (średnica 27 mm) – 1 szt.
- Oliwki plastikowe – 2 kompl.
- Pokrowiec plastikowy na dodatkowe akcesoria – 1 szt.

Wymiary gabarytowe w opakowaniu, mm: 300 x 130 x 40

Waga (z opakowaniem), g: 380

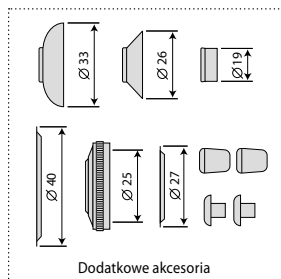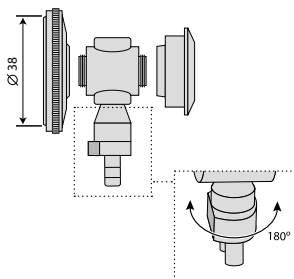

Opis i wyposażenie modelu LD Special:

- Wielofunkcyjny wysokiej jakości stetoskop (typ SPRAGUE RAPPAPORT) z wbudowanym w głowicę zegarkiem kwarcowym przeznaczony jest do osłuchiwania serca, płuc, naczyń krwionośnych, przewodu pokarmowego u dzieci i dorosłych.
- Specjalne wyposażenie umożliwia wykorzystanie stetoskopu w 4 konfiguracjach: od zwykłej (dla dorosłych) do neonatalnej (dla noworodków).
- Wykonana według specjalnego projektu dwustronna metalowa głowica (LD-S041) dużą diafragmą i nasadą z zegarkiem kwarcowym – 1 szt. Średnica robocza diafragmy wynosi 38 mm. Diafragma wyposażona jest w przezroczystą plastikową membranę. Konstrukcja głowicy pozwala na wymianę zarówno diafragmy, jak i zegarka na jakąkolwiek z nasad, zawartych w komplecie dodatkowych akcesoriów do stetoskopu. Diafragmy, zegarki i lejki są nakręcane na głowicę. W celu zmiany roboczej strony głowicy należy przekręcić trzonek o 180 stopni. Płaska strona trzonka pod głowicą wskazuje, która jej strona jest obecnie używana.
- Dwa pogrubione przewody akustyczne (dreny) o długości 56 cm – 1 kompl.
- Dwa metalowe przewody słuchawkowe ze sprężyną i oliwkami (lira) - 1 kompl.

Dodatkowe akcesoria dołączone do zestawu:

- Lejek plastikowy duży (średnica 33 mm) – 1 szt.
- Lejek plastikowy mały (średnica 26 mm) – 1 szt.

- Lejek plastikowy neonatalny (średnica 19 mm) – 1 szt.
- Membrana duża (średnica 40 mm) – 1 szt.
- Diafragma mała (średnica robocza 25 mm) – 1 szt.
- Membrana mała (średnica 27 mm) – 1 szt.
- Oliwki plastikowe – 2 kompl.
- Pokrowiec plastikowy na dodatkowe akcesoria – 1 szt. Wymiary gabarytowe w opakowaniu, mm: 300 x 130 x 40

Waga (z opakowaniem), g: 398

Wymiana baterii:


W zegarku stetoskopu LD SteTime wykorzystywana jest bateria typu LR 626/377, 1.5 W.

Wymieniać baterie należy średnio raz w roku.


Przeprowadzenie wymiany baterii:

1. Odkręcić nasadę z zegarkiem z głowicy stetoskopu.
2. Za pomocą monety odkręcić tylną część nasady (rys. 1).
3. Wyjąć zegarek (rys. 2).
4. Podważyć cienkim śrubokrętem i zdjąć pokrywę zegarka (rys. 3).
5. Wymienić baterie (typ LR 626/377, 1.5 W).
6. Zamontowanie przeprowadzać w odwrotnej kolejności.


Wymianę baterii w zegarku stetoskopu zaleca się przeprowadzać w wyspecjalizowanych zakładach.

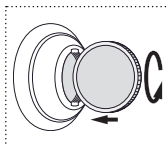

Rys. 1

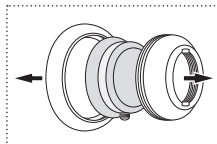

Rys. 2

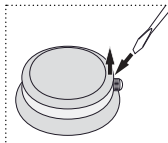

Rys. 3

Pielęgnacja, przechowywanie, naprawa i utylizacja

1. Stetoskop należy chronić przed nadmierną wilgocią, bezpośrednim światłem słonecznym, uderzeniami.
2. Nie należy przechowywać i używać stetoskopu w pobliżu urządzeń grzewczych i otwartego ognia.
3. Chronić stetoskop przed zabrudzeniami.
4. Nie dopuszczać do kontaktu stetoskopu z roztworami agresywnymi.
5. Naprawa urządzenia, w razie zaistnienia takiej konieczności, ma być przeprowadzana tylko w wyspecjalizowanych punktach serwisowych. Adresy punktów serwisowych są podane w karcie gwarancyjnej.
6. Wymiana baterii w zegarku (dla LD SteTime) ma być przeprowadzana w wyspecjalizowanych zakładach zegarmistrzowskich..
7. Okres używalności stetoskopu - 6 lat. Rok produkcji jest podany na opakowaniu. Okres żywotności baterii (dla LD SteTime) - 1 rok.
8. Po upływie ustalonego okresu używalności stetoskopu należy co jakiś czas zgłaszać się do specjalistów (wyspecjalizowanych punktów serwisowych) w celu sprawdzenia technicznego stanu przyrządu.
9. Utylizacja urządzeń przeprowadzana jest zgodnie z zasadami, obowiązującymi obecnie w danym regionie. Specjalne warunki utylizacji nie zostały ustalone przez producenta.
10. Warunki eksploatacji: temperatura od +10°C do +40°C; wilgotność względna 85% i mniej. Warunki przechowywania i transportu: temperatura od -34°C do +50°C; wilgotność względna 85% i mniej.

Zobowiązania gwarancyjne

1. Na sprzęt LD jest ustalony okres gwarancji, który określono w karcie gwarancyjnej produktu.
2. Zobowiązania gwarancyjne potwierdzone są kartą gwarancyjną, otrzymywaną przez nabywcę przy zakupie stetoskopu.

Certyfikacja i rejestracja państwowa

Produkcja urządzeń certyfikowana jest według międzynarodowego standardu ISO13485.

✉ Reklamacje i prośby należy kierować na adres oficjalnego importera:

LittleDoctor Europe Sp. z o. o., ul. Zawila 57G, 30-390 Kraków, Polska.

Biuro handlowe tel.: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53.

Serwis tel.: +48 12 2684748, 2684749

E-mail: biuro@littledoctor.pl

www.LittleDoctor.pl

Produkt kompanii: Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 35 Selegie Road #09-05 Parkline Shopping Centre, Singapore 188307.

Eksporter: Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

Producent: Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd., No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, P. R. China.

www.LittleDoctor.ru



LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.

Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699,

Fax: 65-62342197, E-mail: ld@singaporemail.com

® Registered Trade Marks Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

© Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2014

E050/1401/1