



RENA Spółdzielnia

Al. T. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
tel. 17 853 79 14, mobile: 696 806 986
mail: ortohurt@rena.rzeszow.pl www.rena.rzeszow.pl



Materac

MATERAC SZPITALNY

W POKROWCU Z DZIANINY PAROPRZEPUSZCZALNEJ



Wymiar w cm

143 / 1	143 / 2	143 / 3
200x90x15	200x90x12	200x90x10

Numer kat. REF 143

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Zastosowanie: Materace szpitalne stosowane są jako wyposażenie do łóżka szpitalnego, rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub sanatoryjnego. Zastosowanie sprężystej pianki poliuretanowej przyczynia się do równomiernego i pełno kontaktowego podparcia poszczególnych odcinków kręgosłupa i dodatkowo oddziałuje na spoczynkową regulację napięcia mięśniowego. Podstawowymi zaletami materacy, które decydują o skuteczności ich działania jest bardzo duża przepuszczalność gazów i samoczynne działanie.

Środki dozwolone!!! (dezynfekcja)		
Rodzaj środka aktywnego lub powierzchniowo-czynnego	Max. zawartość w środku dezynfekcyjnym	Spryskać powierzchnię materaca środkiem dezynfekcyjnym, pozostawić na czas działania środka, po czym należy zmyć wodą i wysuszyć
2-propanol	35%	
1-propanol	25%	
Etanol	10%	
Chlorek benzyloalkilamonowy	0,2%	
Glukoprotamina	25%	

Przeciwwskazania: Brak przeciwwskazań

Użytkowanie: Materace są estetycznym, łatwym w użyciu i obsłudze wyrobem do stosowania jako wyposażenie do łóżka. Stosować zgodnie z przeznaczeniem oraz ściśle według zaleceń lekarza.

Sposób czyszczenia i konserwacji: Po wyjęciu wkładu, maksymalna temperatura prania pokrowca wynosi 90°C, proces prania łagodny (min. 50 cykli). Nie prać chemicznie, nie chlorować !!! (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor). Dokładnie wypłukać po każdorazowym praniu. Dopuszczalne jest suszenie pokrowca w suszarce bębnowej (suszenie w normalnej temperaturze). Nie prasować!!! (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer, piec, otwarty ogień itp.). Wietrzyć w suche dni. Nie należy dopuszczać do silnego zabrudzenia wyrobu.

Przechowywanie: Przechowywać w pomieszczeniu suchym, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł światła i ciepła, najlepiej w fabrycznym opakowaniu. Długotrwałe oddziaływanie światła słonecznego i intensywne oświetlanie może spowodować odbarwienie (żółknięcie) pianki, z której wykonany jest wkład.



UWAGI:

STOSOWAĆ zgodnie z przeznaczeniem. Nie dopuścić do nadmiernego zabrudzenia. Unikać styczności z olejami oraz innymi agresywnymi środkami i oparami chemicznymi, ponieważ mogą one zniszczyć wkład z pianki jak i pokrowiec ze specjalnej dzianiny. Niedopuszczalne są samowolne przeróbki, co z reguły pogarsza właściwości użytkowych. W przypadku uszkodzeń należy oddać wyrób do naprawy lub wymienić na nowy. Pogorszenie właściwości wizualno-estetycznych (typu

zmszczenie powierzchni) nie wpływa na zmianę parametrów użytkowych materiału (właściwości fizyko-mechanicznych).

WYRÓB JEST PRZEZNACZONY TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jeśli występują działania niepożądane np.: alergia, ból – skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia.

Warunki reklamacji: Reklamacje wyrobu przyjmowane są za okazaniem dowodu sprzedaży. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte, powstałe z winy producenta. Produkt zgłoszony do reklamacji powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym przyjętym w handlu.

Reklamacji nie podlegają: Uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia, wady powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków użytkowania lub sposobu czyszczenia i konserwacji, uszkodzenia mechaniczne (otarcia, przetarcia), odbarwienia pokrowca, wygoda i komfort użytkowania.



Data produkcji:

LOT



Data instrukcji: 16 stycznia 2023 rok – wersja nr 3