

Instrukcja montażu i obsługi

Uchwyt prosty prysznicowy 46,5cm

Model 804/465CC



BEZ BARIER

BEZ BARIER

I. Dane techniczne /Rys. A/

Długość uchwytu	465 [mm]
Odstęłość od ściany	65 [mm]
Dopuszczalne obciążenie	120 [kg]
Waga netto	0,766 [kg]

II. Zastosowanie

Uchwyt prosty prysznicowy wykonany został z materiałów odpornych na korozję, dzięki czemu doskonale sprawdza się w warunkach panujących w łazienkach. Może on znaleźć zastosowanie również w gabinetach lekarskich, szpitalach i innych miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych lub osób starszych. Poprzez zastosowanie uchwytu prostego prysznicowego, kompensowane jest upośledzenie narządów ruchu, oraz kręgosłupa. Zwiększone jest bezpieczeństwo korzystania z prysznica. Uchwyt prosty prysznicowy może być mocowany osobno, jak również może być połączony wraz z innymi uchwytami w różne moduły /Rys. C/. Do połączenia uchwytów w moduły należy zastosować łącznik kątowy 806CC.

III. Budowa /Rys. A i B/

1. Rurka uchwytu prostego prysznicowego

IV. Montaż /Rys. B/



Zalecany jest montaż uchwytu prostego prysznicowego do ściany pełnej. W przypadku montażu w materiałach z pustką i w gazobetonie otwory należy wierceć bez uderu. Otwory po wierceniu należy oczyścić z pyłu oraz zwiercić. Uchwyt prosty prysznicowy przykręcić do ściany przy pomocy 4 wkrętów poz. 2 i kołków rozporowych poz.3 załączonych w zestawie. Po przykręceniu uchwytu, na wkręty nałożyć zaślepki poz. 4 dołączone w zestawie. Nie wolno mocować prostego prysznicowego bezpośrednio do płyt kartonowo - gipsowych !

V. Obsługa i eksploatacja /Rys. B/


1. Przed użytkowaniem uchwytu prostego prysznicowego należy zwrócić uwagę na stan techniczny i pewność zamocowania do ściany.
2. Zaleca się okresowe sprawdzenie prawidłowego zamocowania uchwytu prostego prysznicowego.
3. W przypadku widocznej szczeliny pomiędzy podkładką a ścianą należy dokręcić wkręty mocujące poz. 2.

BEZ BARIER

BEZ BARIER

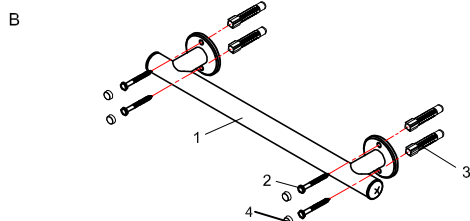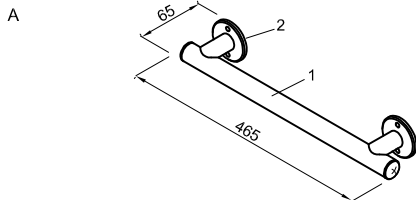

Przykładowe moduły Andex Bez Barier

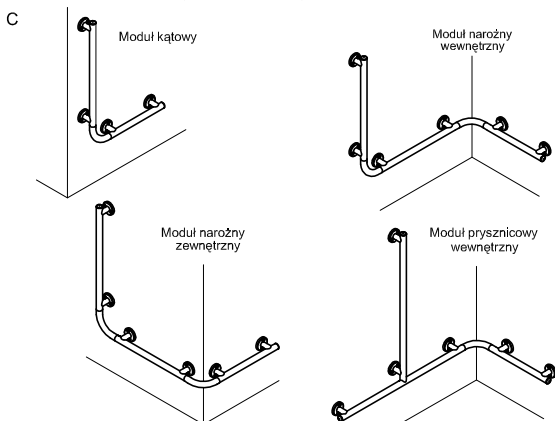

VI. Konserwacja

1. Stal nierdzewna Inox charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na czynniki działające w trakcie normalnej eksploatacji. Nie traci swego polysku i gładkości powierzchni, pod warunkiem systematycznej konserwacji przy użyciu odpowiednich środków czyszczących. Należy używać środków przeznaczonych do czyszczenia szkła, ale nie zawierających chlorków. Powierzchnie bardzo zaniedbane mogą być czyszczone przy użyciu środków do polerowania metali. Niedopuszczalne jest stosowanie środków zawierających chlor, a w szczególności kwas solny. Może to prowadzić do przeżłocenia powierzchni lub pojawienia się rdzawych plam.
2. Do zwykłego zabrudzenia stosować mokrą tkaninę, do bardziej opornego - nylonowe gąbki. Nie wolno stosować stalowych poduszek i szczotek druczanych do szorowania, aby uniknąć porysowania powierzchni i zanieczyszczenia cząsteczkami żelaza.
3. Środki zastosowane do konserwacji uchwytu prostego prysznicowego, powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do ich stosowania.

VII. Zalecenia

1. Użytkować uchwyt prosty prysznicowy zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Czyszczenie uchwytu ze stali nierdzewnej winno być dokonywane zanim nagromadzone zanieczyszczenia lub odciski palców staną się widoczne, dla zminimalizowania pracochłonności i kosztów czyszczenia.