

Wyrób medyczny: Temblak do podnoszenia ramienia

Wersja: Temblak z pasem piersiowym - Opatrunek Desaulta (MEK 4001)

Opis:

- Wykonany z trójwarstwowej dzianiny, higroskopijnej, oddychającej.
- Składa się z mankieta mocującego przedramię, opasek w kształcie krzyża, które unieruchamiają kończynę w pozycji zgiętej (kąt w stawie łokciowym 90 stopni) oraz szerokiego pasa, który mocuje kończynę do tułowia.
- Opatrunek Desaulta ma jeden uniwersalny rozmiar, jest wygodnie regulowany za pomocą rzepów, dostosowując się do kształtu ciała.
- Wszechstronność konstrukcji pozwala na stosowanie zarówno na prawą, jak i lewą rękę. Jest odpowiedni dla mężczyzn i kobiet.
- Wyrób jest wyrobem wielokrotnego użytku. Ze względów higienicznych i medycznych zaleca się stosowanie tylko przez jednego użytkownika. Wyrób nie wymaga sterylizacji przed ponownym użyciem. Porady dotyczące standardowej pielęgnacji opisane są w punkcie 6 instrukcji używania.

Funkcje:

- Zapewnia całkowite unieruchomienie w stawie barkowym, stawie barkowo-obojczykowym, łopatki.
- Wspomaga wczesną mobilizację w okresie pooperacyjnym i pourazowym.

Wskazania do stosowania:

- Unieruchomienie pooperacyjne i pourazowe stawu

IFU_4001_v1

- barkowego i barkowo-obojczykowego.
- Rehabilitacja po unieruchomieniu gipsowym.
- Choroby zapalne stawu barkowego.
- Niedowład i porażenie kończyny górnej.
- Skręcenia i zwichnięcia stawu barkowego i łokciowego.

Przeciwwskazania:

- Reakcje alergiczne, nadwrażliwość, nietolerancja materiału z którego jest wykonany produkt.
- Obecność owrzodzeń troficznych, kontaktowego zapalenia skóry i innych zmian zapalnych skóry w miejscu stosowania.

Instrukcja obsługi:

- Zaleca się noszenie temblaka na bawełnianej bieliźnie.
- Umieść mankieta z przodu tułowia pacjenta, tak aby pasy barkowe pozostały z tyłu.
- Zegnij zaopatrywane ramię w stawie łokciowym pod kątem 90 stopni i przyłóż do tułowia.
- Zabezpiecz przedramię szerokim mankietem na rzep.
- Umieść paski naramienne na plecach w kształcie litery X.
- Zamocuj je z przodu mankieta.
- Przymocuj poziomą taśmę rzepem do mankieta i przeciągnij ją przez obolałe ramię wokół tułowia.

Porady dotyczące pielęgnacji:

- Zapnij wszystkie zapięcia przed praniem.
- Zalecane pranie ręczne w wodzie o temperaturze nieprzekraczającej 30 stopni z użyciem łagodnych detergentów. Nie wybielać, nie gotować.
- Suszyć na płasko, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, nie prasować.

IFU_4001_v1

Ostrzeżenia:

- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
- W przypadku braku poprawy pomimo stosowania wyrobu medycznego, należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.



Kolor: szary, czarny.

Rozmiar: uniwersalny.

Data wydania instrukcji używania: 10.2021;
wersja: 01



MEK-ORTO sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 26/13
02-495 Warszawa



4001

IFU_4001_v1

Wyjaśnienie zastosowanych symboli:

	wytwórca
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Ostrzeżenie
	Data produkcji
	Kod UDI
	Zapoznaj się z instrukcją używania
	Wyrób medyczny
	Numer modelu
	Jeden pacjent- wielokrotne użycie
	Oznakowanie zgodności CE

Temblak z pasem piersiowym - Opatrunek Desaulta (MEK 4001)

