

Worek na nogę

Conveen®

Pas mocujący



## Instrukcja użycia

23323118 Version 1

Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Coloplast A/S.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2020-09-28

## Przeznaczenie

Worek na mocz służy do biernej zbiórki moczu.

## Wskazania

Worki na mocz są wskazane dla pacjentów cierpiących na nietrzymanie moczu i (lub) zatrzymanie moczu niezależnie od etiologii.

## Ostrzeżenia

Ponowne użycie produktu jednorazowego nie jest zalecane ze względu na ryzyko wystąpienia zanieczyszczenia krzyżowego.

Przetwarzanie, mycie, dezynfekcja i/lub (re)sterylizacja mogą powodować obniżenie jakości produktu, co z kolei stwarza dodatkowe ryzyko fizycznej szkody lub zakażenia u pacjenta.

Ten worek na nogę jest przeznaczony do noszenia poza łóżkiem podczas poruszania się. Zmień na przyłóżkowy worek do drenażu o większej pojemności kiedy jesteś w łóżku i podczas snu. Opcjonalnie, pozostaw worek na nogę na swoim miejscu i zamocuj dodatkowo przyłóżkowy worek do drenażu, aby zwiększyć całkowitą pojemność systemu zbiórki moczu.

## Informacje

Worek jest dostarczany jako niesterylny i przeznaczony do jednorazowego zastosowania u pacjenta.

Produkt dostępny jest w pojemnościach 350 ml, 500 ml, 750 ml i 1000 ml.

Paski można prać w temperaturze 40°C/104°F lub niższej.

Do czasu wyjęcia produktów w celu ich użycia należy je przechowywać w opakowaniu, które pełni funkcję ochronną, a etykieta znajdująca się na opakowaniu zawiera ważne informacje, takie jak numer serii, datę ważności i unikalny kod kreskowy.

Produktu nie trzeba usuwać przed badaniem metodą rezonansu magnetycznego, ponieważ można go bezpiecznie używać w środowisku rezonansu magnetycznego.


Firma Coloplast nie ponosi odpowiedzialności za urazy ani szkody, jakie mogą powstać ze stosowania niniejszego produktu w sposób niezgodny z aktualnymi zaleceniami firmy Coloplast.

## Sposób użycia


### Przygotowanie



Worek na nogę ma dren wlotowy, który jest zamocowany fabrycznie do worka lub może być dostarczony osobno. Od długości drenu zależy, w którym miejscu nogi możesz umieścić worek.

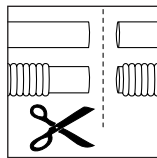


Jeśli dren nie ma zamocowanego fabrycznie złącza wlotowego, możesz go skrócić do żądanej długości. Po prostu przetnij dren nożyczkami.

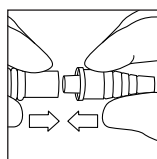


Podczas cięcia części poafalowanej drenu, pozostaw jak najwięcej odcinka prostego na swoim miejscu. Zapewni to bezpieczne połączenie między drenem a złączem podczas montażu złącza.

Podłącz złącze do drenu, wciskając wąski koniec złącza do drenu najdalej jak się da.

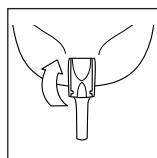

Zawór z zaciskiem

Upewnij się, że zawór przy ujściu jest zamknięty.

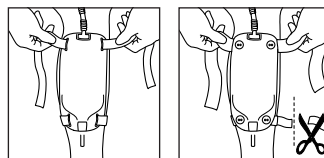


Zamocuj paski mocujące do worka. Dopasuj worek do nogi. Nadmiar pasa mocującego można przyciąć.

### Pas silikonowany Conveen

Użyj dłuższego pasa mocującego u góry worka. W przypadku mocowania worka na łydce owiń górny pas mocujący w kształt ósemki pod i nad kolanem.


### Stosowanie

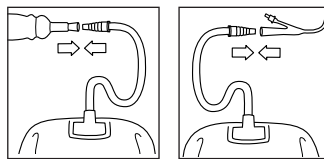

Jeśli złącze ma osłonkę, należy ją usunąć.

Podłącz złącze do cewnika zewnętrznego lub cewnika wprowadzonego na stałe.

System zbiórki moczu jest gotowy do użycia.

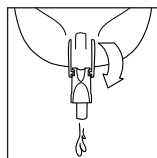


W celu zapewnienia optymalnego drenażu zaleca się opróżnianie worka, gdy poziom wypełnienia wyniesie nieco ponad połowę.

## Zdejmowanie

Odłącz worek od cewnika zewnętrznego lub cewnika wprowadzonego na stałe.

Poluzuj pasy mocujące, a następnie usuń worek z nogi.

## Utylizacja

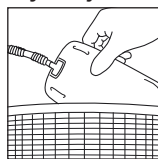

Wymieniaj worek zgodnie z lokalnymi wytycznymi i zaleceniami.

Pasów mocujących można używać ponownie.

Opróżnij worek przed wyrzuceniem.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku i można go utylizować wraz z odpadami komunalnymi.

Nie należy wyrzucać produktu do toalety.

## Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych

Jeżeli w trakcie użytkowania tego produktu lub w wyniku jego użytkowania doszło do poważnego zdarzenia niepożądanego, należy zgłosić to producentowi i właściwemu organowi krajowemu.

## Objaśnienie symboli



Urządzenie medyczne



Oznaczenie wskazujące, że produkt jest zgodny z przepisami europejskimi dotyczącymi wyrobów medycznych.



Numer katalogowy



Termin ważności (RRRR-MM-DD)



Numer serii



Data produkcji (RRRR-MM-DD)



Producent



Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej / Unii Europejskiej



Przeczytaj instrukcję użycia



Do jednorazowego użytku



Niesterylny



Wskazuje, że kod kreskowy zawiera niepowtarzalny numer identyfikacyjny urządzenia



(Global Trade Item Number) Globalny numer handlowy artykułu



Przechowywać z dala od światła słonecznego



Tą stroną do góry



Opakowanie nadające się do recyklingu



Produkt można prać w temperaturze 40°C/104°F