

Instrukcja używania Materacy turystycznych



Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi Warunkami Instrukcji Używania.

Przed przystąpieniem do używania wyrobu, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji Używania. W celu prawidłowego stosowania wyrobu, należy przestrzegać wszystkich zaleceń i wskazówek podanych w Instrukcji. Wyrób należy stosować zgodnie z przewidzianym przez producenta zastosowaniem.

Przewidziane zastosowanie

Materace przeznaczone są dla dzieci do stosowania w połączeniu z łóżkiem dziecięcym, łóżkiem turystycznym lub wybranymi produktami.

Materace firmy Rücken zapewniają swobodną cyrkulację powietrza, dzięki czemu zapobiegają nadmiernemu poceniu w trakcie snu.

Dodatkowo pokrowiec nasączony środkiem zakłócającym metabolizm niepożądanych mikroorganizmów zmniejsza populację roztoczy kurzu co pozytywnie wpływa na profilaktykę wystąpienia alergii.

Wskazania

- zmniejszenie ryzyka stanu zapalnego skóry (odparzeń) i podrażnień,
- zapobieganie powstawaniu potówek (miliarii),
- zmniejszenie ryzyka wystąpienia alergii na roztocza kurzu (działanie antyalergiczne).

Charakterystyka

Model	Rozmiar	Przeznaczenie	Budowa
TRAVEL SANITIZED	120x60x5,5 cm	łóżko dziecięce i turystyczne	Pokrowiec: dzianina Cantana Sanitized przepikowana owatą i flizeliną, siatka 3D-PES, zamek, Rdzeń: pianka PUR T-25

Model **TRAVEL SANITIZED** wykonany jest z pianki poliuretanowej. Wyposażony jest w pokrowiec **CANTANA SANITIZED**.

Sposób działania i korzyści kliniczne

Materac posiada dwie strony o różnej twardości. Na ostateczną twardość każdej ze stron materaca wpływają poziome i pionowe kanaliki wentylacyjne (profile cięcia) – różna budowa i ilość profili wentylacyjnych wpływa na odczuwalną twardość obu stron materaca.

Wycięte profile w piankach oraz poziomie i pionowe kanaliki umieszczone są tak, by wzmocnić przepływ powietrza. Możliwość korzystania z dwóch stron materaca zmniejsza ilość namnażanych drobnoustrojów i roztoczy poprawiając higienę snu.

Strony twardości materacy oznaczane są na etykiecie produktu dołączanej do niego.

Pokrowiec materaca wykonany jest z dzianiny Cantana, która jest nasączona apreturą antybakteryjną - środkiem Sanitized® TH 22-27. Środek ten ma efekt bakteriostatyczny i grzybobójczy wobec dużej liczby bakterii gramdodatnich i gramujemnych, drożdży,

mikrogrzybów, pleśni oraz alg. Jego działanie na komórki zakłóca procesy metaboliczne niepożądanych mikroorganizmów, tym samym uniemożliwiając im funkcjonowanie, wzrost i rozmnażanie. Biorąc pod uwagę skuteczność preparatu Sanitized® TH 22-27 przeciwko mikrogrzybom, zostaje przerwany łańcuch pokarmowy roztoczy kurzu, co w konsekwencji znacząco ogranicza wzrost populacji roztoczy.

Konserwacja wkładu materaca

Materac należy przynajmniej raz na 6 miesięcy obrócić o 180 stopni, zwiększa to żywotność i poprawia higienę snu. Materace są po wyprodukowaniu wietrzone, mimo tego mogą odznaczać się własnym specyficznym, zapachem, który zanika w miarę upływu czasu. Materaca bez wyraźnego oznakowania o możliwości prania, nie należy czyścić chemicznie, prać na mokro lub czyścić przy pomocy pary wodnej, materacy nie należy suszyć na słońcu, materac powinien być regularnie wietrzony. Ewentualne zabrudzenia należy czyścić wilgotną ściereczką. W przypadku zalania, zamoczenia materaca suszyć w pozycji poziomej, nie odwracając go. Woda (wilgoć) powinna odparowywać stale w jednym kierunku. Materac powinien być umieszczony na podstawie gwarantującej dostęp powietrza od spodu. Pokrowiec materaca jest przeznaczony do zdejmowania, należy go zdjąć i suszyć osobno.

Konserwacja pokrowca

Pokrowiec materaca jest pokrowcem zdejmowanym. W środkowej części pokrowca z trzech lub czterech stron wszyty jest zamek, ułatwiający zdejmowanie. Przed praniem pokrowiec należy bezwzględnie zasunąć. Pokrowiec należy prać w temperaturze do 40 stopni Celsjusza z użyciem delikatnych detergentów, nie chlorować, nie czyścić chemicznie. Nie suszyć mechanicznie. Suszyć w pozycji pionowej. Nie prasować.

Przeciwwskazania

Nie stosować wyrobu bezpośrednio w kontakcie ze skórą. Zalecane jest stosowanie dodatkowego okrycia np. w formie prześcieradła. Nie stosować w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych skóry. Nie stosować w przypadku mechanicznego uszkodzenia wyrobu, np. rozerwania, rozwarstwienia. Nie stosować inaczej niż zgodnie z przeznaczeniem i przewidzianym zastosowaniem.

Działania niepożądane

Nie stwierdzono występowania działań niepożądanych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Wyrób po rozpakowaniu należy wietrzyć przez dobę.

Wyrób należy dobrać odpowiednio do rozmiaru dziecka.

Materaca nie należy kłaść na podłożach takich jak podłoga czy lita płyta, które uniemożliwiają wentylację.

Nie należy wystawiać produktu na działanie źródeł ognia mogących wywołać zapłon.

Nie należy wystawiać produktu na długotrwałe działanie niskich temperatur (poniżej 5°C).

Nie należy wystawiać materaca na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, które może spowodować jego przebarwienie.

Do każdego materaca wszywana jest metka zawierająca wskazówki pielęgnacyjne. Warto przestrzegać tych wskazówek aby poprzez niewłaściwą pielęgnację nie zniszczyć pokrowca materaca.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Utylizacja

Utylizacja i recykling zużytego wyrobu i opakowania musi być zgodna z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawnymi.

Wyjaśnienie symboli

	Oznakowanie CE. Wyrób jest zgodny z Rozporządzeniem 2017/745
	WYRÓB MEDYCZNY
	Producent
	Data produkcji
	Numer partii
	Kod UDI – niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
	Zapoznaj się z instrukcją używania
	Ostrzeżenie
	Zawiera naturalny lateks
	Chronić przed wilgocią
	Chronić przed promieniami słonecznymi
	Nie prasować
	Nie chlorować
	Nie czyścić chemicznie
	Nie suszyć mechanicznie



Rücken Sp. z o. o.

**ul. Kujawska 44a
86-050 Solec Kujawski**

