



INSTRUKCJA MONTAŻU NAKŁADKI NA ZĘBY



KROK 1

**WSYP BIAŁE KULKI DO MISECZKI Z GORĄCĄ WODĄ I POCZEKAJ OK. 2 MINUT
AŻ KULKI STANĄ SIĘ PRZEŻROCZYSTE I SIĘ POSKLEJAJĄ**



KROK 2

**PRZY POMOCY ŁŻECZKI ,WYJMIJ KULKI Z MISECZKI I ULEP W RĘKU WAŁEK
ok.5 cm**

PO ULEPIENIU ,UŁÓŻ WAŁEK NA RÓŻOWEJ MASIE NAKŁADKI.



KROK 3

ZMIEŃ WODĘ NA GORĄCĄ I WŁÓŻ NAKŁADKĘ Z WAŁECZKIEM DO MISECZKI Z GORĄCĄ WODĄ / 90-95 STOPNI CELSJUSZA / POCZEKAJ OK. 4 MINUT



KROK 4

UWAGA NAKŁADKA JEST GORĄCA !!!

ZA POMOCĄ ŁYŻECZKI WYJMIJ NAKŁADKĘ Z GORĄCEJ WODY , STAŃ PRZED LUSTREM I ZAŁÓŻ NAKŁADKĘ . **BARDZO MOCNO DOCIŚNIJ** NAKŁADKĘ, TAK ABY ODCISNEŁY SIĘ NA WEWNETRZNEJ STRONIE NAKŁADKI WŁASNE ZĘBY.

MASĘ KTÓRA WYPŁYNEŁA OD SPODU NAKŁADKI , ZAWIŃ PALCAMI POD WŁASNE ZĘBY W TEN SPOSÓB ABY UTWORZYŁY SIĘ „KIESZONKI” W KTÓRE WCHODZA WŁASNE ŻĘBY.DOCISKAJĄC TRZYMAJ NAKŁADKĘ W JAMIE USTNEJ OK.4 MINUT.



KROK 5

WYJMIJ NAKŁADKE Z JAMY USTNEJ I POCZEKAJ OK.4-5 MINUT AŻ NAKŁADKA WYSTYGNIE. WEWNĘTRZNA MASA ZROBI SIĘ RÓZOWO MLECZNA. NAKŁADKA GOTOWA JEST DO UŻYCIA.



ŻEBY NAKŁADKA SIĘ DOBRZE TRZYMAŁA MOŻNA UŻYĆ DOWOLNEGO KLEJU DO PROTEZ ZĘBOWYCH./np. CORREGA MOCNY /

KROK 6

GDY NIE JESTEŚ ZADOWOLONY Z EFEKTU, PONOWNIE WŁÓŻ NAKŁADKĘ DO MISECZKI Z GORĄCĄ WODĄ I POWTÓRZ KROKI OD 4 DO 6

UWAGA !!! WSZYSTKIE OPREACJE NA NAKŁADCE WYKONYWAĆ POD GORĄCĄ WODĄ, W PRZECIWNYM WYPADKU NAKŁADKA MOŻE PĘKNAĆ.

Importer z USA i dystrybutor :

A.D.I. Adrian Zambrzycki ul. Częstochowska 3a lok 2 02-344 Warszawa
tel.790-386-286 adrianwawa1@wp.pl www.sztuczne-zeby.com

CZYSZCZENIE NAKŁADEK NA ZĘBY

NAKŁADKI NA ZĘBY INSTANT SMILE seria FIT

Za każdym razem gdy wyjmujemy nakładkę z jamy ustnej należy ją umyć w ciepłej wodzie.

Pod ciepłą wodą myjemy szczoteczką do zębów stronę wewnętrzną nakładki w celu usunięcia resztek jedzenia i ewentualnie kleju do protez zębowych.

To samo robimy ze stroną imitującą zęby.

W przypadku gdy klej na wewnętrznej stronie nakładki zaschnie ,to usuwamy go za pomocą szczoteczki do zębów pod ciepłą bieżącą wodą ,szorując miejsca z zaschniętym klejem. /nie używać innych narzędzi /

UWAGA

Nakładki na zęby mają tendencję do odbarwiania się, dla tego u osób palących papierosy, fajkę, pijących kawę, coca-cola lub inne napoje które mogą odbarwiać nakładkę na zęby KONIECZNE jest dla utrzymania koloru czyszczenie nakładki przy pomocy PERHYDROLU – 30 % - 35% woda utleniona. Zabieg ten w pełni przywraca biel nakładki. EMULSJE do czyszczenia ,można zakupić na mojej aukcji – [emusja do czyszczenia nakładek na zęby](#)

PRODUKT NIE JEST CZĘŚCIOWĄ PROTEZĄ ANI WYROBEM LUB URZĄDZENIEM MEDYCZNYM
JEST TO PRODUKT TYMCZASOWY, PRZEZNACZONY TYLKO DO CELÓW ESTETYCZNYCH
W PRODUKCIE NIE MOŻNA SPAĆ – GROZI ZADŁAWIENIEM
WYRÓB PODLEGA PRZEPISOM USTAWY Z DNIA 12.12.2003 r. O OGÓLNYM
BEZPIECZEŃSTWIE PRODUKTÓW.

DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT UŻYWANIA, MONTAŻU LUB CZYSZCZENIA
PRODUKTU MOŻNA SIĘ DOWIEDZIEĆ ZE STONY [www. sztyczne-zeby.eu](http://www.sztyczne-zeby.eu) tel. 790-386-286