

Aparat, szyna na haluksy 2 szt.

instrukcja obsługi

PL

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

Aparat przeznaczony jest dla osób zmagających się z haluksem (koślawym paluchem). Jest odpowiedni dla mężczyzn i kobiet. Zmniejsza ból i przywraca palcom właściwe położenie.

1. Przygotuj aparat: literką L oznaczony jest aparat na lewą stopę, literką R oznaczony jest aparat na prawą stopę.
2. Przed nałożeniem aparatu należy rozpiąć rzep i ściągnąć go z górnego ramienia aparatu.
3. Aparat należy wsunąć na stopę tak, aby półokrągłą część wyściełaną pianką znalazła się między paluchem a pozostałymi palcami.
4. Tekstylną opaskę należy ustawić tak, aby obejmowała wewnętrzną część stopy na wysokości zniekształcenia.
5. Taśmę ściągającą zaczepioną na dolnym ramieniu należy przeciągnąć po zewnętrznej stronie stopy, przełożyć przez górne ramię, zaciągnąć i ustalić siłę korekcyjną rzepa poprzez odpowiednie naciągnięcie taśmy ściągającej.
6. Zaleca się stopniowe zwiększanie siły naciągnięcia rzepa.



Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi.

Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania go w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.