

Instrukcja obsługi – Podpórka do wanny

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzmy, że będą Państwo w pełni zadowoleni z użytkowania tego urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera informacje pomocne w trakcie użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. Podpórka ułatwia wchodzenie do wanny.

Uwaga!

Należy zachować instrukcję obsługi, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie! Przed pierwszym użyciem zakupionego produktu należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, a przede wszystkim z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Przekazując produkt kolejnemu użytkownikowi, należy dołączyć do niego instrukcję obsługi. Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona wyłącznie dla produktu, z którym jest dostarczana i zawiera ważne informacje dotyczące jego montażu i eksploatacji. Przed rozpoczęciem użytkowania podpórki należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi. Nie przestrzeganie zawartych w niej zaleceń może być przyczyną poważnych obrażeń lub doprowadzić do uszkodzenia produktu.

Ważne!

- Maksymalne obciążenie podpórki to 120 kg! Z urządzenia nie może korzystać większa ilość osób jednocześnie.
- Produkt powinien być wykorzystywany do celów, do których jest przeznaczony zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Nie wolno wprowadzać zmian w konstrukcji produktu ani używać go w połączeniu z elementami meblowania lub innych urządzeń.
- Nie wolno dołączać do podpórki żadnych dodatkowych elementów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno używać go komercyjnie (np. w szpitalach, domach spokojnej starości itd.).
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony oraz przeprowadzić kontrolę poprawności dokręcenia wszystkich połączeń śrubowych. Niestabilna podpórka może być spowodować poważne obrażenia.
- Nie wolno samemu wykonywać napraw, ponieważ grozi to utratą gwarancji.
- Wszelkie naprawy należy zlecać wykwalifikowanemu serwisowi.
- Jeżeli podpórka jest używana przez dzieci lub w pobliżu dzieci bądź osób o ograniczonej sprawności ruchowej, powinny być one dozorowane przez osobę służącą pomocą. Produkt nie jest zabawką.
- Należy zawsze zwracać uwagę na to, żeby podpórka stała stabilnie.
- Pozostałości opakowania należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się!

Zawartość opakowania

Po zakupieniu produktu należy sprawdzić czy dostarczono wszystkie jego elementy oraz czy nie są one uszkodzone. Jeżeli zmontowana podpórka nie stoi stabilnie, nie wolno z niej korzystać. W takim przypadku należy skontaktować się z punktem serwisowym.

W opakowaniu znajdują się: elementy konstrukcyjne podpórki, woreczek ze śrubami oraz podkładki dylatacyjne i podpierające. Jeżeli podczas rozpakowywania elementów produktu zauważył jakkolwiek usterkę, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zalecenia dotyczące montażu

Montaż:

Włóż ramię mocujące w główny element podpórki w kształcie „U” (w obejmie z otworami), a do otworów w obejmach wsuń śruby dystansujące wkręcając je lekko w gwint ramienia. Załóż gumowe końcówki na główny element podpórki (4 szt.). Można użyć dwustronnej taśmy samoprzylepnej, żeby ramię lepiej stykało się z wanną. W takim przypadku należy przykleić taśmę zamiast gumowych końcówek (zawsze 1 kawałek taśmy zamiast 2 końcówek). Tak przygotowaną podpórkę dośnuj do ścianki wanny (tak, jak to pokazano na rysunku znajdującym się na opakowaniu) a następnie wkręć śruby tak głęboko, żeby ramię podpórki dobrze dolegało do zewnętrznej strony wanny. W ten sposób podpórka zostanie ustabilizowana. Dzięki tym śrubom podpórka wraz z wanną stanowią jedność. Aby

dostosować pozycję uchwytu do kształtu wanny, można użyć podkładek dystansujących tak jak to pokazano na rysunku. Na główki śrub należy założyć plastikowe kapturki ochronne.

Ostrzeżenie

Każdorazowo przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony oraz czy wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone. Niestabilność podpórki może być przyczyną groźnych urazów!

Czyszczenie

Nie wolno czyścić elementów podpórki agresywnymi środkami czyszczącymi, zabrudzenia i kurz należy usuwać miękką szmatką, może być lekko nawilżona. W przypadku silnego zabrudzenia można używać zwykłego neutralnego detergentu.

Dane techniczne

wymiary: 51,4 x 22,5 cm

Dopuszczalna szerokość krawędzi wanny: 7,5 - 11 cm

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Ochrona środowiska naturalnego

Po upływie czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać urządzenia do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając z produktu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w produkcie lub nie stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:


- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Zamieszczone w instrukcji ilustracje mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu zakupionego produktu.



 <p>(A) 1x</p>	<p>(B) 2x</p> 	<p>(D) 2x</p> 	<p>(F) 2x</p> 
	<p>(C) 1x</p> 	<p>(E) 1x</p> 	<p>(G) 1x</p> 
			<p>(H) 1x</p> 
			<p>(I) 2x</p> 
			<p>(J) 4x</p> 
			<p>(K) 2x</p> 

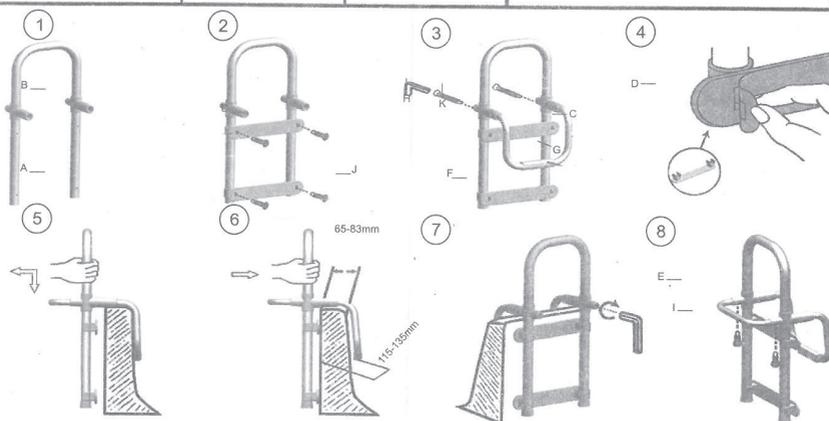

Myć wyłącznie wodą z mydłem.
 Nie używać innych środków czyszczących.

Maksymalne obciążenie 120 kg.

