

# Wyrób medyczny: Orteza lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa, giętka

## Wersja: Gorset lędźwiowo-krzyżowy z sześcioma stawkami i fiszbinami (MEK 3008)

### Opis:

- Wyrób medyczny gorset lędźwiowo-krzyżowy z sześcioma stawkami i fiszbinami wykonany jest z rozciągliwego i oddychającego materiału zapewniającego wygodne noszenie.
- Wyposażony w 6 stalek stabilizujących
- Anatomiczny kształt i dodatkowa poduszka z tyłu ortozy sprawia, że stosowanie gorsetu jest maksymalnie bezpieczne i wygodne.
- Wszechstronność konstrukcji pozwala na używanie gorsetu zarówno przez mężczyzn, jak i kobiet.
- Wyrób medyczny dostępny jest w 6 rozmiarach – patrz punkt 5 Instrukcji.
- Orteza jest wyrobem wielokrotnego użytku. Ze względów higienicznych i medycznych zaleca się stosowanie tylko przez jednego użytkownika. Wyrób nie wymaga sterylizacji przed ponownym użyciem. Porady dotyczące standardowej pielęgnacji opisane są w punkcie 6 instrukcji używania.

### Funkcje:

- Stabilizuje i odciąża odcinek lędźwiowy kręgosłupa.
- Wspomaga rozluźnienie mięśni i łagodzenie bólu.

### Wskazania do stosowania:

- Rehabilitacja po kontuzjach, operacje kręgosłupa lędźwiowego.
- Złamanie osteoporotyczne (funkcja doleczenia)

- Osteochondroza odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
- Spondyloartroza, zapalenie mięśni, dyskopatia, bóle kręgosłupa.
- Dodatkowe wsparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa podczas nadmiernego wysiłku fizycznego.

### Przeciwwskazania:

- Reakcje alergiczne, nadwrażliwość, nietolerancja materiału z którego jest wykonany produkt.
- Urazy skóry w miejscu stosowania wyrobu.

### Instrukcja obsługi:

Zaleca się noszenie gorsetu na bawełnianej bieliźnie, wkładając go w pozycji leżącej na plecach.

1. Należy zmierzyć obwód w pasie, wybrać rozmiar z tabeli.

|      |            |            |
|------|------------|------------|
| S    | obwód pasa | 65-77 cm   |
| M    |            | 77-90 cm   |
| L    |            | 90-104 cm  |
| XL   |            | 104-116 cm |
| XXL  |            | 116-128 cm |
| XXXL |            | 128-138 cm |

2. Przymocuj pas środkowy z przodu za pomocą głównego rzepu.
3. Wyreguluj napięcie dodatkowych pasków dla uzyskania odpowiedniego usztywnienia.
4. Zabezpiecz rzepem.

### Porady dotyczące pielęgnacji:

- Zalecane pranie ręczne w wodzie o temperaturze nieprzekraczającej 30 stopni z użyciem łagodnych detergentów. Nie wybielać, nie gotować.
- Suszyć na płasko, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, nie prasować.

### Ostrzeżenia:

- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
  - W przypadku braku poprawy pomimo stosowania wyrobu medycznego, należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.
  - Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.



**Kolor:** czarny.

Data wydania instrukcji używania: 10.2021;  
wersja: 01



MEK-ORTO sp. z o.o.  
ul. Tadeusza Kościuszki 26/13  
02-495 Warszawa



Wyjaśnienie zastosowanych symboli:

|                                                                                     |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | Wytwórca                                     |
|     | Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone |
|     | Ostrzeżenie                                  |
|    | Data produkcji                               |
|    | Kod UDI                                      |
|    | Zapoznaj się z instrukcją używania           |
|    | Wyrób medyczny                               |
|   | Numer modelu                                 |
|  | Jeden pacjent- wielokrotne użycie            |
|   | Oznakowanie zgodności CE                     |

# Gorset lędźwiowo- krzyżowy z sześcioma stawkami i fiszbinami (MEK 3008)

