

Rękawica przewodząca

Opis

Rękawica przewodząca do elektrostymulacji jest skutecznym narzędziem terapeutycznym dla schorzeń związanych z dłońmi. Pomaga w łagodzeniu bólu i redukcji zapalenia, wspomaga rehabilitację po kontuzjach i operacjach, oraz poprawia funkcję mięśniową i ruchomość stawów. To efektywne rozwiązanie dla osób z problemami dłoni, poprawiające jakość życia i przyspieszające proces gojenia.





Rękawica przewodząca do elektrostymulacji została zaprojektowana z myślą o łatwym umieszczaniu elektrody w miejscu bólu dłoni.

Użytkowanie jest bardzo proste - wystarczy założyć rękawicę na dłoń.

Rękawica umożliwia precyzyjną terapię dłoni, co pozwala pacjentom zredukować ból i powrócić do aktywnego trybu życia.

Skóra musi być odpowiednio nawilżona.

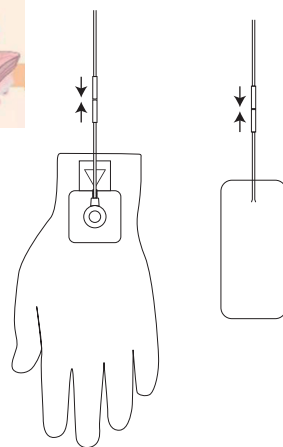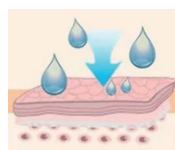

Instrukcja użytkowania

1. Skóra musi być zawsze czysta i wolna od balsamów.
2. Włóż jeden koniec kabla do metalowych zatrzasków, aby połączyć rękawicę przewodzącą z elektrodą samoprzylepną. Upewnij się, że są one prawidłowo połączone, aby zapewnić dobrą wydajność. Przykładowy rysunek znajduje się po prawej stronie.
3. Upewnij się, że rękawica jest optymalnie umieszczona na dłoni. Samoprzylepne elektrody powinny znajdować się w odległości 40 mm od rękawicy przewodzącej.
4. Upewnij się, że Elektrostymulator jest WYŁĄCZONY. Podłącz wtyczkę kabla do Elektrostymulatora. Po podłączeniu włącz Elektrostymulator i wybierz odpowiedni program.
5. Przed zakończeniem użytkowania, najpierw wyłącz Elektrostymulator. Następnie zdejmij złącza i rękawicę przewodzącą z dłoni.



Ostrzeżenie

- Jeżeli w trakcie użytkowania wystąpi jakiegokolwiek uczucie dyskomfortu lub nieprawidłowości, należy natychmiast przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem.
- Nie stosować na uszkodzoną skórę. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry, natychmiast przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli elektrody są uszkodzone, nie używać.
- Dostosuj intensywność elektrostymulacji zgodnie ze wskazaniem lekarza prowadzącego i/lub fizjoterapeuty.
- Rękawica przewodząca i elektrostymulator nie są przeznaczone do użytkowania przez dzieci. Należy trzymać urządzenie i rękawicę poza zasięgiem dzieci. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby dzieci nie potraktowały urządzenia jako zabawkę.
- Rękawica przewodząca i elektrostymulator nie są przeznaczone do użytkowania przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, chyba, że zostanie zapewniony nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania urządzenia.
- Jeśli u niektórych osób występuje podrażnienie skóry spowodowane przewodzącymi srebrnymi włóknami na rękawicy, należy przerwać stosowanie rękawicy.

Czyszczenie i konserwacja

Rękawicę myjemy w ciepłej, ale nie gorącej wodzie z neutralnym detergentem. Dokładnie opłucz rękawicę z resztek detergentu. Nie wyciskać!. Rękawicę owiń ręcznikiem frotte, aby pozbyć się nadmiaru wody. Następnie pozostaw rękawicę do wyschnięcia na powietrzu w temperaturze pokojowej. Trzymaj z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego. Nie prać w pralce. Nie wirować. Nie suszyć w suszarce elektrycznej.

Wyprodukowano dla:



BEAUTY LIMITED®

Producent/Dystrybutor:
ARCOTECH
Ul. Budowlanych 46B
45-123 Opole
Polska



Shenzhen Roundwhale Technology Co., Ltd.

Add: 202, 2/F, Building 27, Dafa Industrial Park, Longxi
Community, Longgang Street, Longgang District,
Shenzhen, China.

Tel: +86-755-23212776

Fax: +86-755-23212776

E-mail: info@roovjoy.com

Website: www.roovjoy.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Address: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Email: shholding@hotmail.com