



Sissel® Sit Special 2 w 1

Specjalnie wyprofilowana, ergonomiczna poduszka - klin korekcyjny to wszechstronne rozwiązanie stosowane w rehabilitacji, fizjoterapii i w warunkach domowych. Wymusza prawidłową pozycję ciała podczas siedzenia. Wykonana z dwóch rodzajów pianki (z delikatną wkładką pod kość guziczną) zapewnia maksymalną wygodę użytkownika.

Instrukcja użytkowania

Gratulujemy zakupu poduszki SISSEL® - produktu najwyższej jakości.

Przestrzeganie naszych zaleceń oraz instrukcji zagwarantuje Państwu pełną satysfakcję z zakupu i radość z korzystania z poduszki każdego dnia.

Działanie

Klin Sit Special to anatomicznie wyprofilowana poduszka (z mostkiem i wgłębieniami), która dzięki pochyleniu siedziska obniża pozycję kolan względem miednicy i lekko rozdziela uda. Wymusza w ten sposób właściwą pozycję ciała podczas siedzenia i odciąża kręgosłup, zapewniając wygodę, szczególnie dla osób cierpiących na ból podczas siedzenia. Dodatkowo wyposażona jest we wkładkę z pianki visco-elastic, delikatnie wspierającą i nieuciskającą kość krzyżową i guziczną. W razie odczuwania dolegliwości wkładka może również zostać wyjęta.

UWAGA! Stosowanie klina do celów terapeutycznych musi być poprzedzone konsultacją ze specjalistą oraz odbywać się pod jego nadzorem i zgodnie z jego instrukcjami!

Wskazania

- bóle pleców (w odcinku lędźwiowym, piersiowym i szyjnym)
- bóle głowy spowodowane wadami postawy
- zapobieganie bólom pleców i kręgosłupa wywołanych długotrwałym siedzeniem
- dyskopatia
- bóle w okolicy kości krzyżowej i guzicznej (np. po przebytych zabiegach lub urazach)
- ćwiczenia balansu ciała
- ćwiczenia w czasie ciąży

Przeciwwskazania

- otwarte rany
- wszelkie dolegliwości, które według opinii prowadzącego lekarza lub terapeuty stanowią przeciwwskazanie do stosowania poduszki/klina do siedzenia
- w przypadku niewspółpracujących pacjentów (o ograniczonych możliwościach poznawczych) należy stosować wyłącznie pod nadzorem profesjonalistów
- niezdiagnozowane dolegliwości
- niestabilne przemieszczenia kręgosłupa lub miednicy

Mocowanie

Poduszka jest przenośna i uniwersalna - pasuje na wszystkie rodzaje stabilnych, twardych powierzchni - krzeseł, ławek itp. (nie jest odpowiedni do użytku na miękkich wyściełanych kanapach lub fotelach). Nie trzeba jej mocować do siedzenia – jej spodnia część wykonana jest z antypoślizgowego materiału, utrzymującego poduszkę w miejscu i zapobiegającego jej przesuwaniu.

Przechowywanie

Długotrwałe narażanie pianki bez poszewki na działanie promieni słonecznych może powodować odbarwienia i zażółcenia. Nie wpływa to jednak na funkcjonalność klina.

Nasze poszewki

Nasze produkty zostały stworzone z wysokiej jakości materiałów. Aby jak najdłużej zachować ich właściwości, należy z nimi postępować w odpowiedni sposób.

Zalecamy delikatne zdejmowanie poszewki, bez użycia siły oraz przytrzymywanie całej poduszki, a nie tylko jednego z jej końców podczas wymiany poszewek.

Pranie poszewki

Poszewkę można prać w pralce w temp. 40°C. Może być prana w pralce oraz czyszczona chemicznie za pomocą dowolnego rozpuszczalnika. Poszewka może być prasowana w wysokiej temperaturze.

Czyszczenie poduszki

Powierzchnię pianki można czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki. Wkład (zarówno z pianki poliuretanowej, jak i wkładka z pianki visco-elastic) może być też prany ręcznie z dodatkiem łagodnych środków piorących. Po praniu należy delikatnie wycisnąć nadmiar wody ręcznie (nie wykręcać!). Suszenie - należy umieścić wkład na ręczniku w ciepłym miejscu, lecz nie bezpośrednio przy grzejniku czy innym źródle ciepła lub w miejscu mocno nasłonecznionym! Poduszka potrzebuje niekiedy kilku dni do całkowitego wyschnięcia. Delikatne odbarwienia powstałe podczas prania nie mają wpływu na właściwości ortopedyczne poduszki.

WWW.SISSEL.COM.PL