

The logo for ONECONCEPT is displayed in a white, rounded rectangular frame. The word "ONE" is in a bold, sans-serif font, followed by a stylized "C" that is a circle with a horizontal line through its center. The word "NCEPT" follows in the same bold, sans-serif font.

ONECONCEPT

Arielle Deluxe

Siedzisko
prysznicowe

10034210

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję i zastosuj się do poniższych wskazówek, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Wszelkie awarie będące wynikiem zignorowania instrukcji i ostrzeżeń podanych w podręczniku użytkownika nie są objęte naszą gwarancją i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

Instrukcje bezpieczeństwa 2
Załącznik/Dodatek Arielle Deluxe 2

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.


INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed instalacją należy uważnie przeczytać instrukcję.
- Jeżeli dostarczone śruby i kołki nie nadają się do montażu, należy użyć odpowiednie śruby i kołki.

Uwaga: Maksymalna waga użytkownika wynosi 130 kg.


ZAŁĄCZNIK/DODATKOWNIK ARIELLE DELUXE



Wymiary

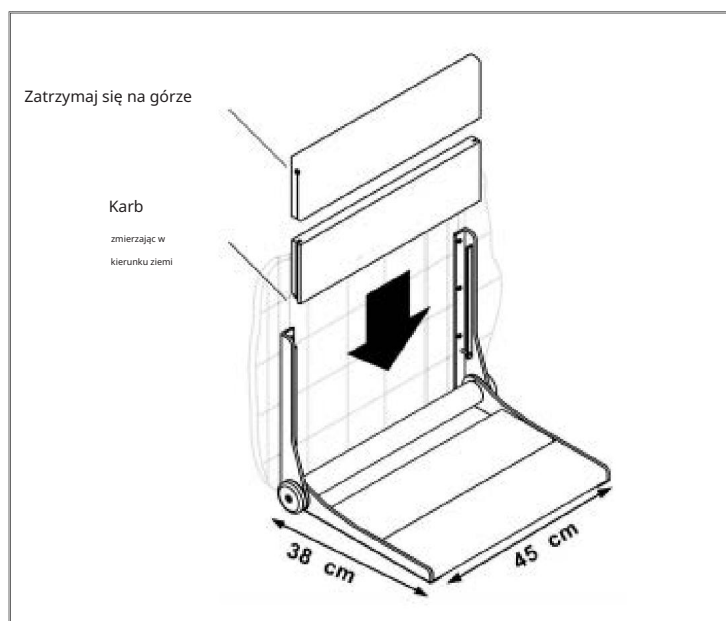

INSTALACJA


Uwaga: Połóż koc w miejscu, w którym będziesz instalować siedzisko, aby zabezpieczyć powierzchnię prysznica lub wanny przed częściami, które mogą spaść podczas montażu.

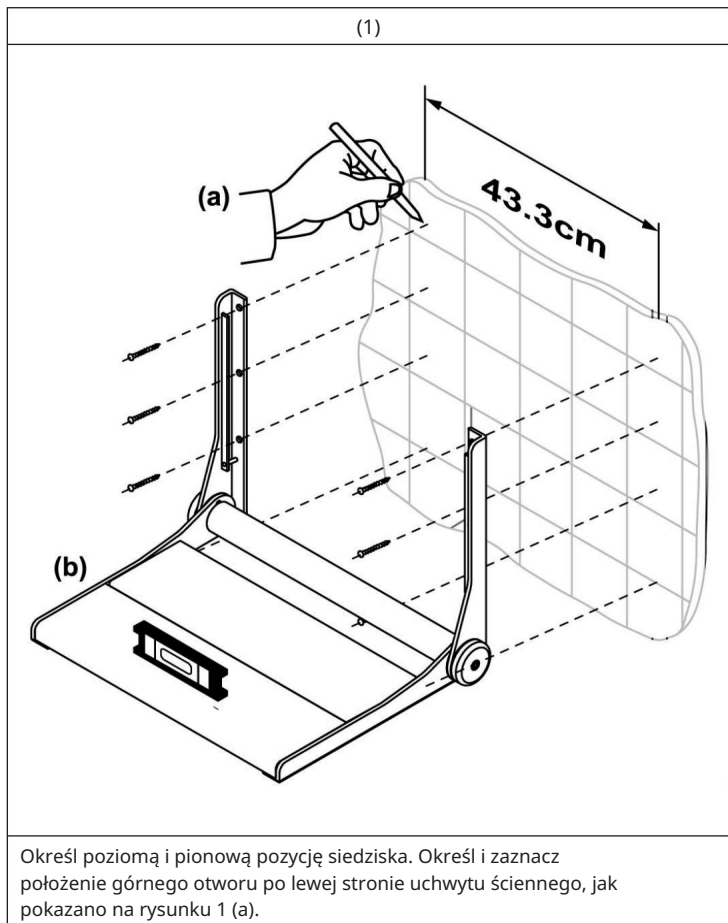

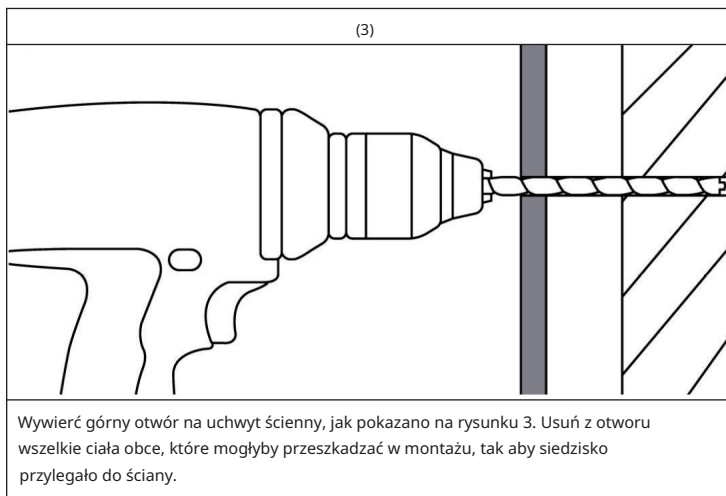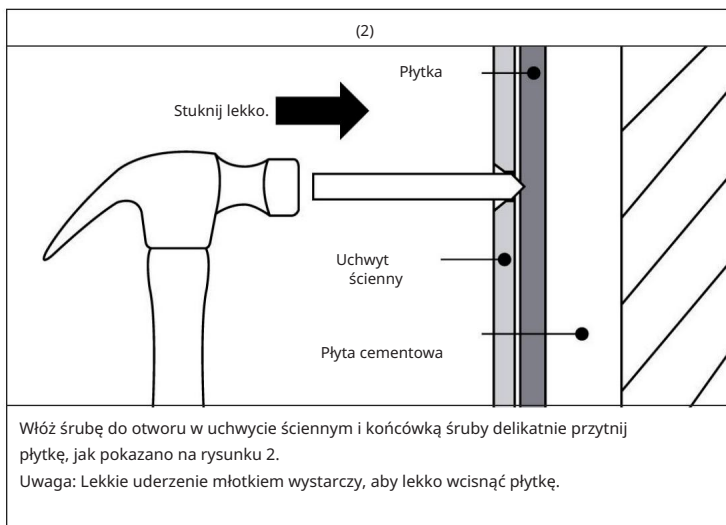

(4)

Zabezpiecz uchwyt ścienny odpowiednimi elementami mocującymi. Należy upewnić się, że śruba jest włożona tak prosto, jak to możliwe, tak aby jej płaska główka znajdowała się w miejscu łączenia, jak pokazano na rysunku 4. Jeśli śruba wystaje na zewnątrz, może to utrudniać demontaż paneli oparcia.

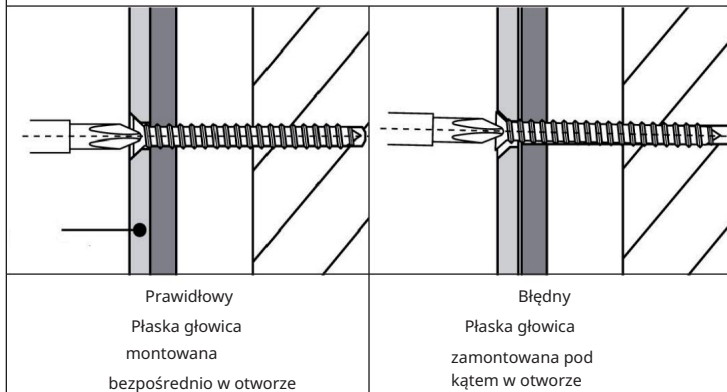

(5) Po zamontowaniu za pomocą poziomicy pokazanej na rysunku 1 (b),

Upewnij się, że siedzenie jest ustawione w prawidłowej, prostej pozycji. Następnie określ lokalizację górny otwór po prawej stronie uchwytu ściennego.

Ważne: Należy upewnić się, że odległość między uchwytami ściennymi umożliwia swobodne przesuwanie paneli oparcia.

(6) Najpierw powtórz kroki od 2 do 4 dla górnego otworu po prawej stronie uchwyt ścienny i upewnij się, że jest wypoziomowany.

(7) Powtórz kroki od 2 do 4 dla pozostałych otworów.

Uwaga: Wykonaj ostateczną kontrolę i sprawdź wszystkie elementy mocujące. Sprawdź poprawność montażu, naciskając na siedzenie lub siadając na nim.

(8) Po zamontowaniu wszystkich śrub należy nasunąć deski oparcia na oparcie. montaż na ścianie. Upewnij się, że są prawidłowo osadzone.

