

QUANTUM

Nagłośnienie Bang & Olufsen

Instrukcja
obsługi fotela
masującego
**BODYFRIEND
QUANTUM**



※ Ilustracje produktów lub ich opisy mogą ulec zmianie ze względu na wprowadzenie ulepszeń bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Ilustracje są poglądowe i służą lepszemu zapoznaniu się z urządzeniem. Mogą różnić się od rzeczywistego urządzenia.
※ Zdjęcia produktu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego fotela do masażu w zależności od wybranego modelu produktu.



BODYFRIEND

Wstęp

Serdecznie dziękujemy za zakup fotela masującego BODYFRIEND [QUANTUM].

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi w celu zapewnienia bezpiecznego i wygodnego użytkowania. Co więcej, niniejszy produkt może ulec zmianie w związku z wprowadzanymi ulepszeniami bez uprzedniego powiadomienia. W takim przypadku opisy i obrazy zawartości produktu mogą różnić się od opisów i obrazów zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

※ Aby prawidłowo korzystać z urządzenia, należy najpierw zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa.

※ Niniejszą instrukcję należy przechowywać w miejscu, w którym będzie dostępna do przeczytania w dowolnym momencie.

※ Obrazy produktów lub ich opisy mogą ulec zmianie ze względu na wprowadzenie ulepszeń bez wcześniejszego powiadomienia.

Cechy urządzenia



Niezależne masażery nóg



XD PRO



Health Care



Daily Care



Nagłośnienie
Bang & Olufsen




Podgrzewane głowice
masujące



Ogrzewanie łydek
i stóp



Rozciąganie PNF

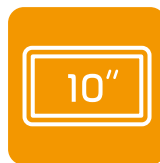

10-calowy tablet
sterujący



Panel podręczny



Blackout Protection
Button



15 czujników
bezpieczeństwa



Automatyczne
połączenie
Bluetooth



Skóra naturalna



Ładowanie
beprzewodowe

XD PRO

Moduły XD PRO analizują i rozmasowują każdą część ciała w 80 krokach, aby zapewnić dokładniejszy i bardziej spersonalizowany masaż.

Niezależne masażery nóg

Masażery lewej i prawej nogi poruszają się niezależnie.

Zwiększone bezpieczeństwo

W module masującym nóg oraz w oparciu fotela znajduje się 15 czujników wykrywających niepożądane obiekty, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników.

Spis treści

	Cechy fotela	02
	Istotne zasady dotyczące bezpieczeństwa	04
Przed użyciem	Komponenty i opisy	14
	Ustawienie i montaż	15
	Sposób podłączenia fotela Czujniki bezpieczeństwa	16
Tablet i panel podręczny fotela	Opis przycisków panelu podręcznego	17
	Działanie tabletu i opisy programów	18
Opisy poszczególnych funkcji	Moduł XD PRO	31
Specyfikacja techniczna urządzenia	Wymiary i specyfikacja urządzenia	32
Wykrywanie i rozwiązywanie problemów	Rozwiązywanie problemów Usługi serwisowe	33
Gwarancja	Ogólne warunki gwarancji	34

Istotne zasady dotyczące bezpieczeństwa

- ※ Poniższe opisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa podczas korzystania z fotela, aby zapobiec nieoczekiwanemu ryzyku lub uszkodzeniom. Należy postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.
- ※ Środki ostrożności zostały podzielone na dwie kategorie w zależności od spodziewanego ryzyka i uszkodzeń oraz pilności w przypadku nieprawidłowego użycia:



Ostrzeżenie

Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.



Uwaga

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała.

Środki ostrożności przed użyciem



Ostrzeżenie


Nie ustawiaj ani nie używaj fotela masującego w łazience ani w miejscach o wysokim poziomie wilgotności.

Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru, odkształcenia urządzenia, rozwoju pleśni i/lub nieprawidłowego działania.




Unikaj korzystania z fotela masującego w miejscach zakurzonych lub podatnych na korozję.

Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru, odkształcenia urządzenia, rozwoju pleśni i/lub nieprawidłowego działania.

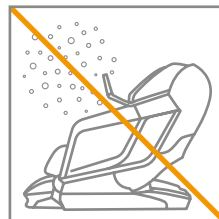


Nie korzystaj z fotela masującego w miejscach o temperaturze przekraczającej 40°C.

Może to doprowadzić do pożaru i/lub nieprawidłowego działania.

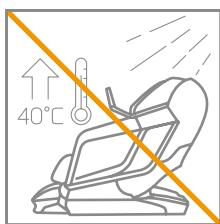


Nie montuj fotela masującego na świeżym powietrzu.

Może to doprowadzić do wypadku, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia i/lub nieprawidłowego działania.

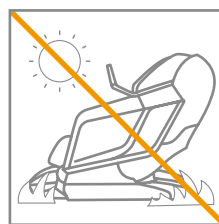


Nie korzystaj z fotela masującego w pobliżu grzejników lub innych urządzeń emitujących ciepło.

Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, nieprawidłowego działania i/lub pożaru.

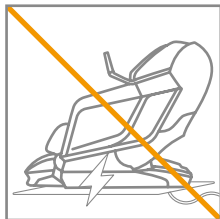

Fotel masujący należy montować i eksploatować wyłącznie po prawidłowym uziemieniu i na płaskich powierzchniach.

W innym przypadku może dojść do wypadku, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia i/lub nieprawidłowego działania.

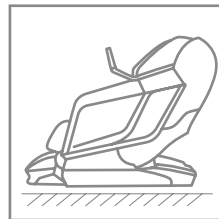

Istotne zasady dotyczące bezpieczeństwa


Środki ostrożności przed użyciem



Ostrzeżenie


Używaj fotela masującego w miejscach o wystarczającej powierzchni i odpowiedniej cyrkulacji powietrza.

W innym przypadku może dojść do odkształcenia, powstania pleśni i/lub nieprawidłowego działania.

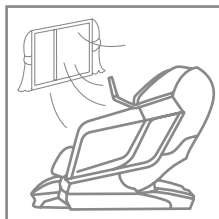


Nie korzystaj z fotela masującego po samowolnym demontażu jego części.

Może to doprowadzić do wypadku, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia i/lub nieprawidłowego działania.

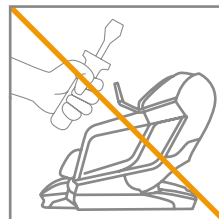


Nie używaj fotela masującego jednocześnie z innymi urządzeniami elektronicznymi lub sprzętem medycznym.

Może to doprowadzić do wypadku, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia i/lub nieprawidłowego działania.

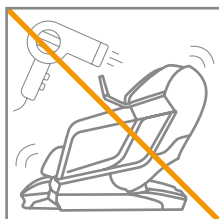


Nie rozlewaj na fotel masujący żadnych substancji, płynów do tego nieprzeznaczonych.

Może to spowodować odkształcenie lub uszkodzenie urządzenia, wypadki związane z bezpieczeństwem lub obrażenia ciała.

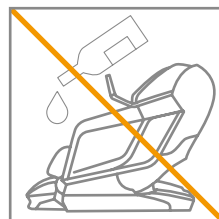


Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na fotelu masującym.

Może to doprowadzić do wypadku, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia i/lub nieprawidłowego działania.

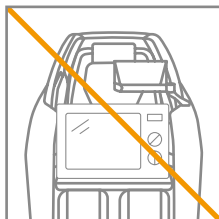

Zachowaj środki ostrożności i upewnij się, że małe dzieci lub zwierzęta domowe nie wczołgają się pod korpus fotela, podnózek itp.


Może to doprowadzić do wypadku, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia i/lub nieprawidłowego działania.

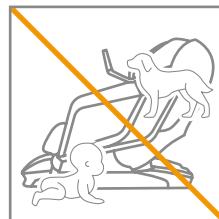

Uwaga


Nie przeprowadzaj montażu ani naprawy fotela masującego bez pomocy serwisanta.

Może to doprowadzić do wypadku, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia i/lub nieprawidłowego działania.

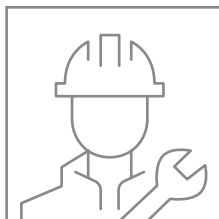

Nie korzystaj z urządzenia w sposób inny niż przedstawiony w niniejszej instrukcji.

Może to doprowadzić do wypadku, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia i/lub nieprawidłowego działania.

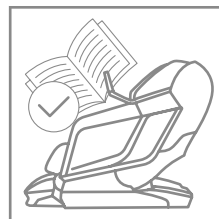

Istotne zasady dotyczące bezpieczeństwa


Środki ostrożności przed użyciem



Ostrzeżenie


Nie przesuwaj fotela masującego za przewód zasilający czy ani nie ciągnij za niego.

Może to grozić porażeniem prądem elektrycznym, pożarem lub nieprawidłowym działaniem.

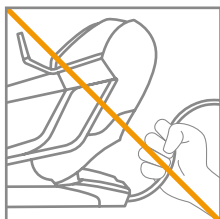


Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, podłączaj fotel masujący wyłącznie do uziemionego gniazdka elektrycznego.

W innym przypadku może to grozić porażeniem prądem elektrycznym lub obrażeniami ciała.

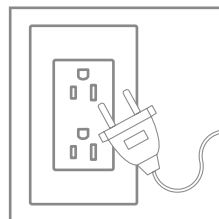


Przed użyciem sprawdź, czy fotel masujący jest podłączony do zasilania.

Pozwala to na prawidłowe korzystanie z urządzenia.

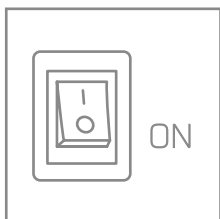


Fotel masujący należy podłączać wyłącznie do gniazda zasilania 220V.

W innym przypadku może dojść do awarii lub porażenia prądem z powodu zwarcia.

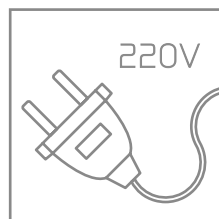


Nie instaluj fotela masującego w miejscach, w których trudno jest go odłączyć.

Może to grozić wypadkiem, obrażeniami ciała, uszkodzeniem urządzenia lub jego nieprawidłowym działaniem.

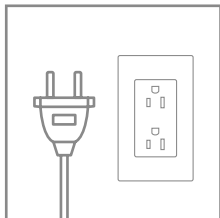


Podczas odłączania przewodu zasilającego nie ciągnij za kabel. Aby bezpiecznie odłączyć wtyczkę, należy ją chwycić i wyciągnąć.

W innym przypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub awarii.

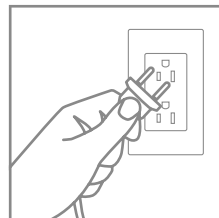


Z fotela do masażu należy korzystać po sprawdzeniu czujników bezpieczeństwa oraz upewnieniu się czy w pobliżu nie znajdują się dzieci lub zwierzęta.

W przeciwnym razie może dojść do wypadków, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia lub jego nieprawidłowego działania.

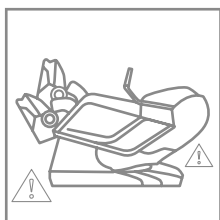

Zachowaj ostrożność podczas noszenia ciemnych ubrań, np. dżinsów, ponieważ istnieje możliwość zabarwienia powierzchni fotela masującego.

Może to prowadzić do powstawania plam.

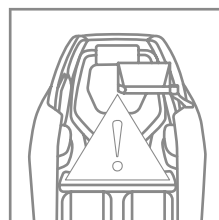


Istotne zasady dotyczące bezpieczeństwa

Środki ostrożności przed użyciem

Ostrzeżenie


Zapoznaj się z instrukcją obsługi i przeanalizuj ewentualne niepożądane skutki korzystania z fotela masującego.

Pozwoli to na bezpieczne korzystanie z urządzenia.

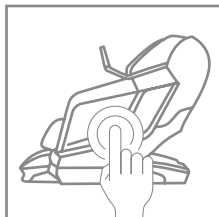

Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodu zasilającego mokrymi dłońmi.

Może to doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i nieprawidłowego działania.

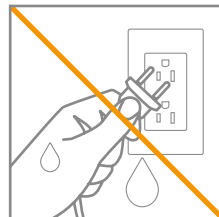


Nie używaj fotela masującego, gdy masz mokre ciało.

Może to doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i nieprawidłowego działania.




Nie korzystaj z urządzenia bezpośrednio po jedzeniu.

Może to powodować dyskomfort lub obrażenia.

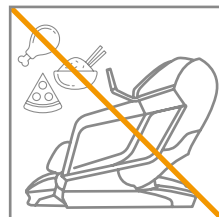


Upewnij się, że żadne części ciała nie dostaną się w szczeliny fotela masującego.

Może to doprowadzić do wypadku, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia i/lub nieprawidłowego działania.

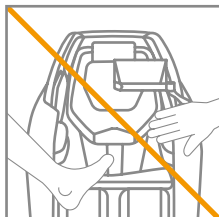


Zachowaj ostrożność, ponieważ intensywne stosowanie masażu na niektórych częściach ciała może doprowadzić do ich nadwyżężenia.

Może to doprowadzić do wypadku, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia i nieprawidłowego działania.

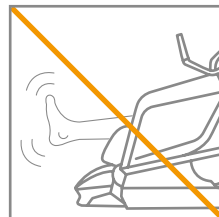


Gdy urządzenie nie jest używane, wyjmij wtyczkę z gniazdka.

W innym przypadku może to doprowadzić do nieprawidłowego działania lub porażenia prądem na skutek zwarcia.

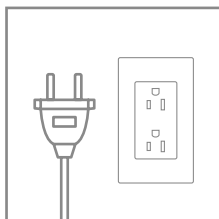


Niemowlęta i dzieci nie powinny korzystać z fotela masującego.

Może to doprowadzić do wypadku, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia i/lub nieprawidłowego działania.

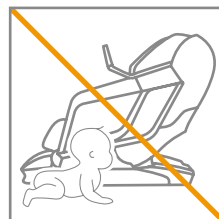


Korzystaj z fotela masującego zgodnie z jego przeznaczeniem i na przewidzianych obszarach ciała, tzn. nie na głowie, łokciach, kolanach, klatce piersiowej lub brzuchu.

Może to grozić wypadkiem, uszkodzeniem ciała, uszkodzeniem urządzenia i/lub nieprawidłowym działaniem.

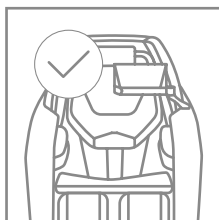

Po uruchomieniu fotela masującego pozwól ramionom masującym ustawić się we właściwej pozycji.

W innym przypadku może to doprowadzić do wypadku, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia i/lub nieprawidłowego działania.

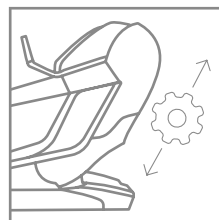


Istotne zasady dotyczące bezpieczeństwa

Środki ostrożności przed użyciem

Ostrzeżenie


Po zakończeniu masażu zaczekaj, aż fotel masujący powróci do pierwotnej pozycji.

W przeciwnym razie może dojść do wypadku, uszkodzenia urządzenia lub jego nieprawidłowego działania.

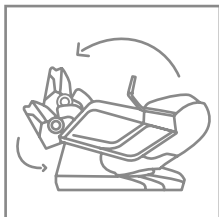

W przypadku wystąpienia bólu lub dyskomfortu natychmiast przerwij korzystanie z fotela masującego i zastosuj odpowiednie środki zaradcze.

W innym przypadku może dojść do urazu.

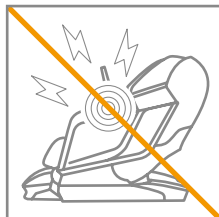


Długotrwałe korzystanie z fotela masującego może nadwyrężyć organizm, dlatego należy korzystać z niego uwzględniając stan zdrowia użytkownika.

W innym przypadku może dojść do urazu.



Uważaj, aby małe dzieci lub zwierzęta domowe nie bawiły się fotelem masującym podczas jego pracy.

Może to doprowadzić do wypadku, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia i/lub nieprawidłowego działania.

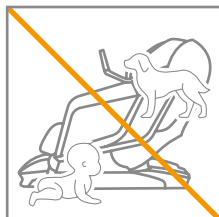


Nie używaj fotela masującego w miejscach, w których używane są produkty w aerozolu lub gdzie podawany jest tlen.

Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, pożaru, wybuchu lub nieprawidłowego działania.




Zdejmij biżuterię i akcesoria przed masażem w fotelu masującym.

W innym przypadku może dojść do wypadku, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia i/lub nieprawidłowego działania.

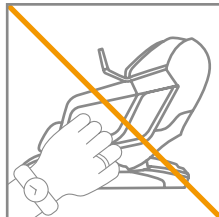


Upewnij się, że Twoje włosy nie zostaną przytrzaśnięte podczas użytkowania fotela masującego.

Może to doprowadzić do wypadku i obrażeń ciała.

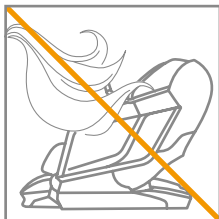


Uważaj, aby nie upuścić, ani nie włożyć żadnych przedmiotów w szczeliny fotela masującego.

Może to doprowadzić do wypadku, obrażeń, uszkodzeń urządzenia i/lub pożaru.

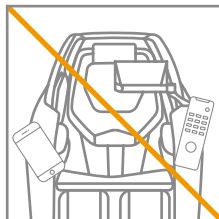


Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, nie działają prawidłowo lub zostały zanurzone w wodzie, nie wolno ich używać. Skontaktuj się z centrum serwisowym w celu kontroli i naprawy.

W innym przypadku może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, nieprawidłowego działania lub pożaru.

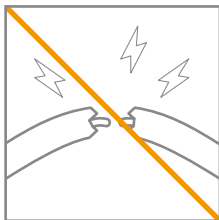

Pamiętaj o ryzyku poparzenia skóry podczas korzystania z funkcji ogrzewania w fotelu masującym.

Może ono spowodować oparzenia niskotemperaturowe.

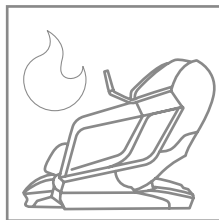

Istotne zasady dotyczące bezpieczeństwa


Środki ostrożności przed użyciem



Ostrzeżenie


Na fotelu do masażu należy siedzieć w odpowiedniej pozycji.

W przeciwnym razie może dojść do wypadku, uszkodzenia mienia, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia lub jego nieprawidłowego działania.

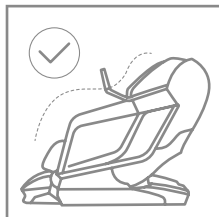

Nie korzystaj z fotela masującego, gdy pokrycie jest podarte lub zdjęte.


Może to prowadzić do wypadków, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia lub jego nieprawidłowego działania.

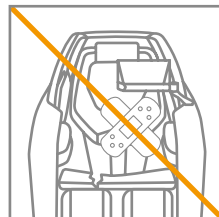

Uwaga


Z fotela masującego może korzystać tylko jedna osoba na raz.

W przeciwnym razie może dojść do wypadku, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia lub jego nieprawidłowego działania.

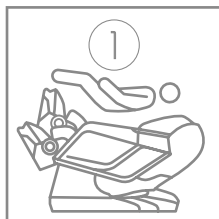


Unikaj korzystania z fotela do masażu przy znacznych zmianach temperatury.

Może to spowodować obrażenia lub uszkodzenia sprzętu.

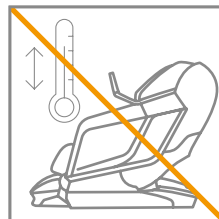


Nie wywieraj na fotel masujący nacisku przekraczającego 150 kg.

Może to być przyczyną wypadków, odkształceń, hałasu, zużycia skóry lub nieprawidłowego działania urządzenia.

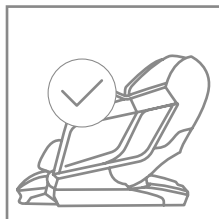

Osoby niższe niż 150 cm lub wyższe niż 190 cm mogą mieć inne doznania podczas masażu.

Może to być powodowane przez brak odpowiedniego nacisku między jednostkami masującymi a częściami ciała, a w efekcie powodować ból lub obrażenia ciała.

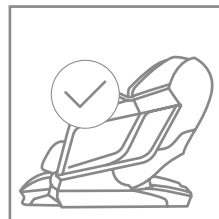


Nie stawaj na fotelu masującym. Należy z niego korzystać w pozycji siedzącej.

W przeciwnym razie może dojść do wypadku, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia lub jego nieprawidłowego działania.



Uważaj na hipotermię w przypadku zaśnięcia podczas użytkowania fotela masującego.

Może to grozić wypadkiem, obrażeniami ciała itp.

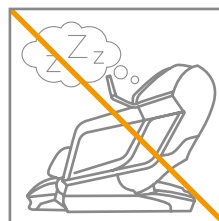

Istotne zasady dotyczące bezpieczeństwa


Środki ostrożności przed użyciem



Ostrzeżenie


Upewnij się, że przewód nie jest uszkodzony lub zbyt mocno zgięty.

Może to grozić porażeniem prądem elektrycznym, pożarem lub awarią.

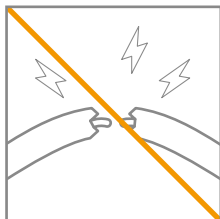


W celu bezpiecznego użytkowania fotela masującego rozpocznij od niższej intensywności masażu.

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ciała.

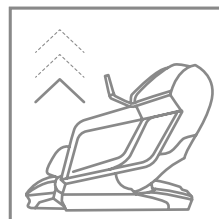


Nie chwytaj podnóżka rękoma.

Może to grozić wypadkiem, obrażeniami ciała, uszkodzeniem urządzenia lub jego nieprawidłowym działaniem.

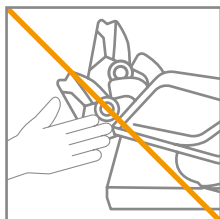


Nie opieraj się o fotel do masażu ani nie zawieszaj się na jego oparciu.

Może to grozić wypadkiem, uszkodzeniem ciała, uszkodzeniem urządzenia lub jego nieprawidłowym działaniem.

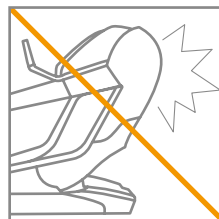


Nie dopuść, aby zwierzęta domowe gryzły przewód zasilający.

Może to doprowadzić do porażenia prądem, uszkodzenia urządzenia lub jego nieprawidłowego działania.

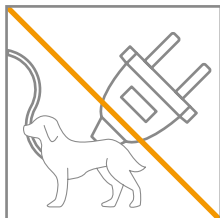


Nie stawaj na podnóżku, gdy fotel do masażu się rozkłada.

Może to doprowadzić do wypadku, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia lub jego nieprawidłowego działania.

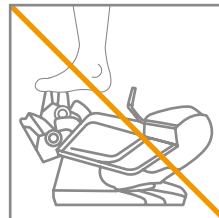


Przed podłączeniem zasilania upewnij się, że fotel masujący jest wyłączony.

W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia urządzenia lub jego nieprawidłowego działania.

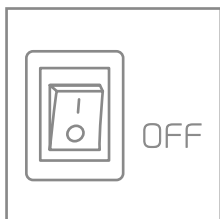

Nie siadaj na oparciu fotela do masażu, podłokietnikach oraz podnóżku.

Może to doprowadzić do wypadku, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia lub jego nieprawidłowego działania.

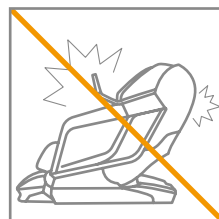

Istotne zasady dotyczące bezpieczeństwa


Środki ostrożności przed użyciem



Ostrzeżenie

Nie korzystaj z funkcji odtwarzania muzyki przez Bluetooth zbyt głośno i zbyt długo.

Może to spowodować uszkodzenie słuchu.

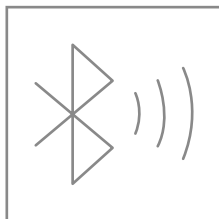


Nie wstawaj z fotela masującego, trzymając tablet w ręku.

Może to doprowadzić do wypadków związanych z bezpieczeństwem, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia lub jego nieprawidłowego działania.




Nie myj fotela masującego wodą.

Może to grozić porażeniem prądem elektrycznym, pożarem lub nieprawidłowym działaniem.

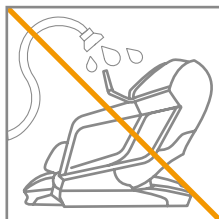


Przed czyszczeniem lub konserwacją fotela do masażu odłącz go od zasilania.

W przeciwnym razie może dojść do wypadków związanych z bezpieczeństwem, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia lub jego nieprawidłowego działania.

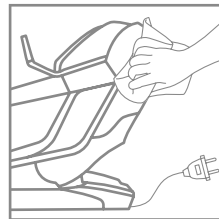


Zabrudzenia usuwaj delikatnie przy pomocy miękkiej ściereczki i nie używaj rozpuszczalników organicznych, w tym rozcieńczalników lub chemikaliów.

Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

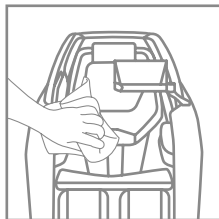


Do czyszczenia obić ze skóry naturalnej należy używać specjalnego środka do czyszczenia skóry.

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.

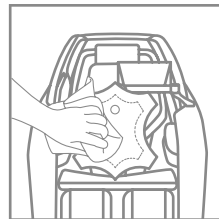

Podczas ładowania przez port USB używaj kabla ekranowego.

W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub nieprawidłowego działania.

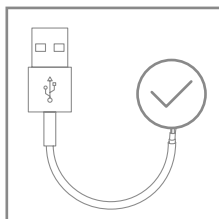

※ Kabel ekranowany oznacza zabezpieczony przewód pokryty folią aluminiową, miedzianą lub stalową siatką w celu zmniejszenia zakłóceń.

Istotne zasady dotyczące bezpieczeństwa

Instrukcje przed użyciem

Środki ostrożności

• Kto nie może korzystać

- Osoby, u których lekarz stwierdził zakrzepicę, zatorowość lub poważne żylaki.
- Kobiety w pierwszym trymestrze i na początku trzeciego trymestru ciąży.
- Osoby cierpiące na ciężkie choroby serca, nerek lub wątroby.
- Osoby cierpiące na schizofrenię lub inne choroby psychiczne.
- Osoby, u których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia napadu drgawkowego, udaru mózgu lub jakichkolwiek chorób lub zaburzeń sensorycznych.
- Osoby, które mają trudności z samodzielnym poruszaniem się.

• Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli użytkownik:

- jest w pierwszym trymestrze ciąży lub istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków ubocznych po użyciu urządzenia,
- wykazuje objawy stanu zapalnego i doświadcza podwyższonej temperatury ciała (gorączki),
- cierpi na choroby skóry lub jakiegokolwiek choroby związane ze skórą, w tym odleżyny lub oparzenia,
- cierpi na nowotwory złośliwe,
- jest w podeszłym wieku, cierpi na ekstremalną utratę wagi lub utratę tkanki mięśniowej z powodu innych chorób,
- musi pozostać w łóżku z powodu leczenia,
- cierpi na skręcenie kręgosłupa szyjnego, przepuklinę dysku szyjnego lub jakąkolwiek formę ostrego urazu kręgosłupa szyjnego,
- cierpi na poważną osteoporozę,
- korzysta z rozrusznika serca lub innego wszczepialnego urządzenia medycznego,
- doświadcza trudności z porozumiewaniem się lub poruszaniem poszczególnymi częściami ciała,
- ma jakiegokolwiek inne problemy zdrowotne,
- odczuwa dyskomfort w okolicach stawu z powodu operacji stawu biodrowego lub kolanowego (sztuczny staw, złamanie itp.).

Środki ostrożności związane z funkcją ogrzewania

- Podrażnienie skóry, w tym oparzenie niskotemperaturowe, może wystąpić w przypadku wielokrotnego używania urządzenia bez przerwy.
- Nie należy dopuszczać do bezpośredniego kontaktu nagrzewających się elementów urządzenia ze skórą.
- Podczas korzystania z urządzenia należy nadzorować małe dzieci, osoby starsze i pacjentów medycznych ze względu na wrażliwą skórę.
- Nie wolno zasypiać z włączoną funkcją ogrzewania.

Potencjalne skutki uboczne

• Należy pamiętać o następujących skutkach ubocznych, które mogą wystąpić podczas użytkowania:

- niewielkie siniaki, otarcia, zdrapania itp.,
- bolesność, zmęczenie mięśni i dyskomfort (w przypadku nadmiernego użytkowania),
- reakcje alergiczne lub oparzenia,
- złamania i skręcenia kręgosłupa u seniorów.

Istotne zasady dotyczące bezpieczeństwa

Środki ostrożności dotyczące ładowania bezprzewodowego


- **Położ urządzenie mobilne z funkcją ładowania bezprzewodowego na podkładce ładującej, która znajduje się w prawym podłokietniku fotela masującego.**
Nieprawidłowe umieszczenie urządzenia może skutkować powolnym ładowaniem lub jego brakiem.
 - Używanie osłon wykonanych z grubych materiałów na urządzeniu mobilnym może uniemożliwić normalne ładowanie. Zdejmij je z urządzenia przed ładowaniem.
 - Wydajność i prędkość ładowania mogą się różnić w zależności od stanu produktu, temperatury otoczenia i środowiska.
 - Ładowanie bezprzewodowe nie jest dostępne po podłączeniu urządzenia mobilnego do kabla ładowarki podczas ładowania przewodowego.
- **Nie umieszczaj karty kredytowej, karty płatniczej, karty do zamka drzwi itp. między urządzeniem mobilnym a jego obudową.**
 - Produkty wykorzystujące magnetyzm mogą utracić swoje dane z powodu magnetyzmu fotela masującego.
- **Podczas ładowania nie umieszczaj żadnych metali na urządzeniu, w tym monet, kluczy lub naszyjników.**
 - Może to spowodować deformację produktu lub jego nieprawidłowe działanie.
 - Kontakt metali z ładowarką może spowodować pożar.
- **Zaprzestań używania aplikacji lub urządzenia, jeśli produkt nagrzeje się do bardzo wysokiej temperatury.**
 - Długotrwały kontakt z rozgrzanym produktem może spowodować oparzenia niskotemperaturowe z występowaniem czerwonych wysypek, przebarwień pigmentu itp.

Komponenty i opisy

Rozpakowanie

Urządzenie jest zapakowane w trzy kartony. Upewnij się, że wszystkie niezbędne elementy zostały dostarczone.

- **Karton główny:** korpus, pokrowiec oparcia/siedziska, zagłówek, moduł masażera ramion, pudełko z akcesoriami (kabel zasilający i instrukcja obsługi), tablet.
- **Moduł masażu przedramion**
- **Podnóżek**

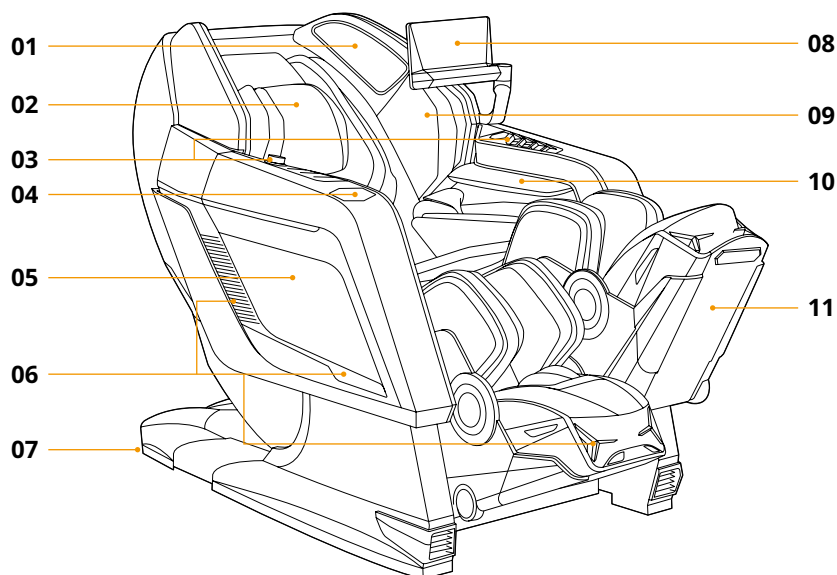

Elementy zewnętrzne

- 01 Głośnik
- 02 Poduszka zagłówek
- 03 Panel podręczny (lewy, prawy)
- 04 Ładowarka indukcyjna
- 05 Bok fotela
- 06 Światła LED
- 07 Kółka do przesuwania
- 08 Tablet
- 09 Moduł masażu ramion
- 10 Moduł masażu przedramion
- 11 Masażer nóg (podnóżek)


Ustawienie i montaż

Sposób przesuwania i sprawdzenie miejsca na nogi

- Przed instalacją sprawdź, czy masz wystarczająco dużo miejsca na montaż fotela masującego.
- Usuń wszystkie przeszkody i inne przedmioty znajdujące się wokół fotela masującego.
- Przechyl fotel masujący do tyłu pod kątem umożliwiającym łatwe przesuwanie. Po dotarciu do żądanej lokalizacji ustaw fotel, powoli przechylając go do przodu.
- Podczas montażu usuń wszelkie kable znajdujące się pod fotelem masującym.

※ Ciężar urządzenia może spowodować uszkodzenie lub odbarwienie podłogi.


※ Aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia urządzenia, zalecamy przenoszenie go przez co najmniej dwie osoby.

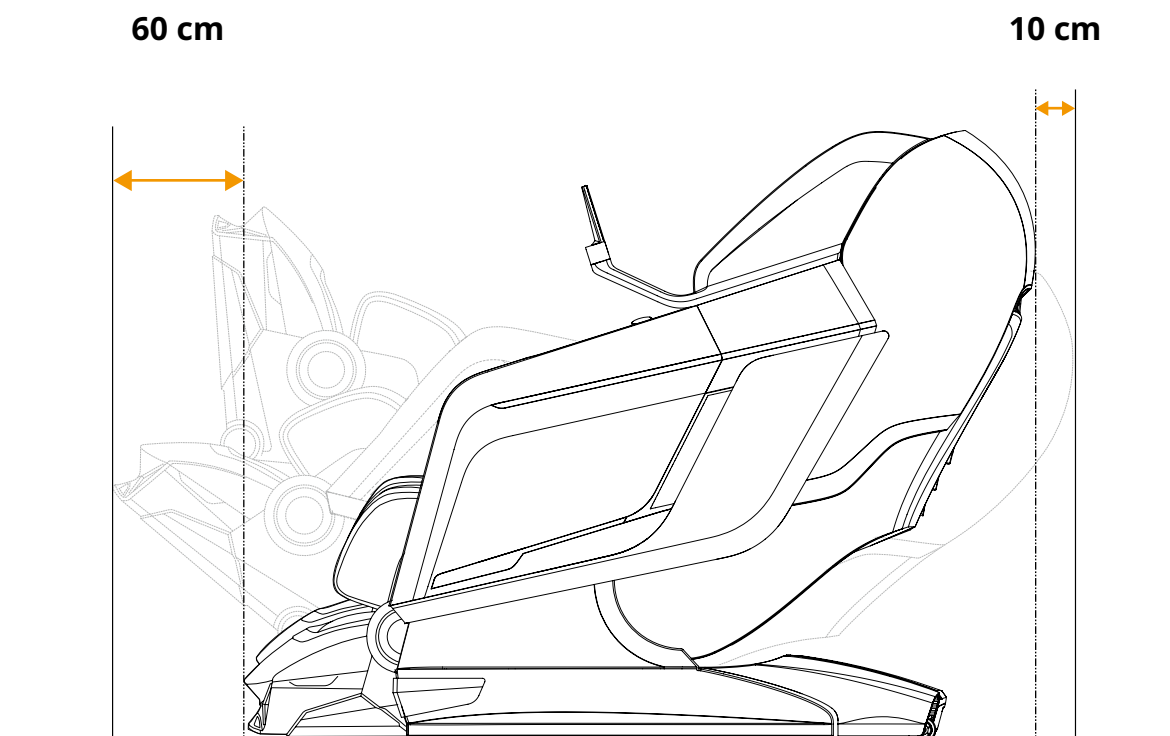

Sposób podłączenia fotela / Czujniki bezpieczeństwa


Podłączanie do źródła zasilania.

Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się w tylnej, dolnej części obudowy fotela masującego. Po podłączeniu włącz zasilanie fotela. Jednocześnie włączy się tablet sterujący, a aplikacja uruchomi się automatycznie.

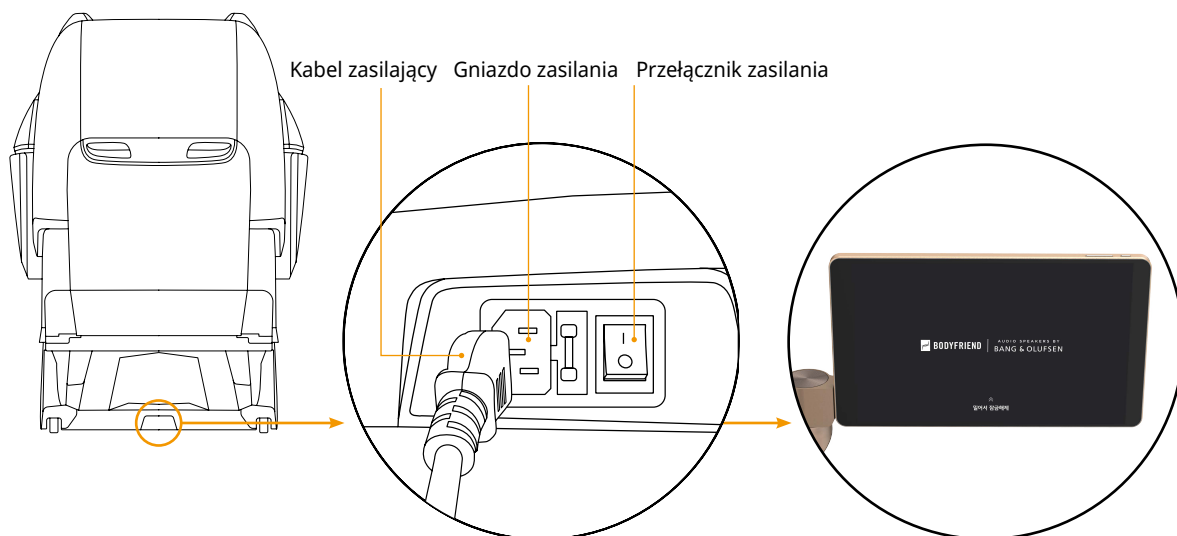


Lokalizacja czujników bezpieczeństwa

Czujniki wykrywania niepożądanych obiektów znajdują się łącznie w 15 miejscach na nogach i oparciu fotela masującego.

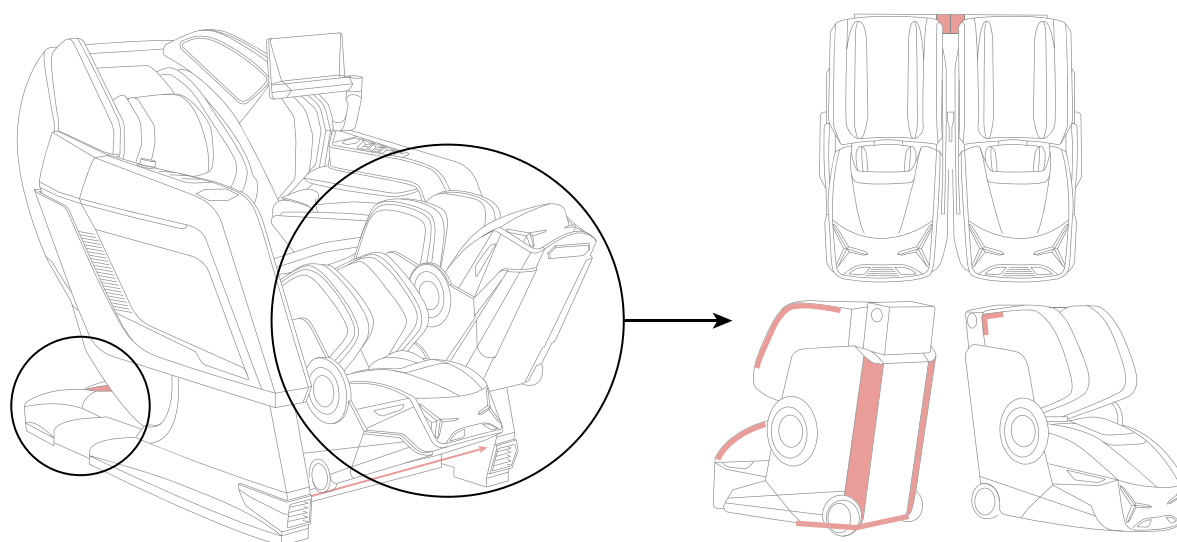

Opis przycisków panelu podręcznego

Panel podręczny (prawy)

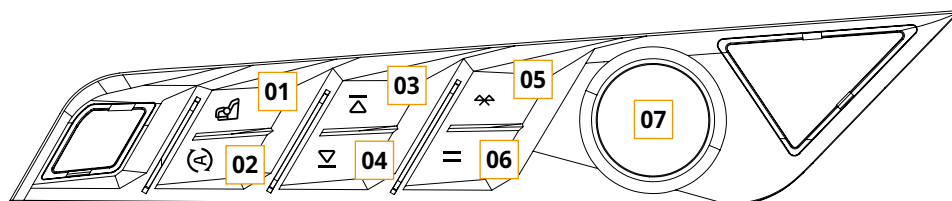

01 ROVO Care: Sekwencyjne naciskanie przycisku zmienia programy masażu w trybie ROVO Care.

02 Tryb automatyczny: Sekwencyjne naciskanie przycisku zmienia programy masażu w trybie Daily Care.

03 Przejście do następnego utworu: Podczas odtwarzania muzyki przez Bluetooth naciśnięcie przycisku spowoduje odtworzenie następnego utworu.

04 Przejście do poprzedniego utworu: Podczas odtwarzania muzyki przez Bluetooth naciśnięcie przycisku spowoduje odtworzenie poprzedniego utworu.


05 Bluetooth: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia sparowanie lub anulowanie parowania Bluetooth z Twoim urządzeniem.

※ Wskaźnik LED stanu połączenia: Przed połączeniem - jednostajne białe światło bez mrugania / Łączenie - migające niebieskie światło / Połączono - jednostajne niebieskie światło bez mrugania

06 Odtwarzanie/Pauza: Naciśnięcie przycisku podczas odtwarzania Bluetooth lub strumieniowego spowoduje odtworzenie lub wstrzymanie dźwięku.

07 Regulacja głośności (pokrętło): Obracanie pokrętła reguluje głośność, a jego naciśnięcie powoduje wyciszenie dźwięku.

Panel podręczny (lewy)

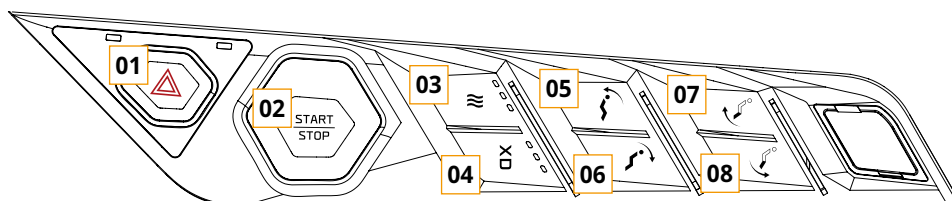

01 Blackout Protection Button: Resetuje fotel masujący do pierwotnej pozycji w przypadku awarii zasilania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przywrócić fotel do pierwotnej pozycji. Używaj przy otwartej pokrywie.

※ Podczas procesu przywracania zasilania czujnik wykrywania niepożądanych obiektów nie działa ze względu na funkcję ochrony przed awarią zasilania. Należy zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec zbliżeniu się małych dzieci lub zwierząt domowych do fotela masującego.

02 START / STOP: Długie naciśnięcie przycisku włącza i wyłącza zasilanie. Podczas masażu przycisk umożliwia wstrzymanie i wznowienie masażu. Używaj przy otwartej pokrywie.

03 Ogrzewanie: Sekwencyjne naciskanie przycisku zmienia ogólną intensywność ogrzewania [poziom 3 > poziom 2 > poziom 1].

04 Intensywność XD: Sekwencyjne naciskanie przycisku zmienia intensywność masażu XD [od poziomu 1 do 5].

05 Opuszczanie oparcia: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje zmianę ułożenia fotela masującego.

06 Podnoszenie oparcia: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje zmianę ułożenia fotela masującego.

07 Opuszczanie podnóżka: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje obniżenie podnóżka.

08 Podnoszenie podnóżka: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje podniesienie podnóżka.



Działanie tabletu i opisy programów

Tworzenie nowego profilu użytkownika

[Przycisk zasilania] > Utwórz konto klikając CREATE AN ACCOUNT > Wprowadź informacje o użytkowniku > Zarejestruj klikając REGISTRATION




※ Podczas tworzenia profilu użytkownika odbywa się automatyczne skanowanie ciała, którego wynik zostaje zapisany. Oznacza to, że przy kolejnym uruchomieniu masażu w profilu użytkownika nie będzie ono przeprowadzane. Ponadto automatycznie zapisywane są ustawienia szybkości pracy ramion masujących i rolek, intensywności masażu poduszkami powietrznymi i intensywności XD skonfigurowane dla każdego programu.

※ W przypadku profili gości niektóre funkcje fotela są ograniczone.

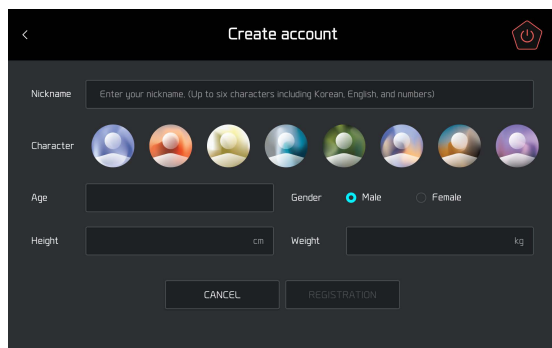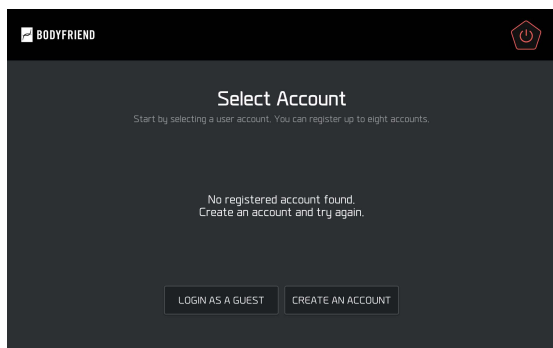

Start

[Przycisk zasilania] > Ekran główny > Wybór żądanego trybu > Skanowanie ciała i dostosowanie pozycji ramion masujących > Rozpoczęcie masażu

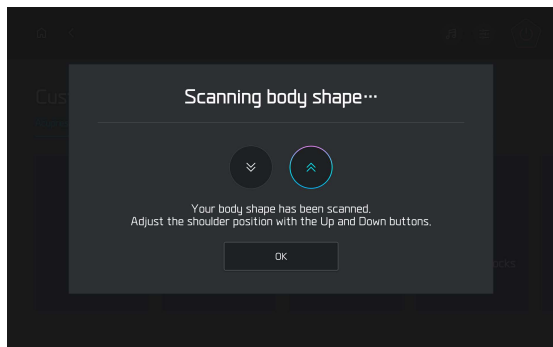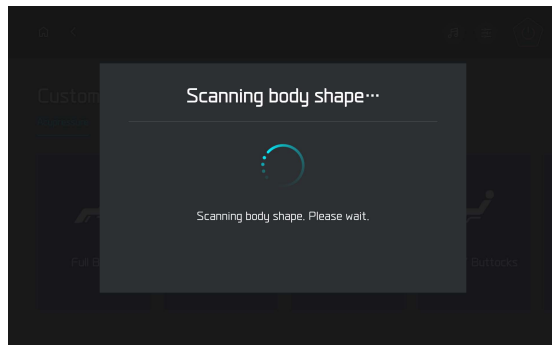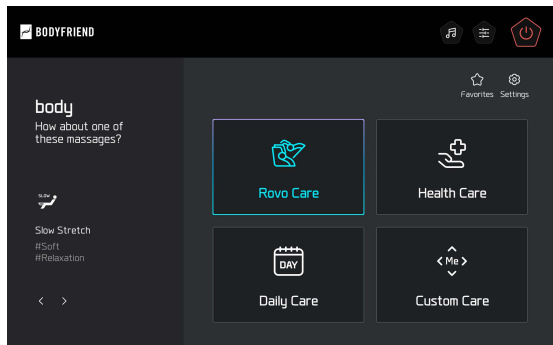

Działanie tabletu i opisy programów

Zakończenie masażu

[Przycisk zasilania] > Sprawdź powiadomienie na ekranie tabletu i naciśnij FINISH > Masaż zakończy się




Powiadomienie o wykryciu niepożądanego obiektu

Zobacz powiadomienie o wykryciu niepożądanego obiektu na ekranie tabletu > Usuń niepożądany obiekt i naciśnij OK > Masaż zostanie wznowiony



Działanie tabletu i opisy programów

Ekran główny

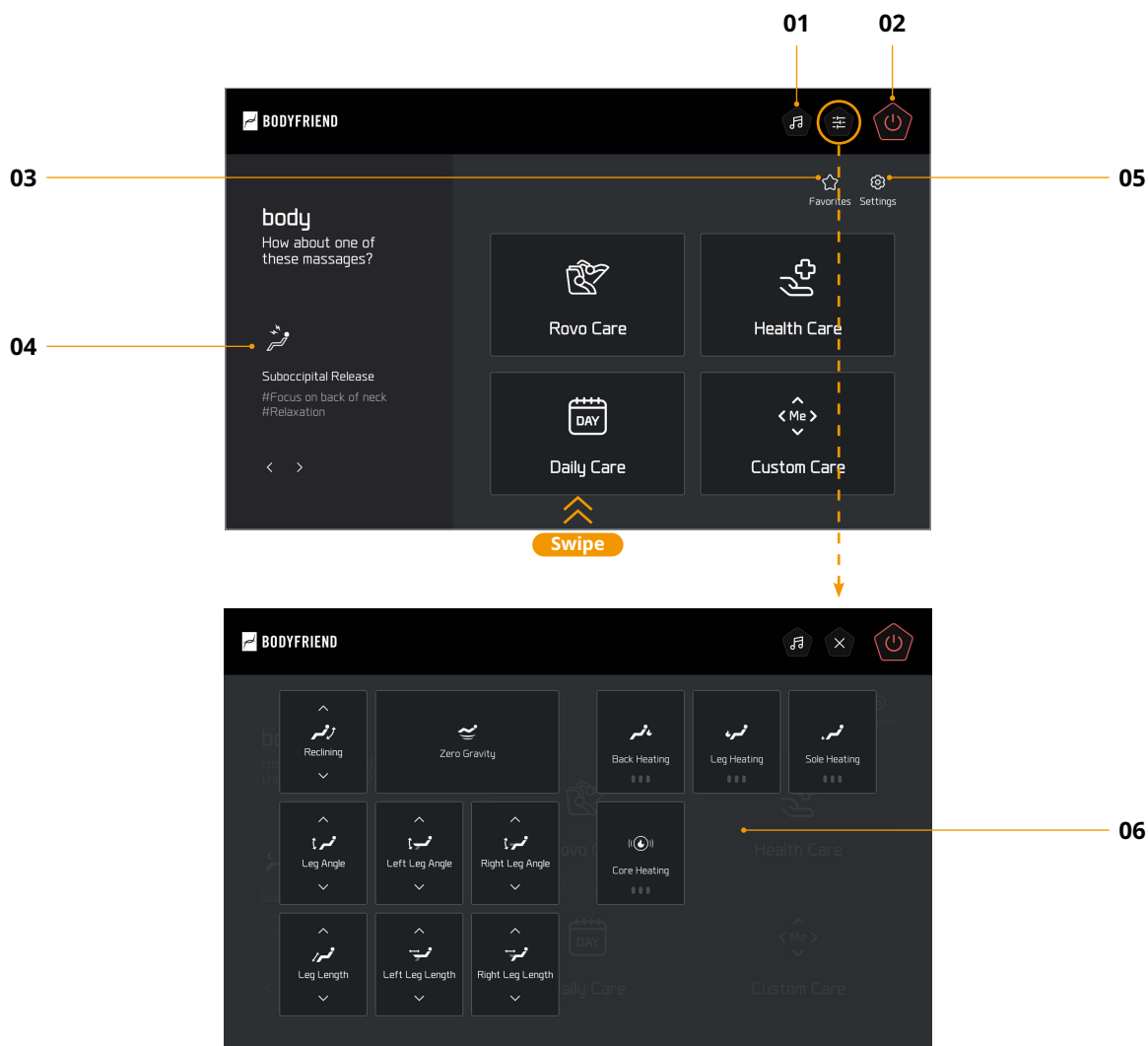

01 Koncerty BF : Przejście do listy koncertów BF.

※ Podczas sesji masażu, gdy Bluetooth jest podłączony lub odtwarzana jest muzyka, funkcja jest niedostępna.

02 Zasilanie: Włączanie lub wyłączanie fotela masującego.

03 Ulubione: Przejście do listy Ulubionych.

04 Propozycje masażu: QUANTUM oferuje różnorodne programy masażu.

05 Ustawienia: Przejście do ekranu Ustawień.


06 Szybkie Menu: Naciśnięcie przycisku  lub przesunięcie palcem w górę od dołu ekranu spowoduje wyświetlenie ekranu Szybkiego Menu.

Fotel masujący umożliwia ręczną regulację kąta ułożenia całego ciała / kąta ułożenia nóg / długości nóg / ogrzewania.

Działanie tabletu i opisy programów

Ekran podczas masażu

※ Układ ekranu może różnić się w zależności od wybranego programu masażu.

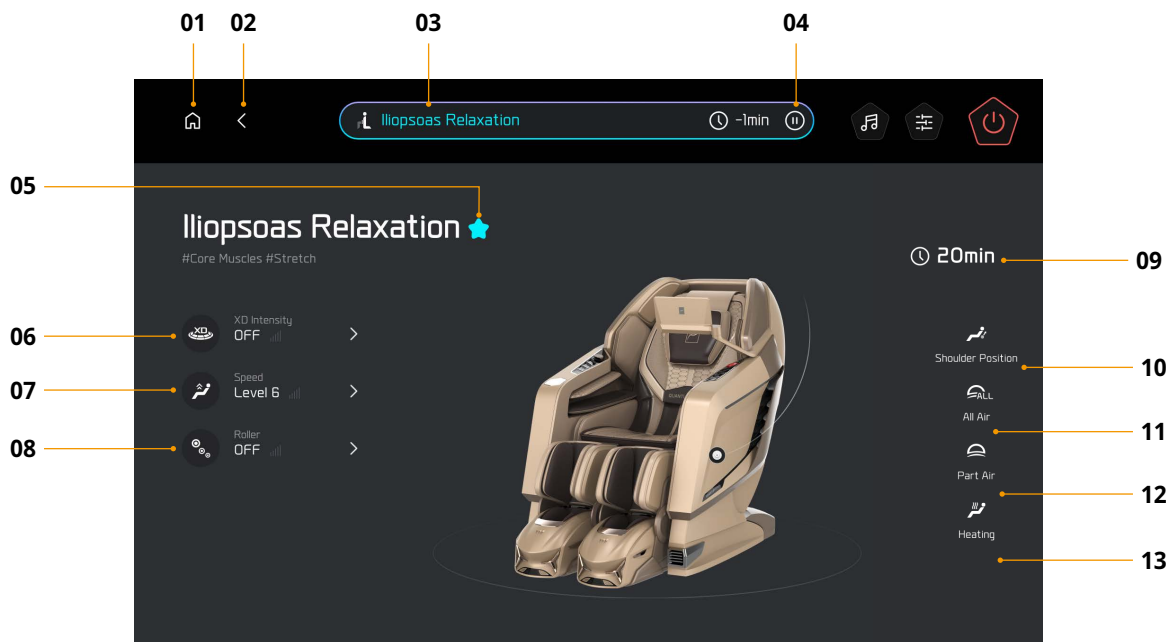

01 Strona główna: Przejście do ekranu głównego.

02 Cofnięcie: Przejście do poprzedniego ekranu.

03 Wskaźnik bieżącego trybu masażu: Wyświetla aktualnie odtwarzany program masażu.

04 Pauza: Wstrzymanie aktualnie odtwarzanego masażu.

05 Dodanie do Ulubionych: Przycisk umożliwiający zapisanie trwającego masażu na liście Ulubionych.

06 Intensywność XD: Przesuń przycisk w górę i w dół, aby dostosować zakres wychyleń masażera w głąb ciała użytkownika.

07 Szybkość masażu: Regulacja poziomu szybkości pracy ramion masujących.

08 Szybkość rolek: Regulacja poziomu szybkości pracy rolek masujących stopy.

09 Czas masażu: Wyświetla pozostały czas masażu.

10 Pozycja ramion: Użyj strzałek w górę i w dół, aby dostosować pozycję ramion masujących według swoich preferencji.

11 Intensywność masażu poduszkami powietrznymi: Regulacja poziomu intensywności wszystkich poduszek powietrznych.


12 Dostosowanie poduszek powietrznych: Umożliwia dostosowanie intensywności masażu poduszkami powietrznymi dla każdej ze stref osobno.

13 Ogrzewanie: Ustawienia poziomów intensywności ogrzewania (w kulkach masujących, w okolicy talii, łydek i podeszew stóp).

Działanie tabletu i opisy programów

ROVO Care

Strona główna > ROVO Care > Wybór programu > Skanowanie ciała i dostosowanie pozycji ramion > Rozpoczęcie masażu

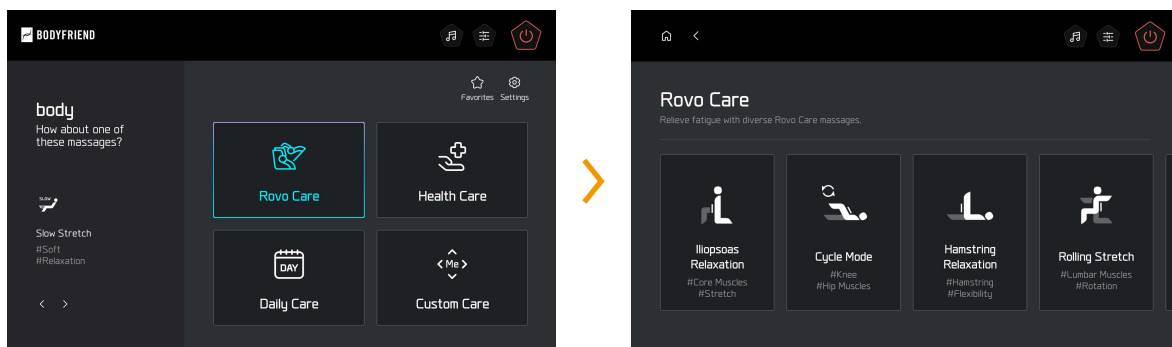


Iliopsoas Relaxation	Rozluźnia mięśnie tułowia poprzez statyczne rozciąganie.
Cycle Mode	Zwiększa elastyczność dolnej części ciała, rozluźniając mięśnie wokół kolan i stawów biodrowych wykorzystując ruch podobny do jazdy na rowerze.
Hamstring Relaxation	Zwiększa elastyczność ścięgien podkolanowych poprzez rozciąganie mięśni z tyłu ud.
Rolling Stretch	Zwiększa elastyczność mięśni wokół talii poprzez rozciąganie asymetryczne.
Piriformis Relaxation	Zwiększa elastyczność grupy mięśni pośladków poprzez rozluźnienie mięśni z tyłu i w głębi pośladków.
PNF Stretch	Łączy rozluźnienie mięśni dolnej części ciała z jednoczesnym ich wzmacnianiem. ※ Podczas PNF Stretch stosowana jest niewielka siła w celu rozluźnienia mięśni. Postępuj zgodnie z komunikatami głosowymi i nie wywieraj nacisku na fotel masujący.
Rovo Refresh	Ugniata i stosuje akupresurę w miejscach, w których narasta zmęczenie, dodając użytkownikowi witalności i energii.
Rovo Recovery	Zwiększa elastyczność nóg poprzez delikatne zastosowanie akupresury skoncentrowanej na karku i talii.

Działanie tabletu i opisy programów

Health Care — Healthcare Massage

Strona główna > Health Care > Healthcare Massage > Wybór programu > Skanowanie ciała i dostosowanie pozycji ramion > Rozpoczęcie masażu

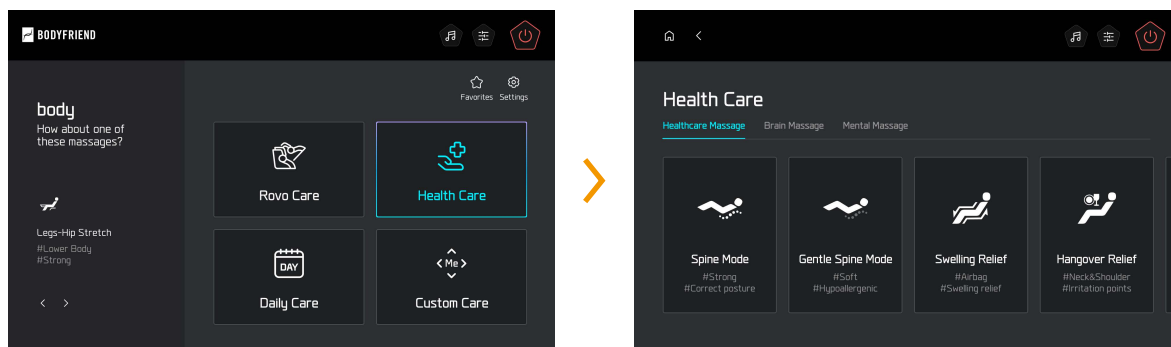


Spine Mode	Wywiera nacisk wzdłuż kręgosłupa, koncentrując się na plecach i talii użytkownika.
Gentle Spine Mode	Łagodny masaż, który wywiera delikatny nacisk wzdłuż kręgosłupa, koncentrując się na plecach i talii użytkownika.
Swelling Relief	Wspomaga krążenie krwi i zmniejsza obrzęki dzięki zastosowaniu masażu poduszkami powietrznymi na całe ciało.
Hangover Relief	Masuje kluczowe punkty akupunkturu na ciele w celu złagodzenia objawów nadmiernego spożycia alkoholu.
Suboccipital Release	Rozluźnia i koncentruje się na czterech mięśniach związanych z kością potyliczną i tylną częścią szyi.
Perineal Massage	Koncentruje się na okolicy miednicy stosując akupresurę w tym obszarze i ugniatając pośladki poduszkami powietrznymi.

Działanie tabletu i opisy programów

Health Care — Brain Massage

Strona główna > Health Care > Brain Massage > Wybór programu i muzyki > Skanowanie ciała i dostosowanie pozycji ramion > Rozpoczęcie masażu

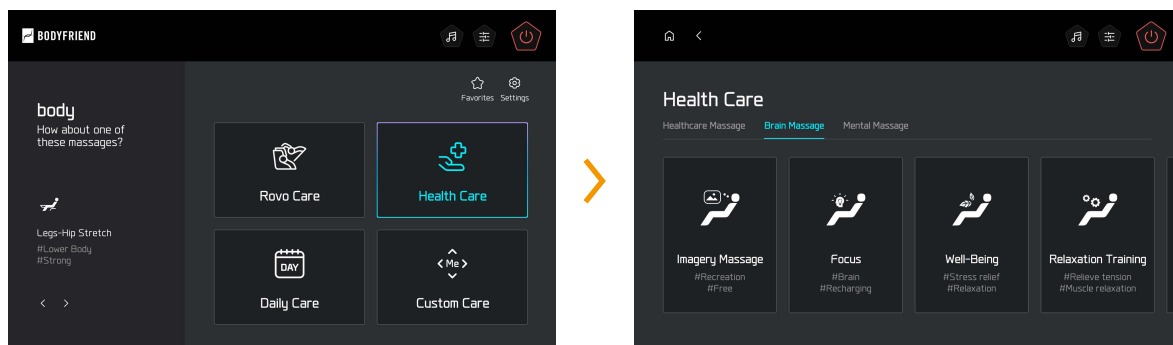


Mental Imagery	Program masażu pomagający trenować myśli i rozwijać wyobraźnię przy pomocy dźwięków przypominających o wakacyjnych lokalizacjach.
Focus	Program masażu pozwalający odpocząć zmęczonemu nauką i pracą mózgowi oraz naładować ciało i umysł, poprawiając koncentrację.
Well-being	Program masażu zapewniający głębokie odprężenie w celu zmniejszenia stresu związanego z codziennym życiem.
Relaxation training	Program masażu wykorzystujący terapię stopniowego rozluźniania mięśni w celu zmniejszenia napięcia i stresu. ※ Terapia stopniowego rozluźniania mięśni: zmniejsza napięcie cieleśne mięśni, aby pozbyć się napięcia z umysłu.
Breathing Relaxation	Program masażu łagodzący napięcie poprzez terapię relaksacji oddechowej. ※ Terapia relaksacji oddechowej: reguluje oddychanie, aby zrelaksować umysł i zmniejszyć nadmierne napięcie i podniecenie.
Good Morning	Program masażu przeznaczony do stosowania o poranku, aby dobrze rozpocząć dzień.
Good Night	Program masażu przeznaczony do stosowania wieczorem, aby zredukować zmęczenie, uporządkować myśli nagromadzone w ciągu dnia i odprężyć się przed snem.

Działanie tabletu i opisy programów

Health Care - Mental Massage

Strona główna > Health Care > Mental Massage > Wybór programu > Wybór muzyki > Skanowanie ciała i dostosowanie pozycji ramion > Rozpoczęcie masażu

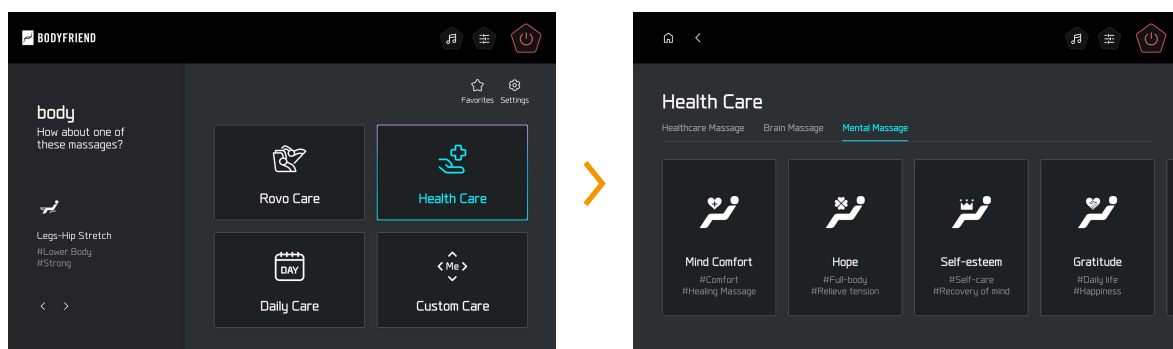


Mind Comfort	Masaż pomagający tym, którzy są przygnębieni z powodu przeszłych wydarzeń.
Hope	Kojący masaż całego ciała, który rozluźnia mięśnie, zmniejszając niepokój i nerwowość spowodowane niepewnością.
Self-Esteem	Uspokajający masaż pomagający odzyskać poczucie własnej wartości tym, którzy czują się przygnębieni i sfrustrowani.
Gratitude	Masaż pomagający przypomnieć sobie cenne chwile w naszym życiu i wypełnić codzienność wdzięcznością.
Forgiveness	Wyciszający masaż, który koi zmęczony i zraniony umysł przy pomocy komunikatów głosowych i muzyki.
Trauma	Kojący masaż zmęczonego ciała i umysłu, przynoszący spokój tym, którzy cierpią z powodu złych wspomnień z przeszłości.
Love	Masaż, który sugeruje sposób na pokochanie siebie poprzez odprężenie ciała i uspokojenie umysłu.
Passion	Masaż pomagający odnaleźć determinację i pozostać wytrwałym w naszych postanowieniach.

Działanie tabletu i opisy programów

Daily Care

Strona główna > Daily Care > Wybór sekcji [Body Part / Stretch / Sleep / User / Sports] > Wybór programu
> Skanowanie ciała i dostosowanie pozycji ramion > Rozpoczęcie masażu

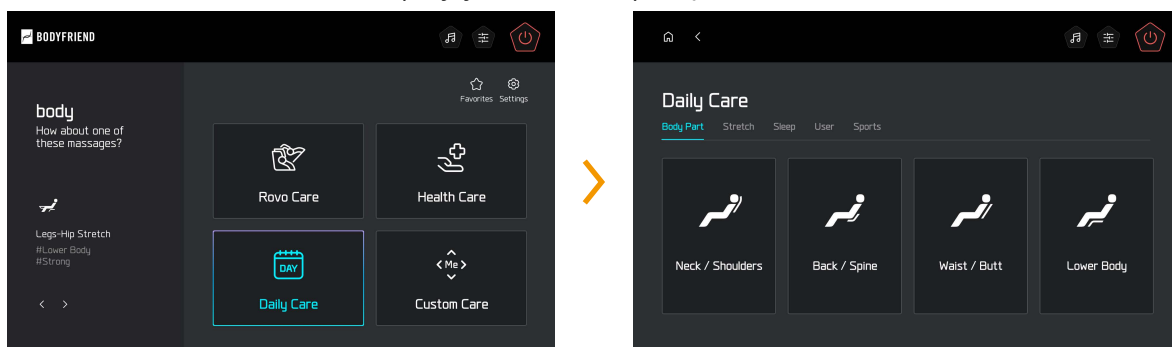


Body Part	Neck/ Shoulders	Rozluźnia szyję i ramiona poprzez masaż techniką rozcierania i rozciąganie.
	Back/Spine	Rozluźnia plecy i kręgosłup wykorzystując akupresurę i masaż techniką rozcierania.
	Waist/Butt	Rozluźnia talię i pośladki wykorzystując akupresurę i masaż techniką rozcierania.
	Lower Body	Wykorzystuje różne techniki masażu koncentrując się na talii i nogach.
Stretch	Legs-Hip Stretch	Intensywnie rozciąga dolne partie ciała, przytrzymując biodra i rozciągając nogi.
	Spine Stretch	Intensywnie rozciąga kręgosłup, podpierając tył głowy i rozciągając nogi z jednoczesnym masażem okolic kręgosłupa.
	Slow Stretch	Zapewnia delikatne rozciąganie i relaks dla tych, którzy nie preferują mocnego rozciągania.
	Airbag Stretch	Relaksuje i zapewnia delikatny masaż za pomocą poduszek powietrznych.
Sleep	Natural Sleep	Odpęży i wycisza wykorzystując prosty, delikatny masaż całego ciała i zmianę kąta odchylenia oparcia. Trwa 30 minut.
	Nap	Pozwala na skuteczną drzemkę trwającą mniej niż 20 minut wykorzystując powtarzające się, delikatne oklepywanie.
	Hammock Sleep	Zapewnia komfortowy masaż przypominający drzemkę w hamaku dzięki zastosowaniu kołysania.
	Soft Sound	Zapewnia masaż całego ciała bez użycia poduszek powietrznych i doskonale sprawdza się nocą, gdy nie chcemy hałasować.
User	CEO	Koncentruje się na szyi i ramionach, aby zmniejszyć napięcie karku wywołane nadmiernym stresem.
	Senior	Zapewnia bezpieczny masaż dla seniorów preferujących delikatny i łagodny masaż.
	New Parent	Skupia się na szyi i talii użytkowników zmęczonych rodzicielstwem i stosuje specjalny masaż poduszkami powietrznymi na ramionach, nogach i obszarach miednicy.
	Office	Zapewnia odświeżający masaż talii, szyi i ramion osobom pracującym przez cały dzień w pozycji siedzącej.
Sports	Golf	Zapewnia intensywny masaż rąk, nóg i podeszew stóp oraz dłoni zmęczonych po grze w golfa.
	Pilates	Pomaga utrzymać prawidłową postawę wykorzystując stymulację mięśni pośladków i dolnej części brzucha oraz rozluźnia mięśnie poprzez dostosowanie kąta odchylenia całego fotela i podnóżka.
	Yoga	Zapewnia dynamiczny masaż i rozciąganie przy użyciu ruchów inspirowanych jogą dla zwiększenia elastyczności ciała.
	Driving	Delikatny masaż skoncentrowany na górnych partiach ciała zmęczonych długą jazdą.

Działanie tabletu i opisy programów

Custom Care

Strona główna > Custom Care > Wybór techniki masażu > Wybór obszaru masażu > Rozpoczęcie masażu

※ Na ekranie bieżącego masażu możesz dostosować szczegóły, takie jak częstotliwość i prędkość masażu.


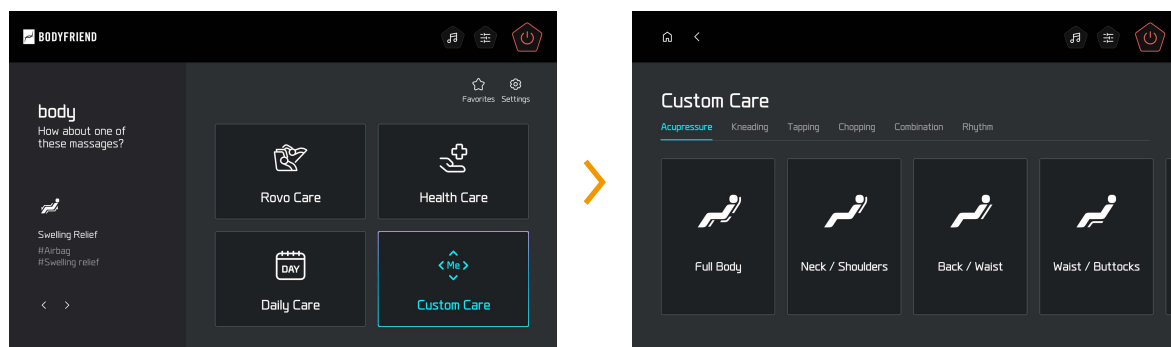


Kneading	Ramiona masujące poprzez technikę ugniatania zbierają się i rozchodzą na boki w celu przeprowadzenia masażu. Technika ta jest idealna do zmniejszania silnej sztywności i zniwelowania skurczów mięśni.
Tapping	Ramiona masujące ostukują ciało od ramion w dół. Ta technika jest skuteczna w rozluźnianiu mięśni ramion i pleców.
Chopping	Ramiona masujące poruszają się w górę i w dół ciała lekkim i szybkim ruchem siekającym. Technika ta skutecznie łagodzi zmęczenie mięśni.
Combination	Technika ta stanowi kombinację rytmicznie powtarzanych technik ugniatania i ostukiwania zapewniając zalety obu technik.
Acupressure	Ramiona masujące poruszają się w górę i w dół ciała, zapewniając głęboki masaż tkanek. Technika ta w wyrafinowany sposób odciąża sztywne mięśnie.
Rhythm	Kule masujące pracują rytmicznie obok siebie, oklepując ciało. Technika ta przynosi szybko odczuwalną ulgę mięśniom.

Działanie tabletu i opisy programów



Favorites - Ulubione

- 01 Rejestracja: Uruchom żądany program masażu > Dostosuj ustawienia do swoich preferencji > Naciśnij ikonę gwiazdki ★, aby zapisać program w Ulubionych
- 02 Uruchomienie: Wybierz ikonę Favorites w prawym górnym rogu ekranu głównego > Wybierz żądany program spośród ulubionych > Uruchom masaż
- 03 Zarządzanie listą Ulubionych: Możesz zarejestrować do 12 ulubionych programów na liście. Możesz również zmieniać kolejność lub usuwać zapisane programy ulubione z listy.

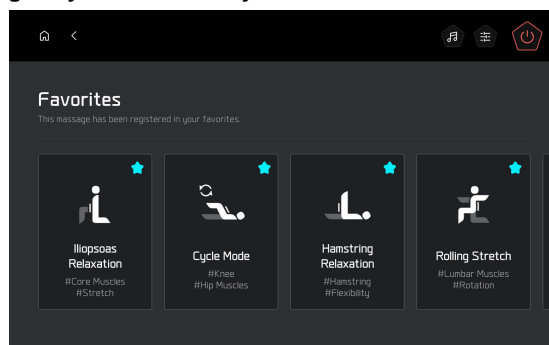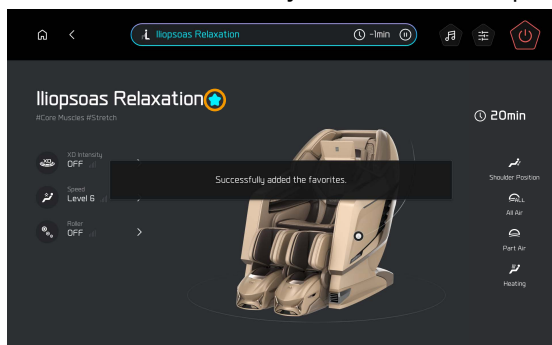


Koncerty BF

Strona główna > Wybierz ikonę 🎵 nutki w prawym górnym rogu ekranu głównego > Wybierz muzykę > Uruchom naciskając START ✖ Koncerty BF nie są dostępne podczas programów masażu wykorzystujących muzykę.

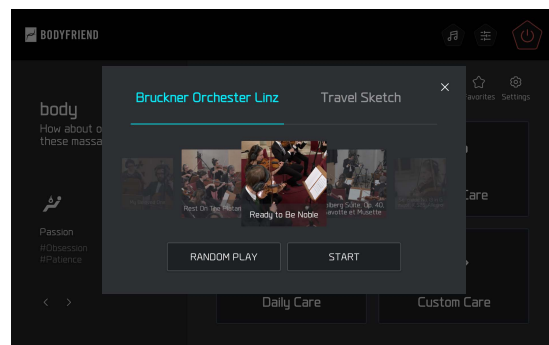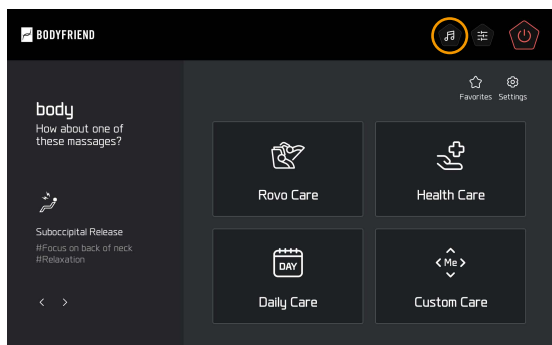


Account - Konto użytkownika

Strona główna > Ustawienia [Settings] > Konto [Account] > Rejestracja i zarządzanie kontem

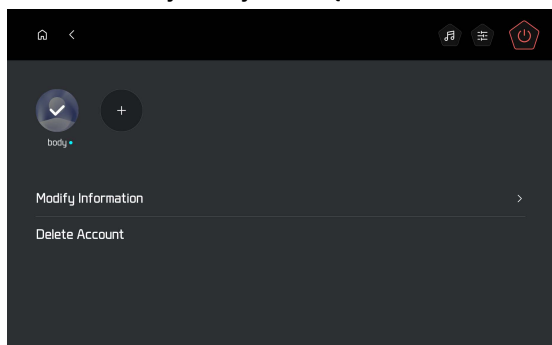

Wi-Fi


Strona główna > Ustawienia [Settings] > Wi-Fi > Lista dostępnych połączeń

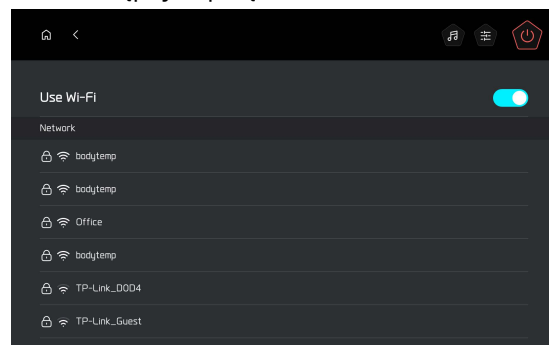

Działanie tabletu i opisy programów

Czas masażu


Strona główna > Ustawienia [Settings] > Czas masażu [Massage Time] > Wybór czasu masażu z dostępnych wariantów: 10 / 20 / 30 minut

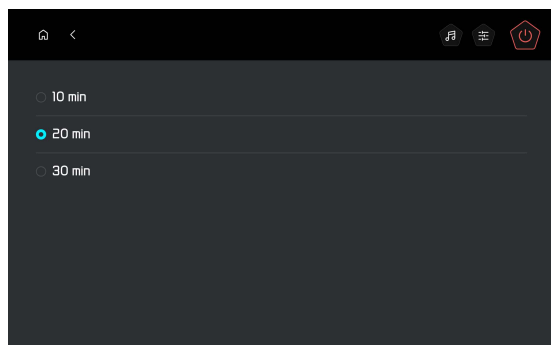

Dźwięk

Strona główna > Ustawienia [Settings] > Dźwięk [Sound] > Media/ B&O Sound/Audio Mode

※ Dźwięk B&O: Możesz bezpośrednio dostosować wysokie i niskie tony oraz cieszyć się spersonalizowanym dźwiękiem, ustawiając korekcję głośności.

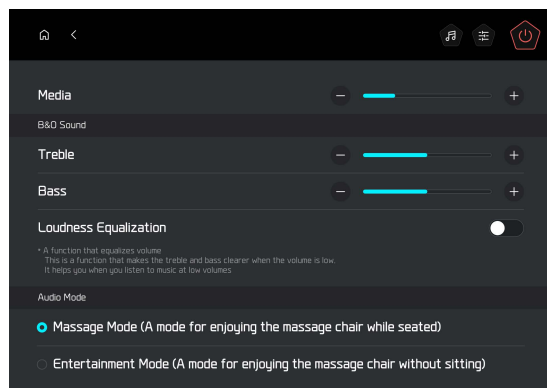


Jasność ekranu

Strona główna > Ustawienia [Settings] > Dostosowanie jasności ekranu [Screen Brightness]



Język


Strona główna > Ustawienia [Settings] > Język [Language and Input] > Wybór języka

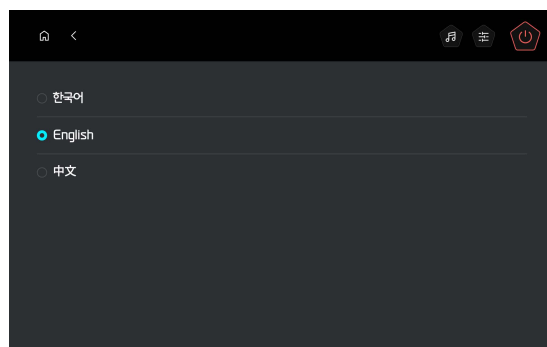

Działanie tabletu i opisy programów

Oświetlenie LED


Strona główna > Ustawienia [Settings] > Włączanie / wyłączanie oświetlenia LED [Massage Chair LED]

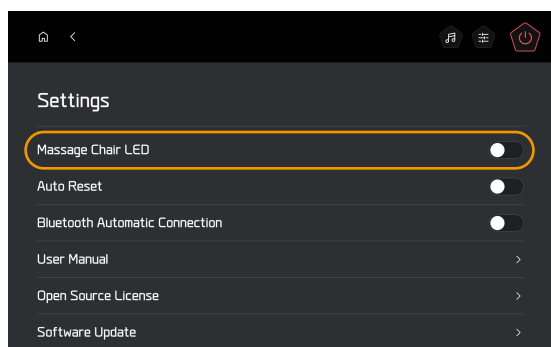

Automatyczny reset pozycji fotela

Strona główna > Ustawienia [Settings] > Włączanie / wyłączanie automatycznego resetu pozycji fotela [Auto Reset]


※ Umożliwia automatyczny powrót fotela masującego do pierwotnej pozycji po zakończeniu masażu.

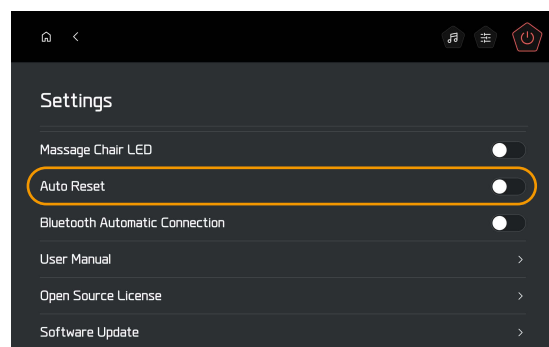

Automatyczne łączenie Bluetooth


Strona główna > Ustawienia [Settings] > Włączanie / wyłączanie automatycznego łączenia Bluetooth [Bluetooth Automatic Connection]

※ Gdy funkcja automatycznego łączenia Bluetooth jest włączona, fotel masujący po uruchomieniu automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem.

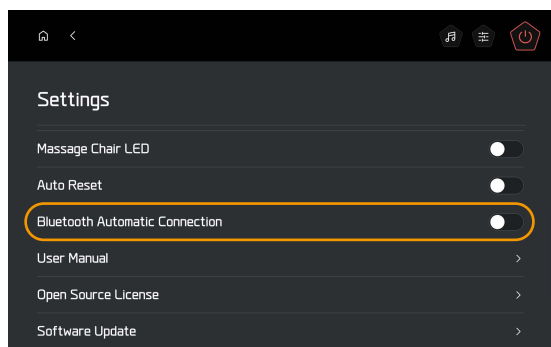

Instrukcja obsługi

Strona główna > Ustawienia [Settings] > Instrukcja obsługi [User Manual]

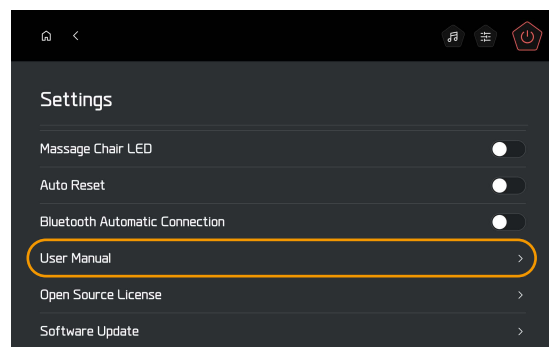

Moduł XD PRO

Nowy, wyjątkowy system masażu XD firmy BODYFRIEND

1. Szeroki zakres dogłębnego masażu XD

- Zapewnia masaż ramionami masującymi na większym obszarze ciała dzięki długiej osi obrotu modułu XD.
- Ramiona masujące wykonują zaawansowany i głęboki masaż. Pracują odwzorowując kształt litery X.

2. Ergonomiczny kąt masażu XD

- Dostosuj kąt odchylenia oparcia fotela zależnie od techniki masażu, aby uzyskać masaż jeszcze bardziej skoncentrowany na poszczególnych częściach ciała.
- Zapewnia intensywny masaż dla dużych mięśni i delikatny masaż dla mniejszych.
- Odwzorowuje masaż wykonywany przez prawdziwego masażystę.

XD PRO

Spersonalizowany system masażu oparty na skanowaniu ciała użytkownika

1. Szybkie i dokładne 15 sekundowe skanowanie

- Ramiona masujące przesuwają się wzdłuż ciała, aby rozpoznać dokładną pozycję ramion poprzez wykrywanie krzywizn kręgosłupa, dostosowując się do budowy ciała użytkownika.
- Podczas masażu można dostosować pozycję ramion masujących w czasie rzeczywistym.

2. Zaawansowany i delikatny masaż

- Doprecyzowana praca ramion masujących zapewnia bardziej dokładny masaż niż poprzednia wersja modułu XD.
- Precyzyjne skanowanie ciała umożliwia stosowanie różnych technik masażu.



Wymiary i specyfikacja urządzenia

W celu zwiększenia wydajności specyfikacja może ulec częściowej zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model	BFR-9020EU
Napięcie znamionowe	220-240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	240 W
USB	5 V, 2.0 A
Moc wyjściowa	do 15 W
Automatyczny wyłącznik czasowy	10 / 20 / 30 minut
Poduszki powietrzne	ramiona / przedramiona / plecy / talia / biodra / miednica / pośladki / uda / łydki / stopy / pięty
Rolki masujące	podeszwy stóp
Zakres pracy ramion masujących	od szyi do pośladków
Tablet	10 cali / Rozdzielczość ekranu: 1920 X 1200
Nagłośnienie	Głośniki Bang & Olufsen / Głośnik wysokotonowy: RMS 4 W, moc szczytowa 7,8 W / Głośnik niskotonowy: RMS 30 W, moc szczytowa 60 W
Waga produktu	165.6 kg
Maksymalna waga użytkownika	150 kg
Wymiary złożonego fotela	165 x 91 x 121 cm (dł. x szer. x wys.)
Wymiary po rozłożeniu fotela	200 x 91 x 99 cm (dł. x szer. x wys.)
Nazwa ogólna	Fotel masujący

Rozwiązywanie problemów | Usługi serwisowe

W przypadku wystąpienia drobnych usterek lub błędów, przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Problem	Przyczyny	Rozwiązanie
Fotel masujący nie działa nawet gdy zasilanie jest włączone.	Nie naciśnięto przycisku włączania na tablecie, panelu podręcznym lub przycisku zasilania na fotelu.	Naciśnij odpowiedni przycisk.
	Nie wybrano programu.	Wybierz i uruchom program masażu.
	Zasilanie nie jest prawidłowo podłączone.	Podłącz zasilanie w prawidłowy sposób.
	Wtyczka / kabel zasilania jest uszkodzona / uszkodzony.	Skontaktuj się z Centrum Serwisowym.
Fotel masujący generuje dźwięki podczas pracy.	Bezpieczniki są przepalone.	Skontaktuj się z Centrum Serwisowym.
	Obwód elektryczny działa nieprawidłowo.	
	Typowe odgłosy fotela - Wibracje pompy powietrza, odgłos wlotu /wylotu powietrza - Odgłosy związane z napełnianiem poduszek powietrznych - Otwieranie/zamykanie elektrozaworów - Ocieranie się elementów ruchomych o tapicerkę	Odgłosy te są typowymi odgłosami pracy urządzenia. Z urządzeniem nie dzieje się nic złego.
	Fotel masujący był używany przez zbyt długi czas.	Wyłącz fotel i uruchom go ponownie po 30 minutach.
Fotel nagle zatrzymuje się podczas pracy.	Rozdarcie spowodowane długotrwałym użytkowaniem.	Skontaktuj się z Centrum Serwisowym.
	Przypadkowe naciśnięcie przycisku OFF.	Naciśnij przycisk włączania fotela masującego.
Fotel nagle zatrzymuje się podczas zmiany kąta nachylenia.	Czas masażu dobiegł końca.	Uruchom fotel ponownie (po 30 minutach).
	Sprawdź czujniki wykrywania niepożądanych obiektów. Być może pomiędzy częściami fotela znajdują się jakieś przedmioty.	Usuń niepożądany obiekt i uruchom ponownie urządzenie.
	Nadmierne użytkowanie fotela masującego.	Wyłącz fotel i uruchom go ponownie po 30 minutach.
Ramiona masujące zahaczają lub uderzają o tapicerkę fotela od wewnątrz podczas pracy.	Tarcie ramion masujących o tapicerkę.	Tarcie ramion masujących o tapicerkę fotela to naturalne zjawisko podczas masażu, nie stanowi ono problemu.
Brak powrotu do pierwotnej pozycji.	Nadmierne użytkowanie fotela.	Skontaktuj się z Centrum Serwisowym.
Pilot przegrzewa się.	Nadmierne użytkowanie.	Wyłącz fotel i uruchom go ponownie po 30 minutach.
Kabel zasilający przegrzewa się	Nadmierne użytkowanie.	Wyłącz fotel i uruchom go ponownie po 30 minutach.
	Inne przyczyny.	Skontaktuj się z Centrum Serwisowym.
Poduszki powietrzne nie włączają się.	Przewód powietrza jest rozłączony.	Skontaktuj się z Centrum Serwisowym.
	Przewód zasilający związany z systemem powietrznym jest odłączony.	

Warunki gwarancji

Gwarancja obejmuje:

- robociznę, części i ramę fotela masującego
- **Okres gwarancji może się różnić w zależności od punktu sprzedaży. Należy zweryfikować go u sprzedawcy.**

Wszystkie towary sprzedawane na podstawie niniejszej gwarancji, z wyjątkiem dołączonych akcesoriów, dokumentacji lub ulepszeń, są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w momencie dostawy do Nabywcy i są objęte powyższą gwarancją w okresie gwarancyjnym. Wadliwy sprzęt może zostać zwrócony Sprzedawcy po przeprowadzeniu inspekcji przez przedstawiciela Sprzedawcy i po otrzymaniu od Sprzedawcy instrukcji wysyłki dotyczących wadliwych towarów zatwierdzonych przez Sprzedawcę do zwrotu. Towary zwrócone zgodnie z powyższą procedurą zostaną wymienione lub naprawione, według uznania Sprzedawcy i ponownie dostarczone Kupującemu bez żadnych dodatkowych opłat.

Niniejsza gwarancja podlega następującym OGRANICZENIOM I WYŁĄCZENIOM:

Ograniczenia:

- Niniejsza wyraźna gwarancja dotyczy WYŁĄCZNIE foteli masujących, a nie towarzyszących im akcesoriów, dokumentacji lub rozszerzeń;
- Niniejsza gwarancja nie podlega przeniesieniu;
- Niniejsza gwarancja jest ważna wyłącznie na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, w zależności od lokalizacji punktu sprzedaży;
- Odpowiedzialność firmy Bodyfriend i jej sprzedawcy oraz wyłączne zadośćuczynienie Nabywcy w ramach niniejszej gwarancji są ograniczone do naprawy lub wymiany wad materiałowych i produkcyjnych, jak określono powyżej. Firma Bodyfriend i jej sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wtórne wynikające z naruszenia niniejszej lub jakiegokolwiek innej wyraźnej lub dorozumianej gwarancji w odniesieniu do towaru;
- Niniejsza wyraźna gwarancja jest jedyną gwarancją mającą zastosowanie do tej transakcji. Wyklucza ona wszelkie inne wyraźne ustne lub pisemne gwarancje oraz wszelkie gwarancje dorozumiane przez prawo w odniesieniu do towarów, w tym wszelkie gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu;
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych produktów firmy BODYFRIEND, które były przedmiotem niewłaściwego użytkowania, wypadku, niewłaściwego montażu lub przechowywania, konserwacji lub zastosowania, ani produktów, które zostały naprawione lub zmodyfikowane bez zgody firmy BODYFRIEND lub jej autoryzowanego przedstawiciela, ani też niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych kosztów robocizny związanych z usunięciem i/lub wymianą niezgodnego lub wadliwego urządzenia lub jego części;
- Każde roszczenie wynikające z niniejszej gwarancji lub związane z niniejszym zamówieniem zakupu zostanie uznane za nieważne, chyba że zostanie złożone na piśmie w okresie gwarancyjnym przekazany przez Sprzedawcę po otrzymaniu towarów, do których odnosi się takie roszczenie;
- Niniejsza gwarancja jest nieważna w przypadku, gdy naprawy są dokonywane przez kogokolwiek innego niż Sprzedawca bez uprzedniej autoryzacji ze strony BODYFRIEND.

Warunki niniejszej gwarancji podlegają prawu Unii Europejskiej.

Warunki gwarancji

Wyłączenia:

Niniejsza wyraźna gwarancja traci ważność bez dołączonej karty gwarancyjnej i wymaganych informacji (data zakupu, montażu, RMA itp.).

Niniejsza wyraźna gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwej instalacji lub użytkowania, zaniedbania, upuszczenia produktu, nieuzasadnionej konserwacji, nieprzestrzegania instrukcji, nieautoryzowanych napraw, zmian, modyfikacji oryginalnego stanu i zmian kosmetycznych. Ponadto gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego korzystania z zasilania elektrycznego; utraty zasilania; zakłóceń elektrycznych, skoków napięcia.

Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń lub pęknięć ekranu spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nadmierną siłą, uszkodzeniami transportowymi, kradzieżą, nadużyciem, niewłaściwym użytkowaniem, wandalizmem lub klęskami żywiołowymi (pożarami, powodziami, rdzą, korozją, piaskiem, brudem, wichurami, gradem, trzęsieniami ziemi lub jakąkolwiek ekspozycją na warunki pogodowe). BODYFRIEND nie honoruje gwarancji na produkty zakupione przez lub za pośrednictwem nieautoryzowanych dealerów, produkty używane komercyjnie lub do celów komercyjnych oraz czas stracony przez właściciela w czasie wymiany produktu lub naprawy w zakładzie serwisowym itp. Naturalne zjawiska, takie jak między innymi zmiękczenie/twardnienie pianek i kompozytów, blaknięcie, zużycie, mechacenie się tkanin, naturalne ślady, ziarno i zmiany barwnika skóry oraz awarie punktów mocowania nie stanowią podstawy do uznania gwarancji, podobnie jak elementy przeznaczone do okresowej wymiany przez Nabywcę w normalnym okresie użytkowania produktu, w tym między innymi baterie, żarówki itp. Wymiana pokrowca na siedzenie i inne akcesoria nie są objęte gwarancją.

Serwis:

Okres obsługi serwisowej może się różnić w zależności od punktu sprzedaży. Należy dopytać o niego sprzedawcę. Nabywca jest jednak odpowiedzialny za wszelkie koszty wysyłki, cła i opłaty pośrednie. Po wygaśnięciu okresu świadczenia usług serwisowych, Nabywca pokrywa wszelkie opłaty związane z serwisem urządzenia. Usługi serwisowe są ograniczone do wymiany wadliwego urządzenia lub jego części na podobne produkty o takiej samej lub niższej wartości. Jeśli wymiana nie zostanie zaakceptowana przez Nabywcę, Sprzedawca lub jego dostawca usług serwisowych nie jest już odpowiedzialny za dalsze usługi w ramach niniejszej gwarancji serwisowej.


Preferowany kontakt: Sprzedawca fotela masującego.

Aby uzyskać więcej informacji, możesz również skontaktować się z Bodyfriend Europe (+33 1 47 72 05 05, france@bodyfriend.com).

QUANTUM

Nagłośnienie
Bang & Olufsen

Nazwa produktu	Fotel masujący
Model	BFR-9020EU
Obsługa Klienta	france@bodyfriend.com / +33 1 47 72 05 05
Numer instrukcji obsługi	241111

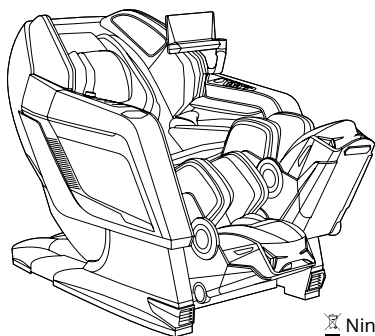

Niniejszą instrukcję należy zutylizować zgodnie z lokalnymi zasadami selektywnej zbiórki odpadów.
