

Instrukcja montażu i obsługi

Siedzisko prysznicowe

Model 815CC



BEZ BARIER

BEZ BARIER

I. Dane techniczne /Rys. A/

Szerokość siedziska	400 [mm]
Głębokość od ściany	382 [mm]
Wysokość max.	156 [mm]
Wymiar od ściany po złożeniu	170 [mm]
Regulacja opadania krzeselka	płynna
Dopuszczalne obciążenie	150 [kg]
Waga netto	3,40 [kg]

II. Zastosowanie

Siedzisko prysznicowe wykonane zostało z materiałów odpornych na korozję, dzięki czemu doskonale sprawdza się w warunkach panujących w łazienkach. Może ono znaleźć zastosowanie również w gabinetach lekarskich, szpitalach i innych miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych lub osób starszych. Poprzez zastosowanie siedziska prysznicowego, kompensowane jest upośledzenie narządów ruchu, a w szczególności kończyn dolnych. Siedzisko prysznicowe ma możliwość złożenia, co znacznie zwiększa komfort jego użytkowania. Siedzisko prysznicowe wykonane zostało z PCW /PVC/, dzięki czemu ograniczone jest ślizganie się i nieprzyjemne uczucie zimna.

III. Budowa /Rys. B /

1. Stelaż siedziska prysznicowego
2. Siedzisko z PCW /PVC/
3. Zaślepka stelażu z PCW /PVC/
4. Śruba mocująca
5. Nakrętka samohamowna

IV. Montaż /Rys. C/




Zalecany jest montaż siedziska prysznicowego do ściany pełnej. W przypadku montażu w materiałach z pustką i w gazobetonie otwory należy wiercić bez uderu. Otwory po wierceniu należy oczyścić z pyłu oraz zwiercić. Siedzisko prysznicowe przykręcić do ściany przy pomocy 6 wkrętów poz.6 i kołków rozporowych poz.7 załączonych w zestawie. Po przykręceniu uchwyty, na wkręty nałożyć zaślepki poz. 8 dołączone w zestawie. Nie wolno mocować uchwyty ściennie-podłogowego bezpośrednio do płyt kartonowo-gipsowych!

V. Obsługa i eksploatacja /Rys. B/

1. Przed użytkowaniem siedziska prysznicowego należy zwrócić uwagę na stan techniczny i pewność zamocowania do ściany.
2. Siedzisko prysznicowe po zamontowaniu do ściany należy odpowiednio wyregulować. W tym celu należy przytrzymać śrubę poz.4 kluczem ampułowym "6" i dokręcić lub odkręcić nakrętkę samohamowną poz.5 kluczem sztorcowym "13" tak, by krzeselko nie opadało samoczynnie.

BEZ BARIER

BEZ BARIER

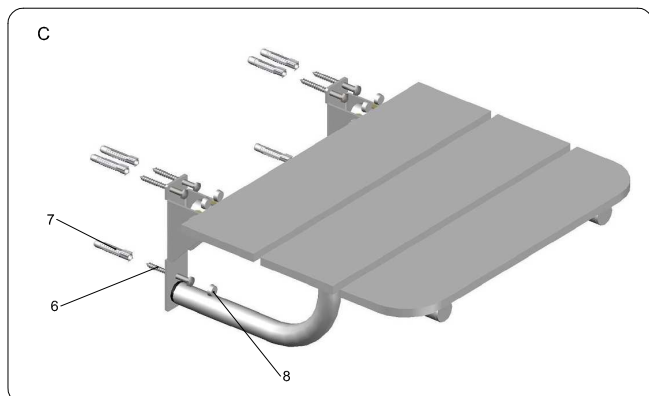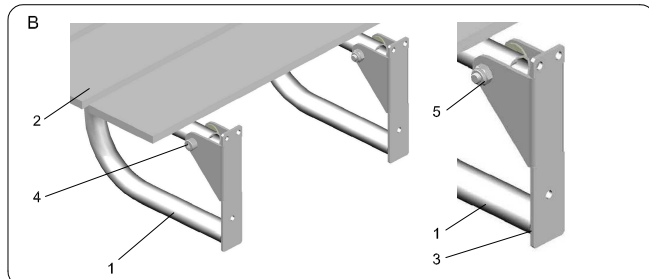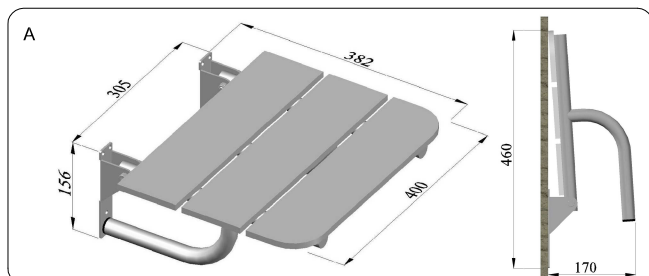

3. Zaleca się okresowe sprawdzenie prawidłowego zamocowania siedziska prysznicowego.
4. W przypadku widocznej szczeliny pomiędzy podkładką a ścianą należy dokręcić wkręty mocujące poz.6.

VI. Konserwacja

1. Stal nierdzewna Inox charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na czynniki działające w trakcie normalnej eksploatacji. Nie traci swego połysku i gładkości powierzchni, pod warunkiem systematycznej konserwacji przy użyciu odpowiednich środków czyszczących. Należy używać środków przeznaczonych do czyszczenia szkła, ale nie zawierających chlorków. Powierzchnie bardzo zaniebane mogą być czyszczone przy użyciu środków do polerowania metali. Niedopuszczalne jest stosowanie środków zawierających chlor, a w szczególności kwas solny. Może to prowadzić do przeżycenia powierzchni lub pojawienia się rdzawych plam.
2. Do zwykłego zabrudzenia stosować mokną tkaninę, do bardziej opornego - nylonowe gąbki. Nie wolno stosować stałowych poduszek i szczotek drucianych do szorowania, aby uniknąć porysowania powierzchni i zanieczyszczenia cząsteczkami żelaza.
3. Płytki PCW /PVC/ czyścić łagodnym roztworem detergentu /mydło, szampon/ przy użyciu miękkiej gąbki lub szmatki namoczonej w ciepłej wodzie. Zabrania się stosowania do czyszczenia jakichkolwiek rozpuszczalników oraz kontaktu z mocno nagrzanymi powierzchniami.
4. Środki zastosowane do konserwacji siedziska prysznicowego, powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do ich stosowania.

VII. Zalecenia

1. Użytkować siedzisko prysznicowe zgodnie z instrukcją obsługi.
2. W przypadku zbyt gwałtownego opuszczania się siedziska prysznicowego należy okresowo dokonać regulacji opuszczania.
3. Czyszczenie uchwyty ze stali nierdzewnej winno być dokonywane zanim nagromadzone zanieczyszczenia lub odciski palców staną się widoczne, dla zminimalizowania pracochłonności i kosztów czyszczenia.