



# RENA Spółdzielnia

Al. T. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów  
tel. 17 853 79 14, mobile: 696 806 986  
mail: ortohurt@rena.rzeszow.pl [www.rena.rzeszow.pl](http://www.rena.rzeszow.pl)



## Ortezy kręgosłupa krzyżowo-lędźwiowe

# PAS STABILIZUJĄCY NIŻSZY

| Rozmiar         | XXS | XS | S  | M  | L   | XL  | XXL | XXXL |
|-----------------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
| Obwód pasa w cm | 60  | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130  |

Numer kat. REF 407

### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**Zastosowanie:** Pas ten zmniejsza nacisk na mięśnie oraz stawy spowodowane przez wiszący brzuch. Elastyczny materiał konstrukcyjny pasa zapewnia bardzo dobre dopasowanie do figury pacjenta oraz zapewnia możliwość płynnej regulacji siły docisku. Unieruchamia tułów, dzięki ujęciu łuków żebrowych górnym brzegiem pasa.

**Przeciwwskazania:** Nie należy stosować tego rodzaju pasa w przypadku zaburzeń w oddychaniu.

**Użytkowanie i regulacja:** Może być używany pooperacyjnie zalecany po operacjach jamy brzusznej, po ciąży. Pomaga też ustabilizować zębra po złamaniach lub pęknięciach, może być także stosowany, gdy potrzebny jest równomierny nacisk klatki piersiowej po operacjach torakochirurgicznych oraz w rehabilitacji pulmonologicznej. Zakładając pas po raz pierwszy należy wybrać model i wielkość. Założyć pas od tyłu lekko zapiąć i sprawdzić poprawność założenia, następnie dociągnąć zapięcie pasa i wyrównać fałdy. Pas można nosić na cienkie koszulki bawełniane. Korzystając z pomocy personelu medycznego podczas pierwszego założenia, pacjenta uniknie niewłaściwego umiejscowienia lub dobrania niewłaściwego rozmiaru. Złe dopasowany pas nie tylko nie wywiera praktycznie działania leczniczego, lecz powoduje często poważne powikłania rzutujące na przebieg i ostateczne wyniki leczenia. Dolne brzegi pasa nie mogą w pozycji siedzącej uciskać na krocze, ani na okolice pachwinowe, uniemożliwiające swobodne siedzenie przy zgięciu w stawach biodrowych do 90 stopni.

**Sposób czyszczenia i konserwacji:** Często prać w delikatnym środku piorącym w temperaturze ok. 40°C, dobrze wypłukać. Suszyć w ręczniku, rozkładając następnie płasko, aż do zupełnego wyschnięcia. Nie prać chemicznie, nie prasować. Nie czyścić chemicznie, nie chlorować. W żadnym wypadku nie można suszyć pasa przy ogniu na piecu lub na kaloryferach, ponieważ nastąpią odkształcenia, a tym samym zniszczenie pasa. Nie należy dopuszczać do silnego zabrudzenia produktu. Ewentualne zmechacenia usuwać ręcznie by nie uszkodzić pasa.

**Przechowywanie:** Przechowywać w pomieszczeniu suchym, temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła, najlepiej w fabrycznym opakowaniu.



#### UWAGI:

**NIEDOPUSZCZALNE** są samowolne przeróbki, co z reguły pogarsza właściwości użytkowe. Naprawy drobnych uszkodzeń, jak rozprucia i rozdarcia, przetarcia tkaniny, czy obszycia,

użytkownik może dokonywać we własnym zakresie. W przypadku poważniejszych uszkodzeń należy oddać pas do naprawy lub wymienić na nowy.

**Nie szarpać** zapięcia.

**Często** sprawdzać mocowanie zapięcia.

#### WYRÓB JEST PRZEZNACZONY TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jeśli występują działania niepożądane np.: alergia, ból – skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia.

**Warunki reklamacji:** Reklamacje wyrobu przyjmowane są za okazaniem dowodu sprzedaży. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte, powstałe z winy producenta. Produkt zgłoszony do reklamacji powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym przyjętym w handlu.

**Reklamacji nie podlegają:** Uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia, wady powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków użytkowania lub sposobu czyszczenia i konserwacji, uszkodzenia mechaniczne (otarcia, przetarcia), odbarwienia taśm mocujących, wygoda i komfort użytkowania.



Data produkcji:

|     |
|-----|
| LOT |
|     |



Data instrukcji: 16 stycznia 2023 rok – wersja nr 3