

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nasadka toaletowa / Nasadka toaletowa z pokrywą

Kod produktu KING-10-20 / KING-10L-20

KING-15L-20



1. Wykonanie

Nasadka toaletowa wykonana jest z trwałego i wytrzymałego tworzywa sztucznego. Posiada nowoczesny system mocowań z zabezpieczeniem antypoślizgowym, pasuje do większości muszli klozetowych. Ergonomicznie zaprojektowana powierzchnia nasadki powoduje równomierny rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała użytkownika. Lekkie nachylenie siedziska pod kątem wymusza prawidłową postawę i zmniejsza zgięcie w stawach biodrowych i kolanowych. Nasadka toaletowa posiada dwa wycięcia w części przedniej i tylnej, które ułatwiają wykonywanie czynności higienicznych w pozycji siedzącej. Powierzchnia nasadki jest łatwa w czyszczeniu, odporna na plamy i zapachy. Model **KING-10L-20** / **KING-15L-20** posiada pokrywę.

Zestaw zawiera: nasadkę toaletową, uchwyt montażowy wraz ze śrubą motylkową i zabezpieczeniem antypoślizgowym (2 szt.), pokrywa (model **KING-10L-20** / **KING-15L-20**)

Elementy nasadki toaletowej:

- a. wypustka stabilizująca
- b. uchwyt mocujący
- c. zabezpieczenie antypoślizgowe
- d. śruba motylkowa
- e. przednie i tylne wycięcie
- f. pokrywa
- g. zawiasy pokrywy



2. Zastosowanie

Nasadka toaletowa podwyższająca sedes jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonanie czynności fizjologicznych. Zalecana jest osobom z ograniczeniami i dysfunkcjami ruchowymi mających trudności z siadaniem i wstawaniem z sedesu oraz osobom po operacji stawu biodrowego.

3. Montaż

Montaż nasadki toaletowej

- W pierwszej kolejności należy zamontować uchwyty wraz ze śrubami motylkowymi w zewnętrznych otworach montażowych nasadki. Uchwyty należy ustawić szerzej niż wynosi szerokość brzegów muszli klozetowej.
- Następnie należy podnieść deskę sedesową i umieścić nasadkę bezpośrednio na muszle klozetowej, tak aby uchwyty montażowe znalazły się w tylnej części muszli, a wypustka stabilizująca opierała się o zewnętrzną część przodu muszli.
- Następnie śruby motylkowe należy wkręcać zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara do momentu wyczuwalnego oporu, tak aby nasadka nie przesuwała się na muszli klozetowej.

4. Specyfikacja techniczna

Wymiary siedziska wewnętrzne	21 x 26 cm
Wymiary siedziska zewnętrzne	36,5 x 40,5 cm
Wysokość	10 cm / 15 cm
Waga KING-10-20 Waga KING-10L-20 / KING-15L-20	1,00 kg 1,40 kg
Maksymalne obciążenie	250 kg
Kolor	Biały

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z przystawki toaletowej, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

- Nasadkę toaletową należy czyścić regularnie używając tylko wody i łagodnych detergentów mających atest PZH. Dokładnie osuszać.
- Można również zanurzyć nasadkę w wodzie lub wysterylizować ją w autoklawie przez 1 minutę w temperaturze 85°C.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: ostrych środków polerskich, silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem produktu, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Należy co najmniej raz na trzy miesiące, wykonać przegląd wizualny wszystkich elementów wyrobu w tym:
 - Uchwytów mocujących i śrub motylkowych

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		



LM GLOBAL Design Limited

Suite 123, The Capel Building,
Mary's Abbey,
Dublin 7, D07 VY68, Ireland

Dystrybutor:

Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska



Wydanie III, data aktualizacji 30.04.2021