



KOMBAJN KOSMETYCZNY

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

POLSKI

Na wstępie dziękujemy za wybór naszego produktu! Mamy nadzieję, że sprawdzi się on idealnie dla każdego salonu i gabinetu kosmetycznego oraz zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje o produkcie.

INFORMACJE

W celu prawidłowego i długotrwałego użytkowania naszych produktów, szczerze sugerujemy przestrzeganie poniższych zasad:

- Proszę przeczytać instrukcję szczegółowo i zachować ją, do konsultacji w razie problemu.
- Proszę postępować zgodnie z instrukcją podczas montażu i obsługi urządzenia.
- Proszę nie modyfikować żadnych akcesoriów urządzenia.
- Stanowczo zabrania się osobom nieupoważnionym otwierania i wyjmowania płyty głównej urządzenia.
- Konserwacja i naprawa urządzenia powinna być przeprowadzana przez przeszkolonych specjalistów.
- W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących pracy urządzenia, prosimy o kontakt.

ZASADA DZIAŁANIA

1. Wave Fat System

Dzięki głowicy zbiorczej, fale dźwiękowe o sile 40KHZ są emitowane w celu wywołania silnych wibracji komórek tłuszczowych i wytworzenia licznych kieszonek próżniowych, wewnątrz i na zewnątrz komórek. Mocne uderzenia w komórki tłuszczowe generują eksplozję i powodują rozpad triglicerydu na glicerol i wolne kwasy tłuszczowe. Następnie fale RF o częstotliwości 1MHz wyczerpuje zintegrowany glicerol i wolne kwasy tłuszczowe przez krążenie wątrobowo-jelitowe. Wreszcie, elektroda RF pozycjonuje tłuszcz. W fizyce jest to znane jako "kawitacja". Mikroporowa eksplozja wewnątrz i na zewnątrz komórki doprowadza do zwiększenia się ruchu molekularnego i zwiększenia poziomu energii. To w końcu powoduje rozerwanie komórek tłuszczowych, aby osiągnąć zamierzone efekty.

2. Jakie są korzyści z Lipo Laser?

Dzięki najnowszej niechirurgicznej, nieinwazyjnej technologii lipolizy laserowej. Lipo Laser emituje niski poziom energii laserowej, który tworzy sygnał chemiczny w komórkach tłuszczowych, rozkładając przechowywane trójglicerydy do wolnych kwasów tłuszczowych, glicerolu i cząsteczek wody. Jest to podobne do naturalnej reakcji zainicjowanej przez organizm, gdy musi on wykorzystać swoje zgromadzone rezerwy energetyczne. Te wolne kwasy tłuszczowe są następnie transportowane w całym organizmie przez układ limfatyczny, aby dostarczyć organizmowi energii. Podobnie ciało zareagowałoby podczas niedoboru kalorii. Okres ćwiczeń po zabiegu zapewni przyspieszony metabolizm tych wolnych kwasów tłuszczowych. Obkurczając komórki tłuszczowe dzięki czemu pacjent zyskuje zamierzony rezultat. Zabieg laserowy jest nieniszczącą metodą ukierunkowanej redukcji tłuszczu, co oznacza, że nadmiar tłuszczu może być leczony w dowolnym miejscu na ciele, a komórki tłuszczowe nie są niszczone w wyniku zabiegu. Ukierunkowana redukcja tłuszczu i redukcja obwodowa ma wiele zalet w porównaniu z innymi technologiami kształtowania ciała. Oto kilka z nich.

ZALETY

1. Bezpieczna, małoinwazyjna procedura - wykorzystuje niski poziom widzialnego czerwonego światła laserowego, aby stworzyć bezpieczną i bezbolesną stymulację podobną do naturalnej reakcji chemicznej, aby uwolnić zarezerwowane zasoby energii przechowywane w tłuszczu.
2. Łatwy w obsłudze, zabiegi są pasywne i wymagają jedynie prawidłowego ustawienia padów zabiegowych.
3. Szybki czas gojenia się.
4. Działa na wszystkie rodzaje skóry oraz części ciała tak samo.
5. Przyspiesza koagulację tkanek, aby uniknąć luzu mięśniowego po odchudzaniu.
6. Bez krwawienia, bez bólu, bez efektów ubocznych.
7. Szybki zwrot inwestycji.

FUNKCJE INSTRUMENTÓW I ZASADY OBRÓBK

GŁOWICA ULTRADŹWIEKOWA 40KHZ (KAWITACJA)

Silne uderzenie fali dźwiękowej w komórki tłuszczowe – ze zbiorczą siłą głowicy dźwiękowej, silna fala dźwiękowa o mocy 40KHZ emituje w organizmie uderzenia komórek tłuszczowych i powoduje tarcie między komórkami. To powoduje skuteczne spalanie kalorii w komórkach tłuszczowych i zmniejsza rozmiar komórki tłuszczowej. Co więcej, wibracja fali dźwiękowej może spowodować eksplozję komórek, aby zmniejszyć ich ilość i tym samym osiągnąć zamierzony efekt.

Dostępne są 4 tryby A, B, C i D:

"A" to ciągła praca przez 3 sek. i nieciągła przez 3 sek.

"B" to praca ciągła przez 2 sek. i nieciągła przez 2 sek.

"C" to praca ciągła przez 1 sek. i nieciągła przez 1 sek.

"D" to praca ciągła przez 0,5 sek. i nieciągła przez 0,5 sek.

Należy używać głowicy kawitacyjnej 40KHZ przez 15-20 minut, wykonując głównie ruchy spiralne na ciele.

Tryb pracy wybieramy za pomocą "-" oraz "+".

- Naciśnij "+", aby ustawić czas działania.
- Poniżej znajduje się pole wyboru siły pracy
- Kliknij "+", aby zwiększyć intensywność RF "-", aby zmniejszyć intensywność RF
- Naciśnij "START", aby rozpocząć pracę.

Metoda działania: Użyj sondy do masażu określonej części skóry, okrężnie po zastosowaniu kremu wyszczuplającego, przez około 30 do 40 minut. To może przyspieszyć krążenie krwi w leczonej części skóry i wpłynąć na rozkładanie tłuszczu.

Sprawy wymagające uwagi:



1. Przed zabiegiem należy nałożyć krem wyszczuplający lub żel chłodzący na leczonej część skóry.
2. Trzymać sondę blisko skóry.
3. Ustawić wysoką intensywność pracy.
4. Nie napromieniowywać gałki ocznej bezpośrednio kolorowym światłem.
5. Pracować z głowicą TRIPOLAR RF przez 15-20 minut, wykonując głównie ruchy spiralne.

GŁOWICA VACUUM BIPOLAR RF

Rozpuszcza tłuszcz, zwiększając drenaż limfatyczny, ujędrnia i poprawia elastyczność skóry. Sprzęt do kształtowania ciała, posiada najbardziej zaawansowaną technologię turbiny podciśnienia i innowacyjną technologię konwersji trójwymiarowej łącząc się z mikrokomputerowym chipem sterowanym osią rolki patentowej. Ma efekt przyciągania anty-geocentrycznego na skórze. Przyciąga i rozprzestrzenia tkanke łączną fibrylarną kory, poprzez rytmiczny masaż i skutecznie rozbija podskórny tłuszcz i zmniejsza gromadzenie tłuszczu w tkance komórkowej. Uwalnia mikro naczynia limfatyczne jednocześnie przyspieszając metabolizm i przekształca komórki tłuszczowe w pasywnym ruchu do kwasów tłuszczowych. Toksyny wewnątrz komórek są również eliminowane z układu limfatycznego. W warunkach in vitro detoksykacja zwiększa jego funkcjonowanie aż czterokrotnie. Skóra staje się bardziej elastyczna i pełna blasku.

- Naciśnij "RF CHANNEL" na ekranie wyświetlacza, aby wybrać VACUUM BIPOLAR RF
- Poniżej znajduje się pole wyboru siły pracy
- Kliknij "+", aby zwiększyć intensywność RF "-", aby zmniejszyć intensywność RF (zaleca się 3-6)
- Naciśnij przycisk "START", aby rozpocząć pracę.

Metoda działania: Użyj sondy, aby masować określoną część skóry okrężnie po nałożeniu kremu wyszczuplającego przez około 30 do 40 minut. Spowoduje to przyspieszenie krążenia krwi w leczonej części skóry i wpłynie na rozkładanie tłuszczu.

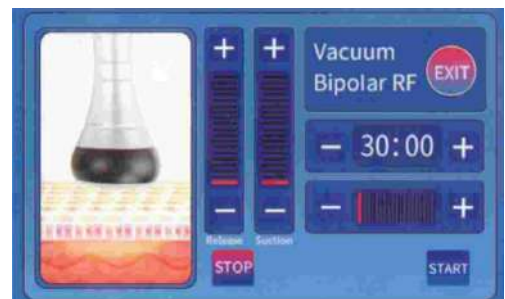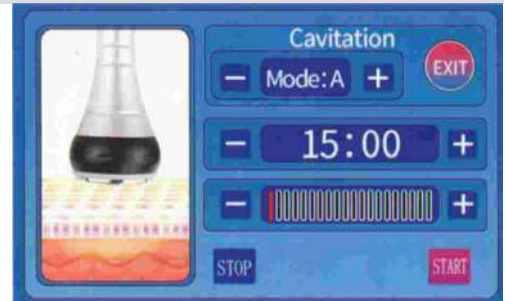

Sprawy wymagające uwagi:

1. Przed zabiegiem należy nałożyć krem wyszczuplający lub żel chłodzący na leczoną część skóry.
2. Trzymać sondę blisko skóry.
3. Ustawić dopasowaną intensywność pracy.
4. Nie napromieniowywać gałki ocznej bezpośrednio kolorowym światłem.
5. Pracować przez 15-20 minut, wykonując głównie ruchy spiralne.

GŁOWICA TRIPOLARNA DO TWARZY (TRIPOLAR RF)

Technologia ta wykorzystuje mikroprądy do pobudzania energii komórkowej skóry, co prowadzi do aktywacji procesów wewnątrzkomórkowych, kluczowych dla młodego wyglądu skóry. Mikroprądy te stymulują komórki skóry do zwiększonej produkcji kolagenu przez fibroblasty oraz poprawiają elastyczność skóry, co jest istotne w walce ze starzeniem. Dodatkowo, przez zastosowanie mikroprądów, dochodzi do stymulacji napięcia mięśniowego, co przyczynia się do redukcji i stopniowego wygładzania zmarszczek. Regularne stosowanie tej technologii może zapobiegać procesom starzenia się skóry, przywracając jej elastyczność i ogólnie poprawiając wygląd twarzy. To holistyczne podejście do odmładzania skóry łączy terapie na poziomie komórkowym i mięśniowym, oferując efektywną metodę na zachowanie młodego wyglądu.

- Naciśnij "-" "+", aby dostosować czas
- Poniżej znajduje się pole wyboru siły pracy
- Kliknij "+", aby zwiększyć intensywność RF "-", aby zmniejszyć intensywność RF (zaleca się 3-6)
- Naciśnij na "START", aby rozpocząć.

Metoda działania: Rozprowadź żel lub esencję wygładzającą zmarszczki na leczonych pozycjach (generalnie 20-30g przy każdym użyciu), działaj z głowicą RF przez 15-20 minut, spiralnym ruchem na twarzy i wokół oczu.

GŁOWICA KORPUSU SEXTUPOLE (RF BODY)


Dzięki zaawansowanej technologii RF, urządzenie może bezpośrednio dotrzeć do głęboko położonej warstwy tłuszczu dzięki zdolnościom pozycjonowania RF. W stanie szybkiej aktywności, tkanka tłuszczowa może generować ciepło, zwiększając temperaturę i usunąć nadmiar tłuszczu i toksyn z organizmu poprzez gruczoł potowy, krążenie enterohepatyczne i limfę. Ostatecznie osiągając efekt rozpuszczania tłuszczu. Z technologią kontrolowania głębokości, inkrustowane cząstki diamentu o różnych rozmiarach mogą pocierać skórę wzdłuż, dostosowując siłę ssania za pomocą kontaktu z silnym podciśnieniem, aby bezpośrednio usuwać gruby tłuszcz. Efekty są bardzo oczywiste: wzmocnienie krążenia krwi, przyspieszenie rozkładu tłuszczu, usuwanie cellulitu, skuteczna poprawa stanu tkanki tłuszczowej, usuwanie uporczywego tłuszczu i poprawa warunków wystarczającego wchłaniania produktów dietetycznych.

- Naciśnij "-" "+", aby dostosować czas
- Poniżej znajduje się pole wyboru siły pracy
- Kliknij "+", aby zwiększyć intensywność RF "-", aby zmniejszyć intensywność RF
- Naciśnij na "START", aby rozpocząć.

Metoda działania: Nałóż żel na głowicę, wyceluj w obszar do odchudzania i działaj techniką przeciągania (przeciągnij obszary tłuszczowe do miejsca odchudzania) przez około 20 minut.

Sprawy wymagające uwagi:

1. Przed zabiegiem należy nałożyć krem wyszczuplający lub żel chłodzący na leczoną część skóry.
2. Rozpocznij od niskiej mocy. Sugerujemy, aby przetestować poziom energii do użycia na plecach klientów przed użyciem na leczonych obszarach.
3. Nie używaj olejku eterycznego.
4. Podczas prac, rozpocząć przeciąganie dopiero po przyłożeniu głowicy podciśnieniowej do skóry.
5. Wyłączyć sondę aparatu, gdy nie jest on używany.

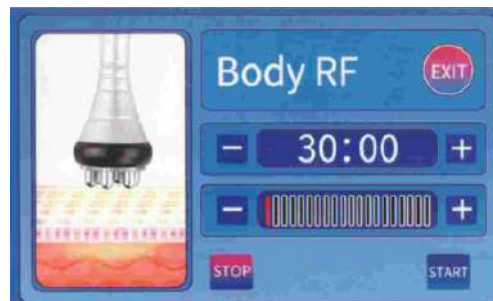

PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW

Schemat działania głowicy ULTRADŹWIKOWEJ 40KHZ (KAWITACJA)

1. Masuj tłuszcz na udzie okrężnymi ruchami.

Schemat działania głowicy KORPUSU SEXTUPOLE (RF BODY) do ciała

1. Pielęgnacja talii i brzucha (25 minut, 2-3 dni)
2. Masaż pępka od centrum stopniowo rozszerzając zakres
3. Masaż pod piersiami, obu stron brzucha i poniżej pępka (w formacji diamentu) od wewnątrz do zewnątrz w kółko.
4. Masaż skoncentrowany na tłuszczu z 4 kierunków, w stronę pępka
5. Masaż od wewnętrznego żebra do zewnętrznej krawędzi ruchami okrężnymi.
6. Masaż od końca miednicy do pachwiny ruchami okrężnymi.
7. Masaż tam i z powrotem od wewnętrznego żebra do zewnętrznej krawędzi w linii prostej.
8. Pielęgnacja bioder i dolnej części ciała (30 minut, 2-3 dni)
9. Pielęgnacja od bioder do pachwiny po okręgu lub w linii prostej. Powtórz masowanie od wewnętrznej do zewnętrznej krawędzi.

Schemat działania głowicy TRIPOLARNEJ do twarzy.

1. Masuj środek żuchwy w kółko, aby wytworzyć głębokie ciepło.
2. Dolną szczękę masujemy w liniach prostych.
3. Masaż strefy trójkątnej po obu stronach twarzy ruchami okrężnymi.
4. Masuj w liniach od żuchwy, do kąta ust, do ucha.

NIEZALECANE DLA

1. Kobiety w ciąży lub w okresie menstruacji.
2. Epileptyków
3. Pacjentów z chorobą nowotworową.
4. Pacjentów, których rany po operacji nie zagoiły się.
5. Pacjentów z ostrymi stanami zapalnymi lub epidemicznymi.
6. Pacjentów z chorobami serca lub ze stymulatorem serca.
7. Pacjentów z chorobami nerek (kamica żółciowa).
8. Pacjentów z osadzonym przedmiotem metalowym lub żelazem krzemionkowym.
9. Pacjentów w trakcie miesiączki, podczas tabletek antykoncepcyjnej, lub poddanych operacji brzucha.
10. Pacjentów z nadwrażliwością genetyczną.

UWAGA

1. Należy pamiętać o użyciu specjalnego żelu do ultradźwięków.
2. Obchodź się z głowicami ostrożnie, unikaj uderzeń.
3. Użyj i przygotuj wystarczającą ilość żelu, aby uniknąć przegrzania głowic.
4. Nie używaj zbyt długo w jednym miejscu, unikaj kości.


5. Nie używaj środków do dezynfekcji, zamiast tego użyj mokrej bawełny lub suchego ręcznika.
6. Upewnij się, że zasilacz jest dobrze podłączony.
7. Jeśli maszyna nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją wyłączyć i odłączyć zasilanie.
8. Operatorzy i pacjenci nie powinni nosić żadnej metalowej biżuterii ani przedmiotów.
9. Maszyna powinna być wyłączana po godzinie ciągłej pracy na około 10 minut.
10. Podczas zabiegu, należy pamiętać, aby nie korzystać z innych zabiegów.

SCHEMAT PANELU KONTROLNEGO



Wybierz odpowiednią opcję i zainstaluj odpowiedni uchwyt, aby przejść do interfejsu obsługi

- A) Uchwyt heksapolowy o częstotliwości radiowej
- B) Uchwyt kwadrupolowy RF
- C) Regulacja podciśnienia
- D) Regulacja podciśnienia
- E) Trójstronny uchwyt twarzowy
- F) Uchwyt ultradźwiękowy 40Khz
- G) Wyłącznik
- H) Wejście zasilające

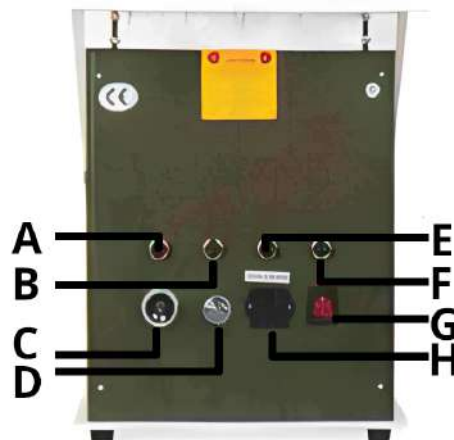

PAKIET ZAWIERA

- 1x Tripolarny głowica
- 1x Czeropolowa głowica
- 1x Heksapolowy głowica
- 1x Ultradźwiękowa 40Khz głowica
- 1x Bipolarna RF głowica
- 1x Uchwyt
- 1x Kabel zasilający
- 1x Gąbka filtracyjna

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Prawidłowa utylizacja tego produktu ten znak oznacza, że produkt nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, prosimy o odpowiedzialny recykling celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych.

KONSERWACJA I NAPRAWA

Nie zaleca się naprawy sprzętu na własną rękę. Każdorazowo należy skontaktować się z producentem i poddać towar ocenie i ewentualnej naprawie wykwalifikowanej osobie.

GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi 1 rok w przypadku zakupu produktu przez przedsiębiorcę, 2 lata jeśli sprzęt zakupiony został przez osobę prywatną. W przypadku pytań lub problemów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

KONTAKT

Enzo Polska
 ul. Anny Jagiellonki 24A 44-109 Gliwice
 Telefon: +48 32 555 04 75
 E-mail: sklep@enzopolska.pl
 Godziny pracy:
 • Pon – czw: 7-15
 • Piątek: 7-14

Wadliwe urządzenia elektroniczne nie należą do zwykłych odpadów domowych. Prosimy o ich oddanie w wyznaczonych punktach zbiórki odpadów elektronicznych. Dla informacji o lokalizacjach i przepisach, zalecamy kontakt z lokalnymi instytucjami. Nasz produkt jest zgodny z europejskimi dyrektywami dla produktów medycznych (CE 0124), co gwarantuje jego bezpieczeństwo i jakość.

