



RENA Spółdzielnia

Al. T. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
tel. 17 853 79 14, mobile: 696 806 986
mail: ortohurt@rena.rzeszow.pl www.rena.rzeszow.pl



Pomoce przeciwodleżynowe

MATERAC TYPU GOFFER



ROZMIAR	REF 107	REF 107/1	REF 107/2
Długość w cm	200	200	200
Szerokość w cm	90	90	90
Wysokość w cm	15	12	10

Numer kat. REF 107, 107/1, 107/2

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wskazania: Specjalna konstrukcja materaca w postaci wcięć powoduje ciągły przepływ powietrza między ciałem, a materacem chłodząc i zapobiegając powstawaniu odleżyn. Zastosowanie pianki o odpowiedniej sprężystości sprawia, iż podczas leżenia materac dopasowuje się automatycznie i indywidualnie do leżącego, równomiernie rozkładając ciężar ciała, zachowując naturalne krzywizny kręgosłupa. Nie upośledza funkcji oddechowej, krążeniowej i trawiennej. Bawełniany pokrowiec zasuwany na zamek, czyni go dodatkowo łatwiejszym w utrzymaniu czystości. Materac należy ułożyć na łóżku i nakryć go prześcieradłem. Zaleca się unikać tworzyw sztucznych w bieliznie pościelowej i osobistej. Materac jest przedmiotem osobistego użytku.

Przeciwwskazania: Brak przeciwwskazań.

Użytkowanie: Stosowany do profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego oraz narządów ruchu.

Sposób czyszczenia i konserwacji: Pokrowiec po wyjęciu wkładu piankowego prać w delikatnym środku piorącym w temperaturze ok. 40°C, dobrze wypłukać. W żadnym wypadku nie można suszyć pokrowca przy ogniu, na piecu lub na kaloryferach, ponieważ nastąpią odkształcenia, a tym samym zniszczenie pokrowca. Nie prać chemicznie, nie chlorować. Często wietrzyć w słoneczne dni. Nie należy dopuszczać do silnego zabrudzenia produktu.

Przechowywanie: Przechowywać w pomieszczeniu suchym, temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła, najlepiej w fabrycznym opakowaniu.



UWAGI:

CHRONIĆ przed przenikaniem nadmiernej wilgoci i wszelkich płynów ustrojowych do wnętrza wyrobu.

NIE WOLNO doprowadzać do bezpośredniego kontaktu ze środkami żrącymi i oparami chemicznymi.

NIEDOPUSZCZALNE są samowolne przeróbki, co z reguły pogarsza właściwości użytkowe. Napraw, drobnych uszkodzeń, jak rozprucia i rozdarcia, przetarcia tkaniny, czy obszycia, użytkownik może dokonywać we własnym zakresie. W przypadku poważniejszych uszkodzeń należy oddać wyrób do naprawy lub wymienić na nowy.

NIE NALEŻY zaklejać ewentualnych pęknięć na perforacji pianki.

WYRÓB JEST PRZEZNACZONY TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jeśli występują działania niepożądane np.: alergia, ból – skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia.

Warunki reklamacji: Reklamacje wyrobu przyjmowane są za okazaniem dowodu sprzedaży. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte, powstałe z winy producenta. Produkt zgłoszony do reklamacji powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym przyjętym w handlu.

Reklamacji nie podlegają: Uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia, wady powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków użytkowania lub sposobu czyszczenia i konserwacji, uszkodzenia mechaniczne (otarcia, przetarcia), odbarwienia pokrowca, wygoda i komfort użytkowania.



Data produkcji:

LOT

40



Data instrukcji: 16 stycznia 2023 rok – wersja nr 3