

NebuCare 2.0 Secure – nowa generacja cichej nebulizacji

HelpMedi NebuCare 2.0 Secure to mobilny, bezprzewodowy i ultracichy nebulizator siateczkowy, który wspiera leczenie infekcji i alergii oddechowych u dzieci i dorosłych. W komplecie – aż 40 ampułek innowacyjnej soli fizjologicznej Katarrek Secure+, dostosowanej do nebulizacji i pielęgnacji dzieci. W zestawie znajdziesz też maseczkę dla dziecka, dla dorosłego i ustnik. To kompletny zestaw do cichej nebulizacji w domu i w podróży.

Ultracicha praca – przyjazny dla niemowląt i dzieci, które boja się głośnych dźwięków. Teraz inhalacja możliwa będzie także w nocy.

Mobilny i bez kabli – nebulizator jest lekki, mały i bezprzewodowy. Możesz go zabrać wszędzie, do babci, na spacer czy na wakacje.

Kompletny zestaw – to nie tylko nebulizator siateczkowy ale też 2 rodzaje maseczek, ustnik i zestaw aż 40 ampułek soli fizjologicznej w jednym opakowaniu.



Zobacz, jak to działa – cicha mgiełka!

Siateczka z mikrootworami, drgając rozбивa lek na cząsteczki o średnicy 1–4µm, które trafiają precyzyjnie w głąb dróg oddechowych. To właśnie tam rozwija się infekcja – dlatego inhalacje są bardziej efektywne, niż klasyczne podawanie leków w tabletkach. Jest to też znacznie wygodniejsza metoda dla małych dzieci i osób starszych, które mogą mieć problem z zażyciem tabletki.

Dlaczego NebuCare 2.0 Secure to dobry wybór?

Bez kabli

Wygodny, przenośny i leciutki. Idealny dla całej rodziny.

Wygoda podania leku

Lek trafia tam gdzie powinien – wprost do układu oddechowego.

Kompletny zestaw

Maseczka dla dzieci, dorosłych a także ustnik – dopasowane dla całej rodziny.



Swobodny oddech. Ulga i spokój w dzień i w nocy.

Wyobraź sobie swobodny oddech swojego dziecka, podczas przeziębienia, kaszlu czy kataru w dzień i w nocy! Zestaw NebuCare 2.0 Secure z nowym nebulizatorem siateczkowym NE-03C pomaga łagodzić objawy infekcji i alergii, zapewniając Twojemu maluchowi spokojny oddech i powrót do zdrowia. Zyskasz pewność, że robisz wszystko, aby chronić swoich bliskich.



Ten kompletny zestaw, wspierający zdrowie całej rodziny, łączy trzy cechy, które rodzice cenią najbardziej: cichą pracę, mobilność i wysoką skuteczność. W zestawie znajdziesz także 40 ampulek innowacyjnej soli fizjologicznej Katarek Secure+, które są łatwe w aplikacji, zapewniając komfortowe nawilżanie i oczyszczanie dróg oddechowych.

Dlaczego warto wybrać zestaw NebuCare 2.0 Secure?

Niezwykłe cicha praca: Nebulizator NebuCare 2.0 pracuje ciszej niż 50dB! Ledwo go usłyszysz.

Cząsteczki 1-4 mikrometrów: Technologia nebulizacji siateczkowej pozwala na wytworzenie cząteczek leku, które trafiają głęboko do układu oddechowego.

Łatwość użycia: Wystarczy wlać lek, lub sól fizjologiczna i nacisnąć przycisk włącznika – prosto i wygodnie.

Kontrola szybkości: Nebulizator posiada 2 poziomy szybkości I $\geq 0,25$ ml/min i II $\geq 0,15$ ml/min.

Pełna mobilność: Jest niewielki i lekki co umożliwia łatwe przenoszenie i użycie w każdych warunkach – w domu, na wycieczce, czy w podróży.

Wszechstronność: Możesz używać go z najpopularniejszymi lekami do nebulizacji i z solą fizjologiczną, leków używaj pod nadzorem lekarza.

Łatwe ładowanie: Nie musisz się martwić wymianą baterii – dzięki kabelkowi USB i wbudowanemu akumulatorkowi naładujesz go nawet z ładowarki samochodowej.





Kompletny zestaw do nebulizacji

Zastosowanie NebuCare 2.0 Secure

przeziębienia i katar,
kaszel i zapalenie oskrzeli,
astma i alergie oddechowe,
profilaktyczne nawilżanie dróg oddechowych.

W pudełku znajdziesz:

nebulizator siateczkowy NE-03C,
2 maseczki (dla dziecka i dorosłego),
ustnik,

kabel do ładowania,

40 ampułek soli fizjologicznej Katarek Secure+ o zaokrąglonych ampułkach – odpowiednich nawet dla noworodków.

Sól fizjologiczna Katarek Secure+

NebuCare 2.0 Secure to nie tylko nebulizator, ale także innowacyjna sól fizjologiczna Katarek Secure+ o zwiększonym profilu bezpieczeństwa użycia (innowacyjny okrągły aplikator).

W zestawie znajduje się powiększony zapas – aż 40 ampułek soli fizjologicznej.

higienizacji nosa, oczyszczania oczu czy przemywania ran.



Zwiększony profil bezpieczeństwa

Roztwór izotoniczny 0,9% NaCl stanowi idealną bazę do nebulizacji – może być stosowany samodzielnie, w celu nawilżenia i oczyszczenia dróg oddechowych, lub jako rozpuszczalnik do leków

podawanych w formie inhalacji. Stosowanie soli fizjologicznej ułatwia usuwanie wydzieliny, wspiera regenerację śluzówki i zwiększa skuteczność terapii oddechowych u dzieci i dorosłych.

Unikalna konstrukcja ampułki z okrągłym, gładkim aplikatorem zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki temu sól Katarek Secure+ można bez obaw stosować także w dodatkowych zabiegach pielęgnacyjnych – do higienizacji nosa, oczyszczania oczu czy przemywania ran.



Maseczki dla dzieci i dorosłych

W zestawie znajdziesz dwie maseczki – mniejszą i większą – które łatwo dopasujesz do wieku dziecka, a także uniwersalny ustnik, który jest zalecany od 3 roku życia. Dzięki temu urządzenie może być bez problemu używane również przez starsze dzieci i dorosłych.

Maseczka powinna szczelnie przylegać do twarzy, obejmując nos i usta. Tylko wtedy nebulizacja będzie skuteczna – minimalizuje to straty leku i chroni twarz oraz oczy dziecka przed kontaktem z preparatem.

Pamiętaj, aby nie zaklejać otworów w maseczce – odpowiadają one za prawidłowy przepływ powietrza podczas wdechu i wydechu.

Wygląd maseczek w zestawie może różnić się od przedstawionych na zdjęciach i opakowaniach w zależności od partii produkcyjnej.

Obsługa nebulizatora NebuCare 2.0 Secure

Ładowanie i czas pracy

Standardowa inhalacja u dziecka trwa zwykle od 10 do 20 minut. Po każdej nebulizacji należy dodatkowo uruchomić tryb czyszczenia, który trwa 10 minut. W pełni naładowany nebulizator działa na akumulatorze przez około 1 godzinę, co pozwala na wykonanie:

2 inhalacji po 20 minut (każda z czyszczeniem),

2 inhalacji po 15 minut (każda z czyszczeniem),

3 inhalacji po 10 minut (każda z czyszczeniem).

Po tym czasie urządzenie wymaga ponownego ładowania, które trwa około 1 godziny.

Etapy obsługi nebulizatora w czasie nebulizacji

Przygotowanie:

1. Wyjmij, wyczyść i zdezynfekuj pojemnik na lek przed użyciem.
2. Nalewanie leku: Otwórz pokrywę pojemnika i nalej do niego lek.
3. Zamknij pokrywę pojemnika.
4. Zainstaluj pojemnik na lek na głównej części urządzenia.
5. Zainstaluj maskę.

Uruchamianie

Aby włączyć urządzenie, naciśnij krótko przycisk WŁ./WYŁ. (ok. 1 sekunda). Po chwili wskaźnik zaświeci się na zielono, a nebulizator rozpocznie rozpylanie leku.

Zmiana trybu i wyłączanie

Aby przełączyć nebulizator w tryb 2, naciśnij krótko przycisk WŁ./WYŁ. (1 sekunda).

Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk WŁ./WYŁ. do momentu, aż zielona dioda zgaśnie.

Uwaga

Dłuższe przytrzymanie przycisku WŁ./WYŁ. uruchamia tryb czyszczenia – pulsacyjne wyrzuty mgiełki z pulsującą zieloną diodą.

Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia

Nebulizator należy czyścić i dezynfekować po każdym użyciu, zgodnie z poniższą instrukcją. Niedokładne czyszczenie może pogorszyć działanie urządzenia – zaschnięty lub zakrzepły lek utrudnia prawidłową nebulizację.

Instrukcja krok po kroku:

1. Zdejmij akcesoria (maseczkę lub ustnik) z głównej części urządzenia.
2. Otwórz pokrywę pojemnika na lek i usuń jego pozostałości.
3. Wlej do pojemnika 75% roztwór etanolu, zamknij pokrywę i odczekaj co najmniej 10 minut. Dla lepszego efektu dezynfekcji możesz delikatnie wstrząsnąć pojemnikiem.
4. Usuń roztwór dezynfekujący, a następnie napełnij pojemnik czystą, przegotowaną i ostudzoną wodą. Uruchom tryb czyszczenia poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku WŁ./WYŁ..
5. Po zakończeniu czyszczenia usuń wodę z pojemnika i pozostaw go z otwartą pokrywą do całkowitego wyschnięcia.
6. Powierzchnię obudowy urządzenia przetrzyj ściereczką nasączoną 75% alkoholem klasy medycznej, a następnie wysusz na powietrzu lub wytrzyj czystą, miękką ściereczką.

Dezynfekcja i czyszczenie akcesoriów:

1. Zdejmij akcesoria (maseczkę lub ustnik) z głównej części urządzenia.
2. Zanurz akcesoria w pojemniku z roztworem etanolu i zakryj pojemnik. Stężenie roztworu etanol powinno wynosić 75%, a czas namaczania 10 minut lub dłużej.
3. Wyjmij akcesoria i wyczyść je czystą wodą
4. Po zakończeniu czyszczenia przy użyciu nowej gazy medycznej usuń pozostałość wody, a następnie dobrze wysusz.

Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków, nebulizator, pojemnik na lek i akcesoria umieść w suchym i czystym miejscu na czas przechowywania.

Spirytus przeznaczony do czyszczenia głowicy musi być spirytusem czystym, nieskażonym (czysty roztwór wodny alkoholu etylowego) bez dodatków: chlorheksydyny, glikolu, barwników, substancji zapachowych, olejków eterycznych i innych dodatków, które mogą uszkodzić siateczkę nebulizatora.

UWAGA: Nie wolno dezynfekować pojemnika na lek ani akcesoriów we wrzącej wodzie, ponieważ grozi to zniekształceniem części. Nie suszyć części w mikrofalówce. Części zdezynfekowane przy użyciu środka dezynfekującego należy dokładnie wyczyścić, ponieważ pozostałość tego środka może spowodować pogorszenie stanu zdrowia.

WAŻNE:

Sole fizjologiczne znajdujące się w zestawie są podstawą nebulizacji. Są one także bazą do rozcieńczania leków. Rodzaj leku używanego do nebulizacji zależy od wskazań lekarza. Pamiętaj, by nie stosować leków samodzielnie. Przed podaniem leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

LEKI Z KTÓRYMI NEBUCARE DZIAŁA PRAWIDŁOWO

W ramach testu nebulizatorów Nebucare SOP-01 z dnia 11.06.2021, zostało przeprowadzone badanie pracy kopułki nebulizatorów NebuCare z najczęściej przepisywanymi lekami do nebulizacji. Leki te zostały wybrane na podstawie wywiadu z lekarzem pediatrą przyjmującym na co dzień pacjentów w Szpitalu Rydygiera w Krakowie w przychodni POZ:

Aby sprawdzić z jakimi lekami nebulizator NebuCare 2.0 pracuje prawidłowo a test nie wykazał przeciwwskazań do ich stosowania w urządzeniu, kliknij [TUTAJ](#)

W nebulizatorze NIE MOŻNA stosować:

leków/sterydów o wysokim stężeniu

leków/sterydów o dużej lepkości

leków/sterydów oleistych, olejków eterycznych, zawiesin, lotnych, płynnych leków

solii fizjologicznej z dodatkiem kwasu hialuronowego, np. Nebu-dose Hialuronic, ani innych preparatów z dodatkiem kwasu hialuronowego

solii fizjologicznej z dodatkiem ektoiny, np. Ectodose, ani innych preparatów z dodatkiem ektoiny

Prosimy również o zapoznanie się z instrukcją użycia oraz najważniejszymi zaleceniami dotyczącymi użytkowania zawartymi w ulotce załączonej do urządzenia.

Ważna informacja dla kupujących:

Dziękujemy za zainteresowanie naszym produktem! Zanim zdecydujesz się na zakup, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, wyroby medyczne sprzedawane w zapieczętowanych opakowaniach nie podlegają zwrotowi, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Wynika to z dbałości o Twoje bezpieczeństwo oraz higienę.

Dlatego prosimy o rozważne podejmowanie decyzji zakupowych. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące produktu, chętnie na nie odpowiemy, by pomóc Ci dokonać najlepszego wyboru!

Wyłączenie od prawa odstąpienia w ciągu 14 dni w przypadku zakupu dokonanego na odległość wynika z:

Ustawa o prawach konsumenta

Dz.U.2023.0.2759 t.j. – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Art. 38. prawa konsumenta

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Dane Techniczne i informacje o produkcie HelpMedi NebuCare 2.0 Secure

Nazwa modelu nebulizatora

NE-03C

EAN

5905490818151

Nr jednostek certyfikujących elementy zestawu

CE 0459, CE 0123

funkcje

obsługa za pomocą jednego przycisku

rozpylanie leku

wskaźnik naładowania

wykrywanie niskiego poziomu naładowania baterii

automatyczne wyłączenie w przypadku skończenia się leku

zmiana trybu pracy przez krótkie naciśnięcie przycisku

akumulator

akcesoria

instrukcja w języku polskim

maseczka dla dzieci

maseczka dla dorosłych

ustnik

kabel do ładowania

wymiary

155mm x 172mm x 90mm

rozkład cząsteczek

ilość cząsteczek o średnicy mniejszej niż 5µm: nie mniej niż 60 %

szybkość nebulizacji

≥0,25ml/min

≥0,15ml/min

częstotliwość robocza

110 kHz ± 10%

częstotliwość robocza

akumulator litowy 3, 7V lub zasilacz (DC 5V)

klasyfikacja bezpieczeństwa

kl. II, części typu BF

zastosowanie nebulizatora

Nebulizacja dzieci i dorosłych, lecznicze inhalacje rozpylonego leku przez układ oddechowy.

Zastosowanie soli fizjologicznej

Izotoniczny roztwór soli fizjologicznej 0,9% może być stosowany u niemowląt i dzieci starszych oraz u osób dorosłych w następujący sposób:

- Do higieny nosa: poprzez zakraplanie albo przemywanie suchego lub zatkanego nosa,
- Do higieny oczu: poprzez zakraplanie lub przemywanie,
- Do higieny uszu,
- Do przemywania ran,
- Do inhalacji podczas aerzoloterapii.

przeciwwskazania i zalecenia użytkowania soli fizjologicznej

- Do użytku jednorazowego i indywidualnego.
- Zawartość zużyć od razu po otwarciu. Po użyciu ampułkę należy wyrzucić.
- Nie używać tej samej ampułki do różnych zastosowań.
- Nie używać do iniekcji.
- Nie używać po upływie daty ważności.
- Nie używać w przypadku uszkodzenia ampułki.
- Chronić przed dziećmi.
- Po napoczęciu ampułki nie można wykorzystać jej zawartości powtórnie – środek nie zawiera substancji konserwujących, w związku z czym powtórne użycie mogłoby grozić podaniem środka zanieczyszczonego

Dane o producencie i podmiocie zestawiającym

Producent nebulizatora:

Contec Medical Systems Co., LTD

Podmiot odpowiedzialny (EC REP):

Prolinx GmbH

Producent soli fizjologicznej:

Laboratoire UNITHER Espace Industriel Nord

Podmiot zestawiający:

Duna sp. z o.o.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą