

Dane Techniczne:

PARAMETR:	Model AR-101	Model AR-104
Rama (materiał):	stalowa	aluminiowa
Szerokość siedziska:	50 cm	43 cm
Głębokość siedziska:	37 cm	42 cm
Szerokość deski sedesowej:	35 cm	nie dotyczy
Głębokość deski sedesowej:	37 cm	nie dotyczy
Regulacja wysokości:	40-55 cm	42-52 cm
Grubość po złożeniu (bez pojemnika)	15 cm	15 cm
Pojemność pojemnika sanitarnego:	7 litrów	5 litrów
Waga produktu:	6 kg	4 kg
Maksymalna waga użytkownika:	136 kg	120 kg

SYMBOLE:								
								
Wyrób medyczny	Zapoznaj się z instrukcją	Producent	Wyrób spełnia wymagania UE	Ostrzeżenie	Nr dato / serii	Data produkcji m-c/rok	Nadaje się do recyklingu	Selektywna zbiórka odpadów

KARTA GWARANCYJNA
Do karty należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu

Data sprzedaży	Pieczęć i podpis sprzedawcy
Nr faktury zakupu	
Model / Nr LOT	

- Firma ARMEDICAL Sp. z o.o. 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75 udziela niniejszym 12-miesięcznej gwarancji na produkty objęte niniejszym dokumentem. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Użytkownika. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 - W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia produktu do prawidłowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
 - ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
 - W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu lub wysłać na adres producenta.
 - Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedaży w zakresie elementów zużywalnych w toku normalnej eksploatacji tj. zarysowań, zadrapań elementów plastikowych i gumowych (tj. ścieranie się nasadek gumowych (8), podłokietników z tworzywa (3))
 - Gwarancją nie obejmuje w przypadku stosowania krzesła niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi a także w przypadku przekroczenia przez użytkownika maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta.
 - Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne osoby nieupoważnione napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.
 - Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną.**
 - Reklamację należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego określającego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okolicznościami ujawnienia się wady. W przypadku nie dochowania warunków zgłaszania reklamacji określonych w niniejszej instrukcji wyłącza odpowiedzialność gwaranta.
- Reklamowany wyrób musi być w należyтым stanie higienicznym.



INSTRUKCJA OBSŁUGI
KARTA GWARANCYJNA

KRZESŁO TOALETOWE – SKŁADANE
Model: AR-101
KRZESŁO TOALETOWO – PRYSZNICOWE
ALUMINIOWE – SKŁADANE
Model: AR-104



Model: AR-101



Model: AR-104



ARMEDICAL Sp. z o.o.
al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl





INSTRUKCJA OBSŁUGI - KRZESŁO TOALETOWE (PRYSZNICOWE) – SKŁADANE

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie którym nas obdarzyliście. Dolażyliśmy wszelkich starań aby nasz sprzęt spełniał Państwa oczekiwania, mamy nadzieję, że będzie znacznym ułatwieniem podczas codziennych czynności toaletowych. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, która jednocześnie stanowi kartę gwarancyjną.

Przeznaczenie wyrobu:

Krzesło toaletowe, toaletowo-prysznicowe przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób które mają problem z korzystaniem ze standardowej muszli klozetowej. W funkcji toaletowej umożliwia załatwienie potrzeb fizjologicznych bezkonieczności wstawania z krzesła. Jako krzesło prysznicowe (dot. AR-104) dedykowane jest osobom, dla których standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabinie prysznicowej. Krzesło toaletowe (dot. AR-101) może być wykorzystywane również **jako poręcz ułatwiające wstawanie** ze standardowej muszli klozetowej (po wyjęciu pojemnika sanitarnego (4) i złożeniu deski sedesowej (5) oraz pokrywy deski sedesowej (2)).



Przeciwwskazania:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej, brak stabilizacji tułowia. Zaburzenia koordynacji ruchowej, równowagi, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa. Osoby ograniczone intelektualnie nie powinny stosować wyrób bez nadzoru opiekuna.

Dane użytkowe:

Maksymalny ciężar pacjenta zapewniający bezpieczne korzystanie z wyrobu – **[AR-101 - 136 kg] [AR-104 - 120 kg]**



Uwagi i ostrzeżenia:

W celu uniknięcia wypadku prosimy o:

1. Sprawdzenie czy wszystkie rurki są proste, nie nadłamane (np. w transporcie)
2. Sprawdzenie czy wszystkie elementy plastikowe nie posiadają uszkodzeń np. pęknięć
3. Sprawdzenie czy wszystkie nogi krzesła ustawione są na tej samej wysokości
4. Sprawdzenie czy na wszystkich nogach znajdują się nakładki gumowe oraz czy wszystkie są prawidłowo założone
5. Nie rozkładanie krzesła w miejscach, gdzie może być ślisko (rozlana ciecz, lód)



W celu uniknięcia urazów:

1. Krzesło toaletowe (AR-101) powinno być całkowicie rozłożone (zatrzaski blokujące w poprzeczkach muszą „wskoczyć” we właściwe dla nich otwory). Dot. AR-104 - zapadki zabezpieczające muszą być całkowicie opuszczone, wciśnięte na tuleje blokujące. Tuleje muszą przylegać całą powierzchnią do wycięć zapadek blokujących
2. Niezbędne jest każdorazowe sprawdzenie stanu technicznego, stabilności wyrobu przed użyciem (sprawdzenie wszystkich elementów mocujących, rurek ramy wyrobu, nasadek gumowych oraz deski sedesowej/siedziska)
3. Wszystkie nogi krzesła muszą być ustawione na tej samej wysokości
4. Używać tylko na płaskim, twardym podłożu uniemożliwiającym przesunięcie się krzesła podczas siadania
5. Zachować szczególną ostrożność na mokrej lub śliskiej powierzchni.
6. Zabrania się gwałtownego siadania na krzesło (m.in. wskakiwania)
7. Zabrania się przenoszenia krzesła wraz z użytkownikiem
8. Zabrania się stawiania obuwia na podłokietnikach, desce sedesowej, oraz którymkolwiek elemencie wyrobu.
9. Nie wolno przeciągać wyrobu, przekraczać maksymalnego obciążenia określonego przez producenta.
10. Należy siadać na krzesło (AR-101) tylko przy opuszczonej desce sedesowej i otwartej (podniesionej) pokrywie deski sedesowej. Siadać tylko i wyłącznie przy opuszczonym siedzisku z otworem – (dot. AR-104)

Sposób konserwacji:

Każdorazowo po dokonaniu czynności toaletowych wyrób należy dokładnie umyć i wypłukać czystą wodą (AR-104 - nie pozostawiać na wyrobie mydła, szamponu, żelu do kąpieli itp.) a następnie dokładnie osuszyć delikatną szmatką. Zabrania się stosowania mocnych detergentów, benzyny oraz rozpuszczalników. Brak przestrzegania zasad higieny będzie przyczyną utraty parametrów użytkowych i estetycznych a tym samym utraty gwarancji. Nie wolno używać środków ściernych! Nasadki na nogi (8) są elementem zużywalnym i muszą być regularnie wymieniane na nowe. **Pamiętajmy! Wyrób jest krzesłem toaletowym tak więc należy szczególnie przestrzegać zasad higieny.**

Rozwiązywanie problemów:

W przypadku wystąpienia problemów prosimy przeanalizować niniejszy rozdział. Jeśli to nie pomoże prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub serwisem. Samodzielne naprawianie krzesła jest ZABRONIONE!!! Grozi to wypadkiem.

I. Krzesło nie jest stabilne.

- a. Czy wszystkie nogi krzesła są na tej samej wysokości? Jeśli nie, należy je prawidłowo ustawić.
- b. Czy wszystkie nogi posiadają nasadki gumowe (8)? Jeśli nie, należy je założyć.
- c. Czy wszystkie nasadki gumowe (8) są prawidłowo założone? Jeśli nie, należy dobrze je nasunąć.
- d. Czy krzesło jest całkowicie rozłożone? Jeśli nie, należy zamocować poprzeczne belki w taki sposób aby zatrzaski blokujące „wskoczyły” we właściwe dla nich otwory – dot. AR-101. Krzesło musi być całkowicie rozłożone, zapadki zabezpieczające muszą być całkowicie opuszczone, wciśnięte na tuleje blokujące – AR-104
- e. Czy deska sedesowa jest solidnie przymocowana (5)? Jeśli nie, należy dokładnie ją docisnąć aby stabilnie została przytwierdzona do ramy krzesła – dot. AR-101
- f. Czy wszystkie elementy ramy są ze sobą stabilnie połączone? Jeśli nie, należy skontaktować się z punktem sprzedaży. **NIE WOLNO UŻYWAĆ KRZESŁA TOALETOWEGO!!!**

Przygotowanie do użycia

1. Wyjąć krzesło z opakowania kartonowego lub foliowego.
2. W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan techniczny wyrobu zgodnie z pkt. **Uwagi i ostrzeżenia.**
3. Dot. AR-101 - chwycić oburącz za podłokietniki z tworzywa (3) i przesunąć poręczę na zewnątrz aż do rozłożenia krzesła. Zamontować belkę przednią (6) w otwory nóg. Sprawdzić czy zatrzaski blokujące „wskoczyły” we właściwe dla nich otwory. Zamontować belkę tylną (1) stanowiącą podparcie pokrywy deski sedesowej (2). Sprawdzić czy zatrzaski blokujące „wskoczyły” we właściwe dla nich otwory. Włożyć pojemnik sanitarny (4) a następnie opuścić deskę sedesową (zgodnie z powyższym rysunkiem). Dot. AR-104 – chwycić oburącz nogi przednie i tylne ramy (2), rozsunąć do maksymalnego oporu, zabezpieczyć zapadkami zabezpieczającymi (5) (tuleje zabezpieczające muszą znajdować się w wycięciach zapadek zabezpieczających). Włożyć pojemnik sanitarny (4) a następnie opuścić siedzisko (6) (zgodnie z powyższym rysunkiem).
4. Należy dopasować wysokość nóg krzesła do wzrostu użytkownika, w tym celu należy wcisnąć główkę zatrzasku (7) znajdującego się w nodze, co spowoduje zwolnienie blokady. Ustawić poprzez rozsuwanie lub zsuwanie rurki wymaganą wysokość. Główka zatrzasku musi wskoczyć w otwór na żądanej wysokości! Czynność powtórzyć dla wszystkich nóg. Główka zatrzasku we wszystkich nogach musi znajdować się na tej samej wysokości.

ELEMENTY UŻYTKOWE



Ewentualnie w celu uzyskania dokładnych instrukcji dotyczących odpowiedniego użytkowania należy skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub punktem sprzedaży.

Zakończenie użytkowania:

1. Złóż krzesło (AR-101) demontując belki (1) i (6) wciskając zatrzaski blokujące, wyjmij pojemnik sanitarny a następnie przesunij poręczę do środka. Złóż krzesło (AR-104) odblokowując zapadki zabezpieczające (5), a następnie zsuń nogi ramy aluminiowej (2) ku sobie. Krzesło można składać „z” i „bez” pojemnika sanitarnego. W celu wyjęcia pojemnika sanitarnego należy unieść siedzisko w kierunku oparcia.

Czyszczenie i przechowywanie:

1. Postaw krzesło w miejscu gdzie nie będzie narażone na uszkodzenia mechaniczne.
2. W przypadku zabrudzeń zastosuj się do punktu „Sposób konserwacji” niniejszej instrukcji.

Incydenty:

Każdy **poważny** incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Utylizacja:

Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu:

W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU