




RENA Spółdzielnia

Al. T. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
tel. 17 853 79 14, mobile: 696 806 986
mail: ortohurt@rena.rzeszow.pl www.rena.rzeszow.pl



Poduszka do wózka inwalidzkiego

PODUSZKA DO WÓZKA INWALIDZKIEGO Z KANAŁAMI

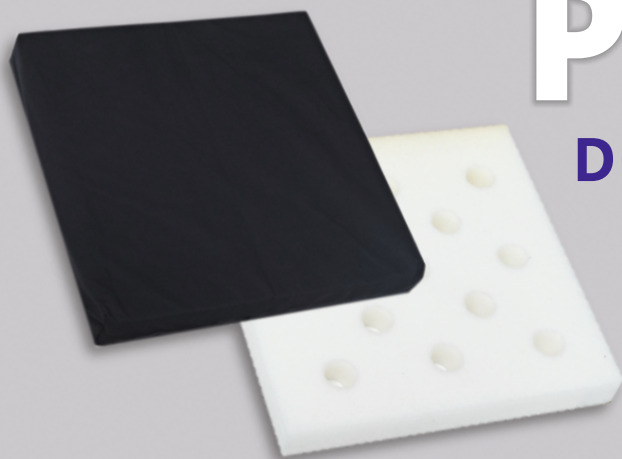

ROZMIAR	
Długość w cm	40
Szerokość w cm	40
Wysokość w cm	5

Numer kat. REF 119

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Zastosowanie: Posiada właściwości zdrowotne i profilaktyczne w zespołach korzeniowych i psychosomatycznych. Rozmieszczenie i odpowiednia wielkość otworów zapewnia „dobry” klimat i swobodny przepływ powietrza w miejscach szczególnie wrażliwych i podatnych na pocenie, a tym samym bardziej podatnych na powstawanie odleżyn. Specjalna konstrukcja poduszki w postaci otworów powoduje ciągły przepływ powietrza między ciałem a poduszką, chłodząc i zapobiegając powstawaniu odleżyn. Pokrowiec wykonany z tkaniny bawełnianej, czyni go łatwiejszym w utrzymaniu czystości.

Przeciwwskazania: Nie stosować wilgotnego wyrobu bezpośrednio w kontakcie ze skórą oraz nie stosować w przypadku reakcji alergicznych skóry.

Użytkowanie: Poduszkę należy ułożyć na siedzisku wózka inwalidzkiego. Zaleca się unikać tworzyw sztucznych w bieliźnie osobistej. Poduszka ta jest przedmiotem osobistego użytku.

Sposób czyszczenia i konserwacji: Pokrowiec po wyjęciu wkładu piankowego, prać w delikatnym środku piorącym w temperaturze ok. 40°C, dobrze wypłukać. W żadnym wypadku nie można suszyć pokrowca przy ogniu, na piecu lub na kaloryferach, ponieważ nastąpią odkształcenia, a tym samym zniszczenie pokrowca. Nie prać chemicznie, nie chlorować. Często wietrzyć w słoneczne dni. Nie należy dopuszczać do silnego zabrudzenia produktu.

Przechowywanie: Przechowywać w pomieszczeniu suchym, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł światła i ciepła, najlepiej w fabrycznym opakowaniu. Długotrwałe oddziaływanie światła słonecznego i intensywne oświetlenie może spowodować odbarwienie (żółknięcie) pianki, z której wykonany jest wkład.



UWAGI:

CHRONIĆ przed przenikaniem nadmiernej wilgoci i wszelkich płynów ustrojowych do wnętrza wyrobu.

NIE WOLNO doprowadzać do bezpośredniego kontaktu ze środkami żrącymi i oparami chemicznymi.

NIEDOPUSZCZALNE są samowolne przeróbki, co z reguły pogarsza właściwości użytkowe. Naprawy drobnych uszkodzeń, jak rozprucia i rozdarcia, przetarcia tkaniny, czy obszycia, użytkownik może dokonywać we własnym zakresie. W przypadku poważniejszych uszkodzeń należy oddać wyrób do naprawy lub wymienić na nowy.

NIE NALEŻY zaklejać ewentualnych pęknięć na perforacji pianki.

WYRÓB JEST PRZEZNACZONY TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i do Urzędu Rejestracji Produktów Medycznych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jeżeli występują działania niepożądane np. alergia, ból - skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

Warunki reklamacji: Reklamacje wyrobu przyjmowane są za okazaniem dowodu sprzedaży. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte, powstałe z winy producenta. Produkt zgłoszony do reklamacji powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym przyjętym w handlu.

Reklamacji nie podlegają:

- uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia,
- wady powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków użytkowania lub sposobu czyszczenia i konserwacji,
- uszkodzenia mechaniczne (otarcia, przetarcia),
- odbarwienia pokrowca,
- wygoda i komfort użytkowania.



Data produkcji:

LOT



Data instrukcji: 16 stycznia 2023 rok – wersja nr 3