

Wyrób medyczny: Orteza stawu kolanowego /skokowego/stopy

Wersja: Stabilizator kolana z regulowanym kątem zgięcia (MEK 8011)

Opis:

- Wyrób wykonany jest z odpornych na zużycie materiałów.
- Wyposażony w metalowe anatomiczne usztywnienia.
- Odpinana konstrukcja pozwala na dopasowanie w przypadku obrzęku.
- Regulowane opaski zapewniają dodatkowe mocowanie stawu.
- Wyposażony w zegar ograniczający wyprost i zgięcie od -10 do 120 stopni (amplituda co 10 stopni).
- Przycisk szybkiej stabilizacji w wybranej pozycji.
- Obejmuje goleń i udo z możliwością dopasowania długości części udowej i goleniowej ortozy.
- Produkt uniwersalny na lewą i prawą nogę.
- Może być stosowany zamiast unieruchamiania gipsowego.
- Wyrób jest wyrobem wielokrotnego użytku. Ze względów higienicznych i medycznych zaleca się stosowanie tylko przez jednego użytkownika. Wyrób nie wymaga sterylizacji przed ponownym użyciem. Porady dotyczące standardowej pielęgnacji opisane są w punkcie 6 instrukcji używania.

Funkcje:

- Metalowe szyny usztywniające z zamkami policentrycznymi umożliwiają ruch w wyznaczonych zakresach lub blokowanie w danej pozycji.

- Wspomaga i stabilizuje aparat więzadłowy stawu kolanowego.

Wskazania do stosowania:

- Skręcenia i inne urazy stawu kolanowego
- Okres pourazowy i pooperacyjny po zerwaniu więzadeł krzyżowych i bocznych stawu kolanowego, stan po rekonstrukcji więzadeł krzyżowych.
- Niestabilność stawu kolanowego.
- Zapobieganie przykurczom w stawie kolanowym dzięki możliwości leczenia czynnościowego.

Przeciwwskazania:

- Reakcje alergiczne, nadwrażliwość, nietolerancja materiału z którego jest wykonany produkt.

Instrukcja obsługi:

1. Ustawić szyny boczne części udowej i piszczelowej na odpowiednią długość.
2. Zapnij mankiety obejmujące udo i podudzie, regulując stopień napięcia za pomocą rzepów.
3. Użyj policentrycznych zamków bocznych, aby wyregulować wymagany zakres ruchu w stawie kolanowym.

Porady dotyczące pielęgnacji:

- Przed praniem zapiąć wszystkie rzepy, zdjąć metalowe konstrukcje.
- Zalecane pranie ręczne w wodzie o temperaturze nieprzekraczającej 30 stopni z użyciem łagodnych detergentów. Nie wybielać, nie gotować.
- Suszyć na płasko, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, nie prasować.

Ostrzeżenia:

- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji

używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.



- W przypadku braku poprawy pomimo stosowania wyrobu medycznego, należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.

Kolor: czarny.

Rozmiar: Uniwersalny.

Data wydania instrukcji używania: 10.2021;
wersja: 01



MEK-ORTO sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 26/13
02-495 Warszawa



Wyjaśnienie zastosowanych symboli:

	Wytwórca
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Ostrzeżenie
	Data produkcji
	Kod UDI
	Zapoznaj się z instrukcją używania
	Wyrób medyczny
	Numer modelu
	Jeden pacjent- wielokrotne użycie
	Oznakowanie zgodności CE

Stabilizator kolana z regulowanym kątem zgięcia (MEK 8011)

