

## pl | Instrukcja stosowania

### **Skład:**

Dziany, szerokooczkowy tiul ze 100 % bawełny, impregnowany hydrofobową (niechłonną wody) maścią (Vaseline w/g Ph. Eur.).

### **Zastosowanie:**

Lomatuell® H ma zastosowanie w miejscach ubytków skóry, Ulcus cruris, Decubitus, w oparzeniach, ranach ciętych i szarpanych.

### **Przeciwwskazania:**

Znana nadwrażliwość na produkt lub jego składniki.

### **Skutki uboczne:**

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić skutki uboczne z grupy chorób alergicznych.

### **Oddziaływania wzajemne:**

Do chwili obecnej niestwierdzono.

### **Dawkowanie:**

Przed nałożeniem należy dokładnie oczyścić ranę. Należy użyć płat Lomatuell® H około 1 cm większy niż rana. W przypadku ran mocno ciekących należy nałożyć opatrunek wysokoabsorbujący (np. Vliwazell®). W innych przypadkach wystarczy opatrunek gazowy lub włókninowy (np. Gazin®, Vliwasoft® Kompresse). Aby wspomóc gojenie i chronić ranę przed zarodnikami i bakteriami można powierzchnię rany zabezpieczyć filmem PU (np. Suprasorb® F). Przy walce z infekcją mocowanie powinno być jedynie materiałami przewiewnymi (np. Curafix® H).

### **Zmiana opatrunku:**

Lomatuell® H powinien być zdjęty po rozpuszczeniu i absorpcji wazeliny. Zwykle trwa to około 1-3 dni.

### **Szczególne wskazania:**

Lomatuell® H nie powinien być przechowywany w temperaturze powyżej 25 °C. Lomatuell® H tiul z maścią jest sterylny tak długo, jak długo opakowanie pozostaje nienaruszone. Nie sterylizować.