



NÁVOD K POUŽITÍ ..... 2



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ.....4



NÁVOD K POUŽITÍ



**PT 0105 Stomický břišní pás „24“**

**PT 0106 Stomický břišní pás „16“**

#### **NÁVOD K POUŽITÍ**

##### **PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ:**

Stomický břišní pás je opakovatelně použitelný zdravotnický prostředek určený pro osoby se stomií k podpoře břišních svalů.

##### **INDIKACE:**

- po operacích břišní dutiny – pás usnadňuje vstávání a pohyb
- z vnějšku podporuje svaly v dolní části břicha a zabraňuje poklesu vnitřních orgánů břišní dutiny

##### **KONTRAINDIKACE:**

- vyčerpání organismu, atrofie přímého břišního svalu okolo stomie
- již existující parastomální kýla

##### **SKLADOVÁNÍ:**

Výrobek skladujte v suché místnosti. Chraňte jej před vysokými teplotami a přímým slunečním zářením.

##### **CÍLOVÁ SKUPINA:**

Výrobek je určen pro osoby, které vykazují příznaky popsané v indikacích.

##### **PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ:**

Výrobek by měl být používán pouze na neporušenou pokožku. Nepoužívejte přímo na rány, poškozenou nebo nemocnou pokožku.

Používání mastí, olejů, krémů a podobných látek může mít negativní vliv na vlastnosti výrobku, snížit jeho trvanlivost a účinnost jeho funkce.

V případě přetrvávající nebo zesilující se bolesti, výskytu alergické reakce, podráždění pokožky nebo jakýchkoli jiných nežádoucích účinků, které souvisejí s používáním výrobku, jej přestaňte používat a poraďte se s lékařem.

Správné použití výrobku může vyžadovat radu odborného zdravotnického personálu.

Z hygienických důvodů a s ohledem na účinnost je výrobek určen k použití pouze jedním pacientem.

Správná volba velikosti je podmínkou správné funkce výrobku. Před každým použitím výrobek zkontrolujte s ohledem na známky opotřebení nebo stárnutí. Optimální účinnost zaručuje pouze nepoškozený výrobek.

Výrobek by neměl být používán nepřetržitě po dobu 24 hodin, pokud lékař nedoporučí jinak.

##### **INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ PŘÍPRAVĚ VÝROBKU:**

Před prvním použitím doporučujeme výrobek vyprat.

**ÚDRŽBA:**

Abyste zabránili zachycení výrobku, zapněte před praním suché zipy.

**ZPŮSOB NASAZOVÁNÍ:**

Odepněte suché zipy. V leže na zádech nasadíte výrobek tak, aby obepínal břicho a bederně-křížovou oblast, přičemž otvor na stomický sáček musí být umístěn v místě, kde se nachází stomie. Zapněte suché zipy. Vyjměte stomický sáček otvorem ve výrobku a zajistěte jej krycím materiálem.

**MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ PT 0105:**

Polyamid 48 %, polypropylen 13 %, polyester 13 %, latex 13 %, bavlna 12 %, elastan 1 %

**MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ PT 0106:**

Polyester 45 %, polyamid 34 %, latex 12 %, bavlna 7 %, elastan 2 %

**Každou důležitou událost, která souvisí s výrobkem, nahlase výrobcí a příslušnému orgánu členskému státu, ve kterém má uživatel nebo pacient trvalé bydliště.**

**PŘIZPŮSOBENÍ VÝROBKU:**

Tabulka velikostí je dostupná na obalu.

**ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK**

**VÝROBCE:**

SIGVARIS S.A.  
ul. Mazowiecka 11/49  
00-052 Varšava, Polsko  
[www.sigvaris.com](http://www.sigvaris.com)



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



**PT 0105 Sztómás haskötő „24”**

**PT 0106 Sztómás haskötő „16”**

#### **RENDELTETÉS:**

A sztómás haskötő egy többször használatos orvosi eszköz, amelyet sztómával élő személyek használnak a hasizmok megtámasztására.

#### **JAVALLATOK:**

- hasi műtétek után – az öv megkönnyíti a felkelést és a mozgást
- kívülről támogatja az alsó hasizmokat, és megakadályozza a hasüreg szerveinek süllyedését

#### **ELLENJAVALLATOK:**

- a szervezet kimerülése, a has egyenes izmának sorvadása a sztóma körül
- már meglévő sztómakörüli sérv

#### **TÁROLÁS:**

A terméket száraz helyiségben kell tárolni. Védni kell a magas hőmérséklettől és a közvetlen napsugárzástól.

#### **CÉLCSOPORT:**

A termék az indikációkban leírt tünetekkel rendelkezőpáciensek számára készült.

#### **ÓVINTÉZKEDÉSEK:**

A terméket csak ép bőrfelületen szabad alkalmazni. Ne használja közvetlenül sebekre, sérült vagy beteg bőrfelületre.

Kenőcsök, olajok, krémek és hasonló anyagok alkalmazása negatívan befolyásolhatja a termék tulajdonságait, csökkentheti annak tartósságát és hatékonyságát.

Amennyiben a fájdalom tartósan fennáll vagy fokozódik, allergiás reakció, bőrirritáció vagy bármilyen egyéb nem kívánt mellékhatás lép fel a termék használata során, az alkalmazást meg kell szakítani, és orvoshoz kell fordulni. A termék megfelelő használata orvosi vagy szakszemélyzeti tanácsadást igényelhet.

Higiéniai okokból és a hatékonyság biztosítása érdekében a termék kizárólag egy beteg által használható. A megfelelő méret kiválasztása elengedhetetlen a termék megfelelő működéséhez.

Minden használat előtt ellenőrizze a terméket kopás vagy előregezés jelei szempontjából. Csak a sértetlen termék garantálja az optimális működést.

A terméket tilos folyamatosan 24 órán keresztül viselni, kivéve, az orvos kifejezetten javaslat esetén.

#### **A TERMÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT:**

Javasolt a terméket az első használat előtt kimosni.

**TISZTÁNTARTÁS:**

Mosás előtt zárja be a tépőzárat, hogy elkerülje a termék beakadását.

**FELHELYEZÉS MÓDJA:**

Nyissa ki a tépőzárat. Háton fekvé helyezze fel a terméket úgy, hogy az a hasat és az ágyéki-keresztcsonti szakaszt körülölelje, és a sztómás zsák számára kialakított nyílás pontosan a sztóma helyére essen. Rögzítse a tépőzárat. Húzza ki a sztómás zsákot a termék nyílásán keresztül, majd rögzítse védőanyaggal.

**ANYAGÖSSZETÉTEL PT 0105:**

Poliamid 48%, Polipropilén 13%, Poliészter 13%, Latex 13%, Pamut 12%, Elastán 1%

**ANYAGÖSSZETÉTEL PT 0106:**

Poliészter 45%, Poliamid 34%, Latex 12%, Pamut 7%, Elastán 2%

**Az eszközzel kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak, valamint azon tagállam illetékes hatóságának, ahol a felhasználó vagy a beteg lakóhellyel rendelkezik.**

**A TERMÉK MÉRETEZÉSE:**

A méret táblázat a csomagoláson található.

Orvostechnikai eszköz

**GYÁRTÓ:**

**SIGVARIS S.A.**

ul. Mazowiecka 11/49

00-052 Varsó, Lengyelország

[www.sigvaris.com](http://www.sigvaris.com)