

Przedłużacz ręki

instrukcja obsługi

PL

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. Przed rozpoczęciem użytkowania należy się zapoznać z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Opis produktu:

- lekki, trwały materiał
- miękkie końcówki chwytaka
- ergonomiczny kształt uchwytu
- zajmuje niewiele miejsca po złożeniu
- możliwość zablokowania chwytaka

SPOSÓB UŻYCIA:

Nadaje się zarówno do użytku domowego, jak i biurowego. Mechaniczny chwytak wydłuża zasięg ręki o 80 cm. Gumowe końcówki zapewniają delikatny oraz bezpieczny chwyt. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt posiada funkcję blokowania chwytaka. Zwykle ściśnięcie palców umożliwia złapanie wybranego przedmiotu. Aby chwycić przedmiot naciśnij spust dźwigni, a następnie przesun blokadę z boku rączki do przodu. Aby zwolnić chwyt naciśnij spust dźwigni, a następnie przesun blokadę do tyłu.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:

Wejście w kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi i agresywnymi środkami czyszczącymi może doprowadzić do uszkodzenia produktu. Po użyciu wystarczy przetrzeć produkt wilgotną szmatką i wysuszyć. Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu.

Ochrona środowiska naturalnego

Po upływie czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.