

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Krzesło toaletowe /

Krzesło toaletowe na kółkach

Kod produktu: **TGR-R KT 023B / TGR-R KT 023C**




1. Wykonanie

Krzesło toaletowe wykonane jest ze stalowej, malowanej proszkowo ramy. Model **TGR-R KT 023B** posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami, natomiast model **TGR-R KT 023C** posiada nóżki zakończone kółkami, z czego tylne wyposażone są w hamulec. Krzesło posiada możliwość złożenia, wyposażone jest w deskę sedesową z klapą oraz łatwo wyciągany plastikowy pojemnik toaletowy z pokrywą. Łatwe składanie i regulacja pozwala na dostosowanie do potrzeb pacjenta, a boczne podłokietniki wspomagają stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

Elementy krzesła toaletowego:

- a. podłokietnik
- b. deska sedesowa
- c. pojemnik toaletowy
- d. regulacja wysokości
- e. nasadki antypoślizgowe
- f. kółka (tylne z hamulcem)

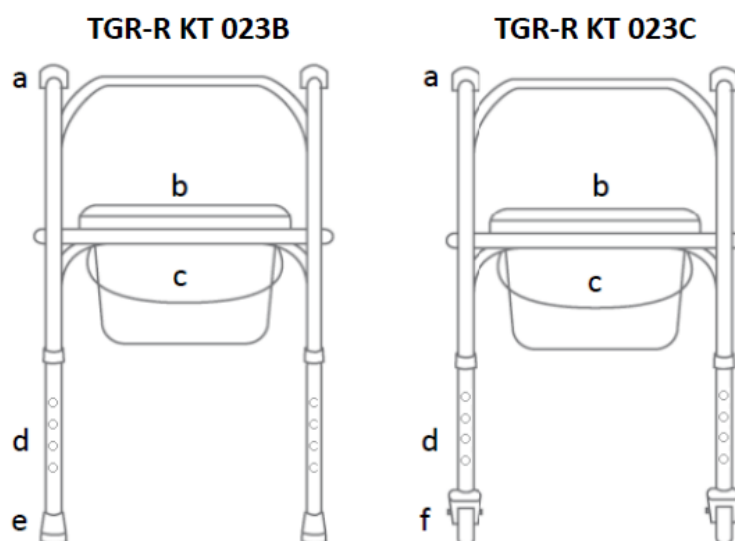

2. Zastosowanie

Krzesło toaletowe jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonanie czynności fizjologicznych. Zalecane jest dla osób, mających problemy z samodzielnym poruszaniem się, z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi oraz dla osób, które utraciły zdolność samodzielnego siadania i wstawania. Krzesło pełni funkcję toaletową dzięki wyposażeniu w pojemnik toaletowy pod siedziskiem. Ułatwia przeprowadzenie czynności fizjologicznych i pielęgnacyjnych

użytkownika. Kółka transportowe umożliwiają wygodny najazd na sedes po wyciągnięciu pojemnika toaletowego.

3. Montaż

Rozłożenie i złożenie krzesła toaletowego

- Krzesło postawić na podłożu. Chwycić za plastikowe uchwyty i rozłożyć krzesło, następnie zamontować przednią część ramy.
- Deskę sedesową i klapę zamontować na tylnej części ramy, a pojemnik toaletowy na środku ramy krzesła.
- W celu złożenia krzesła zdemontować deskę sedesową i klapę następnie wyciągnąć pojemnik toaletowy, odchylić do dołu przednią część ramy a następnie jeden bok odchylić do przodu, a drugi do tyłu.

Regulacja wysokości

Aby wyregulować nóżki, należy wcisnąć metalowy pin na nodze krzesła, wybrać odpowiednią wysokość wewnętrznej rurki, a następnie zablokować położenie rurek względem siebie. Nóżki regulowane są skokowo co 2,5 cm. **Uwaga!** Piny we wszystkich nóżkach muszą być ustawione na tym samym poziomie. Nóżki powinny zawsze stabilnie stać na podłożu.

Użytkowanie

Uwaga! W trakcie wsiadania, zsiadania, zmiany pozycji użytkownika, postoju należy bezwzględnie zablokować hamulce. (**dotyczy krzesła TGR-R KT 023C**). Podnieść klapę sedesu, a następnie zdjąć pokrywę pojemnika. Po użyciu przykryć pojemnik pokrywą, a następnie opuścić klapę sedesu.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	56 cm
Szerokość wewnętrzna	46 cm

Głębokość całkowita	47 cm
Wysokość siedziska od podłoża TGR-R KT 023B	41-51 cm
Wysokość siedziska od podłoża TGR-R KT 023C	43-53 cm
Wysokość całkowita od podłoża TGR-R KT 023B	71-81 cm
Wysokość całkowita od podłoża TGR-R KT 023C	73-83 cm
Wymiary siedziska	38 cm x 40 cm
Waga krzesła TGR-R KT 023B	6,5 kg
Waga krzesła TGR-R KT 023C	8,0 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg
Kolor ramy	szary

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Należy systematycznie dokonywać samodzielnej kontroli stanu technicznego krzesła: krzesło toaletowe należy czyścić regularnie używając tylko wody i łagodnych detergentów. Dokładnie osuszyć.

Nie należy używać do czyszczenia: ostrych środków polerskich, silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników. Po każdorazowym użyciu należy opróżnić i zdezynfekować pojemnik oraz deskę sedesową. Należy wykorzystywać środki do czyszczenia toalet zgodnie z zaleceniami ich producenta.

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na www.timago.com

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



01/2024(IV)