



Pilne: Prosimy o przeczytanie

Przeciwwskazania: Stosowanie maski jest przeciwwskazane u pacjentów i ich domowników, opiekunów, partnerów seksualnych, którzy mogą znajdować się w bliskim sąsiedztwie pacjentów używających maski, a którzy mają wszczepione urządzenia, na które mogą oddziaływać magnesy, w tym m.in: Rozruszniki serca; wszczepialne kardiowerterydefibrylatory (ICD); neurostymulatory; magnetyczne implanty metaliczne/elektrody/zawory umieszczone w kończynach górnych, tułowie lub wyżej (tj. szyi i głowie); zestawy do odsączania CSF (płynu mózgowo-rdzeniowego) (np. zastawka komorowo-otrzewnowa (VP)); klipsy do tętniaków; cewki zatorowe; urządzenia do zaburzania przepływu wewnątrznacyniowego w tętniakach wewnątrzczaszkowych; metalowe płytki czaszkowe, śruby, osłony otworów wwiercanych oraz wyroby kośćczastępcze; metaliczne odłamki w oku; implanty oczne (np. implanty jaskry, implanty siatkówki); niektóre soczewki kontaktowe z dodatkiem metalu; implanty przywracające słuch lub równowagę z wszczepionym magnezem (takie jak: implanty ślimakowe, urządzenia słuchowe na przewodnictwo kostne oraz implanty pnia mózgu); magnetyczne mocowania protez; metalowe zaciski żołądkowo-jelitowe; metalowe stenty (np. tętniakowe, wieńcowe, tchawiczo-oskrzelowe, żółciowe); porty i pompy wszczepialne (np. pompy insulinowe); stymulatory nerwów podjęzykowych; wyroby oznaczone jako urządzenia, których nie można stosować bezpiecznie w środowisku MR (rezonansu magnetycznego); magnetyczne implanty metalowe nieznakowane lub nie ocenione pod kątem bezpieczeństwa w polu magnetycznym.

 **Ostrzeżenie:** W magnetycznych klipsach nakrycia głowy w masce wykorzystywane są dwa magnesy o natężeniu pola magnetycznego 0,4 T. Należy upewnić się, że maska znajduje się w odległości co najmniej 15 cm od wszelkich metalowych implantów (z wyjątkiem wymienionych w przeciwwskazaniach) oraz innych wyrobów medycznych potencjalnie wrażliwych na działanie pola magnetycznego, w celu uniknięcia ewentualnych skutków działania miejscowych pól magnetycznych. Dotyczy to domowników, opiekunów i partnerów seksualnych, którzy mogą znajdować się w bliskim sąsiedztwie pacjentów używających masek.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa w środowisku rezonansu magnetycznego



Maski nie można bezpiecznie stosować w środowisku MR. Należy trzymać je poza pomieszczeniem do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (strefa IV). Stanowią one ryzyko wystąpienia „efektu pocisku”.



 Respironics Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 USA

 Respironics Deutschland GmbH & Co. KG
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Germany



AUSTRALIAN SPONSOR DETAILS:
Philips Electronics Australia Ltd.
65 Epping Road, North Ryde, NSW 2113
Australia

1153865 R05
TLC 9/2/2022

© Koninklijke Philips N.V., 2022. All rights reserved.