

PRAWIDŁOWE ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE NIEJAŁOWYCH RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH

ZAKŁADANIE

1.  Wyjmij rękawicę z jej oryginalnego dozownika, trzymając tylko mankiet.
2.  Przytrzymaj rękawicę przy otworze jedną dłonią i wsuń palce i kciuk przeciwnej dłoni do rękawicy.
3.  Pociągnij w kierunku nadgarstka, aby całkowicie założyć rękawicę, używając tylko palców, aby uniknąć przekłucia paznokciem.
4.  Wyjmij drugą rękawicę z dozownika gołą dłonią trzymając tylko za mankiet.
5.  Przytrzymaj rękawicę w miejscu otwarcia i wsuń palce i kciuk do rękawicy. Pociągnij rękawicę w kierunku nadgarstka za pomocą palców dłoni w rękawicy.

ZDEJMOWANIE

1.  Chwyć zewnętrzną część rękawicy drugą ręką w rękawicy i ściągnij ją.
2.  Przytrzymaj zdjętą rękawicę w dłoni w rękawiczce.
3.  Wsuń palce dłoni bez rękawicy pod rękawicę na nadgarstku.
4.  Zdejmij drugą rękawicę tak aby w środku została rękawica ściągnięta na początku.
5.  Wyrzucić rękawice do odpowiedniego pojemnika na odpady.