

Instrukcja użytkownika

wyrobu medycznego REA COHESIVE BANDAGE

Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkownika znajdującą się w opakowaniu, gdyż zawiera ona istotne dla pacjenta informacje o użytkowaniu wyrobu medycznego REA COHESIVE BANDAGE, a następnie przechowywać ją, aby w razie konieczności móc powtórnie przeczytać.

1. Nazwa handlowa wyrobu

REA COHESIVE BANDAGE

2. Sposób użycia

2.1. Przed użyciem miejsce aplikacji powinno być oczyszczone (np. wodą lub alkoholem) i osuszone.

2.2. Należy odpowiednio dobrać rozmiar oraz sposób aplikacji bandaża do miejsca aplikacji.

2.3. Załóż bandaż na miejsce docelowe, tak aby jego kolejne warstwy nachodziły na siebie, co pozwoli na utrzymanie się bandaża poprzez właściwości kohezyjne.

2.4. W przypadku personelu medycznego, stosując bandaż, dostosuj aplikację w zależności od potrzeb pacjenta.

3. Przeciwwskazania

3.1. Zachowaj ostrożność w przypadku skłonności alergicznych na klej wchodzący w skład bandaż elastycznego.

3.2. Nie stosuj bezpośrednio na rany.

3.3. W przypadku stosowania przez kobiety w ciąży lub dzieci poniżej 18 miesiąca życia, zachowaj szczególną ostrożność lub skonsultuj się ze swoim lekarzem prowadzącym

4. Przeznaczenie produktu

Stosowany głównie w bandażowaniu urazów szpitalnych, mocowaniu opatrunków i szyn unieruchamiających stosownych w urazach mięśni, ścięgien i więzadeł.

5. Użytkownicy

Produkt przeznaczony jest do użycia przez osoby dorosłe i dzieci.

6. Środki ostrożności i ostrzeżenia

Nie używać produktu po upływie terminu ważności lub w przypadku, gdy produkt jest uszkodzony.

7. Warunki transportu i przechowywania:

Produkt należy przechowywać w czystym, suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu (temperatura: 5 st. ~ 35 st., wilgotność: 35% ~ 75%). Produktu nie należy przechowywać razem z wyrobami toksycznymi, szkodliwymi, o nieprzyjemnym zapachu.

8. Zawartość opakowania i inne informacje

Opakowanie zawiera jedną sztukę bandaża elastycznego wykonanego z włókniny pokrytej klejem lateksowym klasy medycznej.

9. Termin ważności

Cztery lata

 313 Sp. z o.o., Przędzalniana 60B, 15-688 Białystok

Data zatwierdzenia ulotki

13.04.2023

Wyjaśnienia symboli użytych na opakowaniu

 Znak CE

 Wyrób medyczny

 Producent

 Numer katalogowy

 Kod partii

 Produkt jednorazowego użytku

 Wyrób niesterylny

 Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone

 Data ważności

 Chronić przed wilgocią

 Uwaga

 Zapoznać się z treścią ulotki

 Data produkcji