

KROPLE DO OCZU

Nawilżające



Świat Zdrowia

Krople do oczu nawilżające WYRÓB MEDYCZNY

SKŁAD:

Główny składnik:

hialuronian sodu (2 mg/ml)

Składniki dodatkowe:

chlorek sodu, disodu wodorofosforan, diwodorofosforan sodu dwuwodny, poliheksanid, woda do wstrzykiwań.

Krople do oczu nawilżające koją i zapewniają komfort oczom.

SPOSÓB UŻYWANIA:

- Wkraplać jedną lub dwie krople do każdego oka w razie potrzeby lub stosować zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty.
- Mrugnąć kilka razy.
- Po użyciu dokładnie zakręcić nakrętkę.

PRZECIWWSKAZANIA:

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
- W przypadku wystąpienia dyskomfortu, podrażnienia, bólu, zaczerwienienia lub niewyraźnego widzenia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Nie stosować, jeśli pierścień zabezpieczający jest uszkodzony przed pierwszym użyciem.
- Przechowywać w temperaturze od 5°C do 30°C.
- Nie dotykać końcówką dozownika żadnej powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie roztworu.
- Nie używać po upływie terminu ważności.
- Roztwór należy zużyć w ciągu jednego miesiąca od otwarcia butelki.

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.



 Stericon Pharma Pvt. Ltd. Plot No. 9R, Sub Layout of Plot No. 9, I phase, Bommasandra Industrial area, Bangalore – 560 099, Karnataka, Indie

 MYM STC, SL.
Avda. de los Rosales 32, 28935 Móstoles Madrid, Hiszpania
direccion@mym-stc.com



Synoptis Industrial Sp. z o.o.
ul. Forteczna 35-37
87-100 Toruń



Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa
www.synoptispharma.pl

PELi-110/RO z dnia 04.02.2023
KR/DRUGS/KTK/28/332/2002