



****Wytyczne dotyczące obsługi siatkowego nebulizatora****

Proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [POWER] przez 3-5 sekund, aby uruchomić urządzenie, a wskaźnik niebieskiego światła się zapali.
2. Proszę oczyścić butelkę na leki gorącą wodą powyżej 85°C/185°F przed i po użyciu.
3. Po użyciu urządzenia upewnij się, że butelka na leki jest wysuszona przed przechowywaniem.
4. Urządzenia nie można używać podczas ładowania.

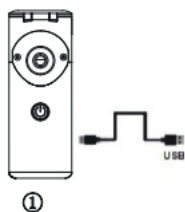


Pracuje z akumulatorem litowym

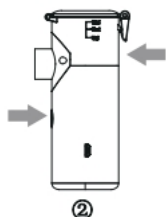


Trzymaj główną jednostkę jedną ręką, a butelkę z lekiem drugą ręką. Przesuń kubek wzdłuż szczeliny, aż kubek i jednostka będą na tym samym poziomie.

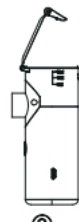


Jedną ręką trzymać główną jednostkę, drugą otworzyć zatrzask butelki z lekiem.

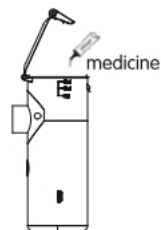


"Dodaj płyn medyczny do butelki z lekiem i pamiętaj: maksymalna ilość płynu leczniczego to 8 ml. Dokładnie dokręć pokrywkę kubka rozpylającego."

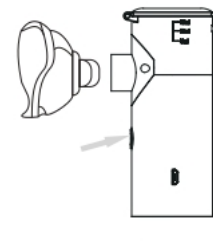


"Podłącz maskę lub ustnik. Naciśnij i przytrzymaj [POWER] przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. Naciśnij ON/OFF, aby je ponownie wyłączyć."

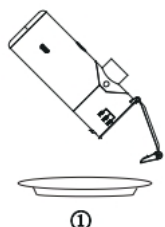


"Otwórz pokrywkę medyczną, wylej pozostały płyn medyczny z butelki na lek."

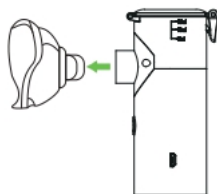


"Usuń maskę lub ustnik z nebulizatora."

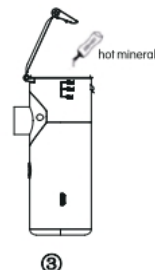

"Dodaj gorącą wodę mineralną lub wodę z kranu do butelki na lek (temperatura wody: powyżej 85°C/185°F)."

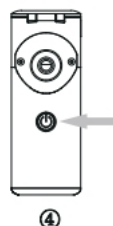

"Naciśnij i przytrzymaj [POWER] przez 3 sekundy, aby uruchomić urządzenie i spryskaj przez 2-3 minuty, aby oczyścić."

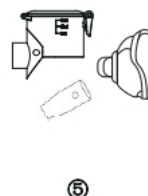

"Po użyciu sprzętu upewnij się, że butelka na lek, maska i ustnik są wysuszone na powietrzu przed przechowywaniem."

****Ostrzeżenia!****

1. Ta instrukcja jest jedynie szybką referencją. Przed pierwszym użyciem nebulizatora należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Przed i po każdym użyciu należy przeprowadzić terminowe czyszczenie i dezynfekcję nebulizatora oraz akcesoriów, a następnie bezpiecznie je przechowywać po odpowiednim wysuszeniu.
3. Proszę NIE dotykać siatki butelki medycznej rękami ani ostrymi przedmiotami, w przeciwnym razie butelka medyczna stanie się bezużyteczna.
4. Podczas rozpylania siatka powinna być w pełnym kontakcie z cieczą i nie powinna być pusta. Wibracje mogą spowodować uszkodzenie płyty siatkowej.
5. Ten produkt to osobiste urządzenie medyczne. Proszę nie dzielić się tym nebulizatorem z innymi.
6. Proszę nie wstrząsać ani nie wibrować głównej jednostki ani jej akcesoriów.
7. Użytkownikowi surowo zabrania się demontażu, naprawy lub wymiany części.
8. Jeśli podczas pracy nebulizatora wystąpi jakiegokolwiek nieprawidłowe zjawisko, postępuj zgodnie z rozdziałem 6 instrukcji obsługi, aby je rozwiązać.
9. Naciśnij i przytrzymaj przycisk operacyjny przez 3 sekundy, wskaźnik (niebieskie światło jaśniejsze oznacza większy przepływ) się zapali i urządzenie zacznie działać. Naciśnij przycisk ponownie, aby nebulizator działał przy mniejszym przepływie (niebiesko-zielone światło będzie się na przemian zapalać). Umieść płaską końcówkę ustnika w ustach, lekko zamknij usta lub przyłóż maskę blisko twarzy, lepiej zakryć jamę nosową i usta razem. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 lub 10 minutach pracy.