

SIEDZENIE DO WANNY

Instrukcja obsługi

Dziękujemy

za zakup siedziska do wanny.

Ułatwia ono korzystanie z wanny, gdyż w czasie kąpieli nie trzeba siadać na nie.

Siedzisko jest wyposażone w **higieniczną powierzchnię do siedzenia**, antypoślizgowe uchwyty oraz **powierzchnię bez ostrych krawędzi**.



WAŻNE WSKAZÓWKI! NALEŻY BEZWZGLĘDNI PRZESTRZEGAĆ!

Przed zastosowaniem artykułu prosimy przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję stosowania i zachować ją do dalszego użytku. Przy przekazywaniu artykułu osobom trzecim, bezwzględnie należy dołączyć niniejszą instrukcję stosowania.

W niniejszej instrukcji używane są następujące symbole:



Instrukcja stanowi integralną część artykułu. Zawiera ważne informacje na temat montażu i użytkowania artykułu. Należy przeczytać całą instrukcję. Nieprzestrzeganie zaleceń instrukcji może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia artykułu.



Ostrzeżenie!

Należy przestrzegać uwag ostrzegawczych zawartych w instrukcji, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom użytkownika



Uwaga!

Należy przestrzegać tych wskazówek, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom artykułu.



Wskazówka

Wskazówki te zawierają dodatkowe informacje na temat montażu i użytkowania.

1.1 Ważne



- Jeśli artykuł ten jest przekazywany dalej lub udostępniany do użytkowania innym osobom, należy zapewnić im możliwość zaznajomienia się z treścią niniejszej instrukcji stosowania i przekazać im ją wraz z artykułem.
- Maksymalne obciążenie siedziska do wanny wynosi 100 kg! Z siedzenia może korzystać tylko jedna osoba jednocześnie.
- To siedzisko można stosować wyłącznie w typowych wannach o szerokości wewnętrznej min 520, maks. 620 mm!
- Siedzisko należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i przestrzegając niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie należy dokonywać żadnych zmian w konstrukcji i nie można używać siedziska razem z innymi meblami lub elementami wyposażenia!
- Nie montować żadnych dodatkowych części!
- Artykuł jest zaprojektowany wyłącznie do prywatnego użytku w domu. Nie nadaje się w żaden sposób do stosowania w obiektach użyteczności publicznej (np. lecznice, domy spokojnej starości, itp.)!
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić artykuł pod kątem uszkodzeń i prawidłowego osadzenia łączników śrubowych. W razie wątpliwości co do jego stanu nie wolno już z niego korzystać, istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała!
- Nie wolno na własną rękę przeprowadzać żadnych napraw, ponieważ wygasa wtedy jakakolwiek odpowiedzialność z tytułu gwarancji. Naprawy należy przeprowadzać tylko w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Jeśli artykuł ma być używany przez dzieci lub osoby o ograniczonej ograniczonej sprawności ruchowej, musi to odbywać pod nadzorem (i z ewentualną pomocą). Ten artykuł nie jest do zabawy!
- Dzieci należy trzymać z dala od opakowania. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
- Należy zadbać o to, by krawędzie wanny zapewniały bezpieczne i stabilne podparcie. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie 4 uchwyty spoczywają pewnie na krawędziach wanny.

2.1 Zakres dostawy i opakowanie

Najpierw należy sprawdzić, czy opakowanie jest kompletne i czy artykuł nie nosi żadnych śladów uszkodzenia. W razie wątpliwości nie należy korzystać z artykułu, lecz skonsultować się z punktem serwisowym. Komplet zawiera:

- 1 siedzisko do wanny
- 1 instrukcję stosowania

Opakowania mogą być ponownie wykorzystywane lub przeznaczone do powtórnego przerobu surowców. Niepotrzebne już opakowania należy przeznaczyć na odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli przy rozpakowywaniu zostaną ujawnione uszkodzenia transportowe, prosimy niezwłocznie skonsultować się ze swoim sprzedawcą.



Ostrzeżenie!

**Dzieci należy trzymać z dala od opakowania.
Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.**

2.2 Montaż w wannie

Siedzisko nakłada się na krawędzie wanny, jak pokazano na rysunku. Montaż samego siedziska nie jest konieczny, gdyż jest ono zmontowane fabrycznie.



Ostrzeżenie!

To siedzisko można stosować wyłącznie w typowych wannach o szerokości wewnętrznej min. 520, max. 620!



Ostrzeżenie!

Należy zadbać o to, by krawędzie wanny zapewniały bezpieczne i stabilne podparcie. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie 4 uchwyty spoczywają pewnie na krawędziach wanny.



Ostrzeżenie!

Przed każdym użyciem należy sprawdzić artykuł pod kątem uszkodzeń i prawidłowego osadzenia łączników śrubowych. W razie wątpliwości co do jego stanu nie wolno już z niego korzystać, istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała!

3. Konsterwacja



Uwaga!

Do czyszczenia nie stosować żadnych żrących środków czyszczących, zabrudzenia i kurz usuwać miękką, ewentualnie lekko nawilżoną szmatką, w przypadku silniejszych zabrudzeń można użyć neutralnego środka do czyszczenia.

Po każdym czyszczeniu na wilgotno i po każdym użyciu uchwyt starannie osuszyć! W przypadku zanieczyszczenia infekcyjnego artykuł należy przemyć zwykłym alkoholowym środkiem dezynfekującym.

Nazwa i model:

Siedzisko do wanny BSB

Wymiary: dł. x szer. x wys.:

230 x 745 x 180 mm

Masa ok.:

1,45 kg

Powierzchnia siedziska ok.:

230 x 405 mm (grubość 30 mm)

Maks. siła utrzymująca:

100 kg

Nr artykułu

48240

Nr EAN:

40015588 **48240 3**

4. Dane techniczne



Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektyw UE 93/42/EWG.
Spełnia on wymagania normy PN-EN 12182 „Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych”

W ramach ciągłego ulepszania produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i projektowych

5. Utylizacja

Należy przestrzegać aktualnie obowiązującej wykładni prawa dotyczącej utylizacji odpadów z uwzględnieniem ochrony środowiska.

Zużyty produkt należy oddać do punktu skupu surowców wtórnych lub do lokalnego punktu zbiórki odpadów.

6. Warunki gwarancji i napraw

W celu uzyskania świadczenia gwarancyjnego prosimy zwrócić się do swojego sprzedawcy lub bezpośrednio do punktu serwisowego. Jeśli artykuł trzeba wysłać, prosimy podać wagę i dołączyć kopię paragonu zakupu.

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne i materiałowe wykryte w ciągu 3 lat od daty zakupu.

Datę zakupu w przypadku świadczenia gwarancyjnego potwierdza się na podstawie paragonu lub rachunku.

Wykonanie usługi gwarancyjnej nie wydłuża okresu ważności gwarancji.

Gwarancją nie są objęte szkody wynikłe wskutek niewłaściwego obchodzenia się z artykułem, nieprzestrzegania instrukcji

stosowania, wykonania nieautoryzowanych napraw lub innych zmian konstrukcyjnych, nieodowiedniego transportu oraz normalnego zużycia części na skutek użytkowania.

Odszkodowanie za bezpośrednie lub pośrednie szkody następne jest wykluczone również wtedy, gdy uszkodzenie artykułu jest objęte gwarancją.