

Instrukcja Obsługi i Tabela Wymiarów

Instrukcja Obsługi

- 1. **Zakładanie:** Załóż korektor postawy zgodnie z oznaczeniami na produkcie, upewniając się, że urządzenie równomiernie przylega do pleców.
- 2. **Dostosowanie:** Dostosuj paski lub elementy regulacyjne, aby zapewnić komfort użytkowania bez nadmiernego ucisku.
- 3. **Czas użytkowania:** Na początku stosuj urządzenie przez 15–30 minut dziennie, stopniowo zwiększając ten czas.
- 4. **Przerwanie użytkowania:** W przypadku wystąpienia bólu lub dyskomfortu, natychmiast zaprzestań stosowania produktu.
- 5. **Czyszczenie:** Regularnie czyść korektor zgodnie z zaleceniami producenta, aby utrzymać higienę i zapobiec rozwojowi bakterii.

Tabela Wymiarów

Rozmiar	Obwód klatki piersiowej	Waga
M	68 - 91 cm	40 - 80 kg
L	91 - 119 cm	70 - 100 kg