

Dezodorant w płynie

Opieka stomijna



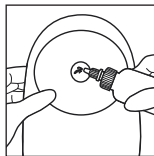
Coloplast A/S
Hofstad 1
3050 Humlebaek
Denmark

Instrukcja użytkownika

23325900 Version 1

Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Coloplast A/S.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021-02-02

Sposób użycia

Dodać 5–10 ml lub jedną saszetkę
do worka i delikatnie potrząść worek,
aby równomiernie rozprowadzić
dezodorant w płynie Brava.

Dostosować jego ilość do rozmiaru
używanego worka stomijnego.



W przypadku korzystania z worka
stomijnego otwartego przez
ujście można również dodawać
dezodorant.

Powtórzyć czynność po opróżnieniu
worka.

Utylizacja

Produkt można utylizować razem z odpadami
komunalnymi lub zgodnie z lokalnymi wskazówkami.

Nie należy spłukiwać produktu w toalecie.

Zgłaszanie incydentów

Jeżeli w trakcie używania tego produktu lub w wyniku
jego używania doszło do poważnego incydentu,
należy zgłosić to producentowi i właściwemu
organowi krajowemu.

Objaśnienie symboli

Wyrób medyczny



Oznaczenie wskazujące, że produkt
jest zgodny z przepisami europejskimi
dotyczącymi wyrobów medycznych.



Numer katalogowy



Termin ważności (RRRR-MM-DD)



Numer serii



Data produkcji (RRRR-MM-DD)



Producent



Przeczytaj instrukcję użycia



Wskazuje, że kod kreskowy zawiera
niepowtarzalny numer identyfikacyjny
urządzenia



(Global Trade Item Number) Globalny
numer handlowy artykułu



Przechowywać z dala od światła
słonecznego



Opakowanie nadające się do
recyklingu

Przeznaczenie

Dezodorant w płynie Brava jest przeznaczony do
dezodoryzowania i natłuszczania zawartości worka
stomijnego.

Środki ostrożności

Przechowywać z dala od światła słonecznego.

InformacjeSkładniki:

Woda, kokamidopropylobetaina,
hydroksypropylovana guma guar, aromat, wersenian
czterosodowy, diazolidynylomocznik, kwas
cytrynowy.

Firma Coloplast nie ponosi odpowiedzialności za
urazy ani szkody, jakie mogą powstać ze stosowania
niniejszego produktu w sposób niezgodny z
aktualnymi zaleceniami firmy Coloplast.