


cardio **Impulse**

CARDIO IMPULSE EXPERT

AUTOMATYCZNY CIŚNIENIOMIERZ STACJONARNY

Wyświetlacz LCD	
Nazwa	Cardio Impulse Expert
Model	PG-800B69
Metoda wyświetlania	Wyświetlacz cyfrowy
Metoda pomiaru	Pomiar oscylometryczny
Zakres pomiaru	Ciśnienie : (30~280)mmHg, (4~37.3)kPa
	Puls : (40~199)Beat/min
Dokładność	Ciśnienie statyczne : ± 3 mmHg
	Puls : $\pm 5\%$
Pamięć	Dwóch użytkowników po 90 pomiarów
Zasilanie	4 baterie alkaliczne 1,5 V (AA lub LR6), Zasilacz
Warunki pracy	+5°C ~ +40°C, 15%RH~93%RH
Warunki przechowywania	-20°C ~ +55°C, 0%RH~93%RH
Wymiary	310(W)x257(H)x232(D)mm
Waga	1800 g (bez baterii)
Klasyfikacja	Typ BF
Rozmiar mankietu	(28~42)cm
Zasilacz	INPUT: 100-240V~ 50/60Hz, 0.2A OUTPUT: 6V --- 1200mA

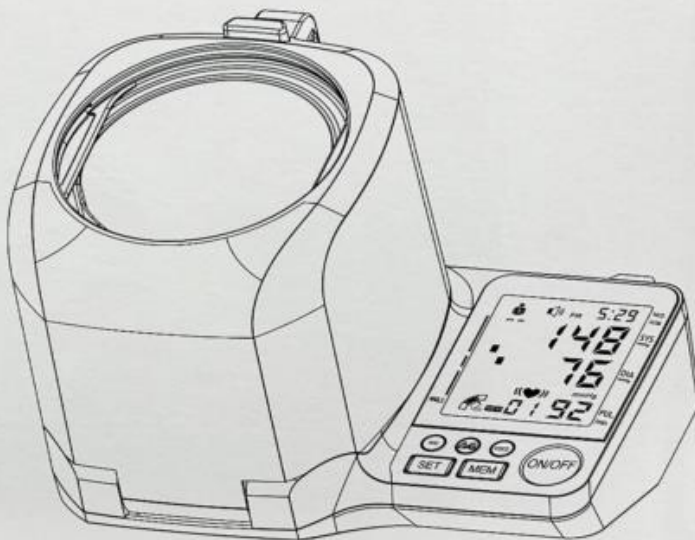

Shenzhen Pango Medical Electronics Co., Ltd
Siedziba główna: No.25 1st Industry Zone, Fanguang Road wioska Xikeng, miasto Henggang, powiat Longgang, (miasto) Shenzhen, (prowinca) Guangdong, Chiny
Inna siedziba nr 1: 2-4 Floor, No 5 Shanzhuang Rd., wioska Xikang, miasto Henggang, powiat Longgang, miasto Shenzhen, prowincja Guangdong, Chiny



Lotus NL B.V.
Adres: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Holandia
Tel: +31644168999

Importer : PMT Sp. z o.o.
ul. Tetmajera 79,
31-352 Kraków
www.primedical.pl




20240509
202404087



REV. 12/2021

Opis ciśnieniomierza

Cardio Impulse Expert jest naramiennym ciśnieniomierzem automatycznym typu stacjonarnego, który składa się z części głównej oraz mankietu.

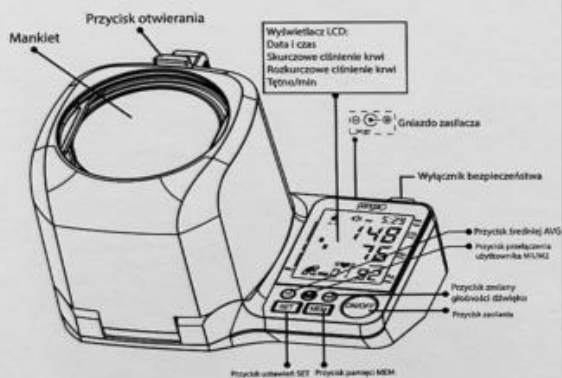


Wyświetlacz LCD



Sposób użycia mankietu

1. Naciśnij przycisk otwierania mankietu, następnie delikatnie odchyl mankieta i włóż w niego lewe ramię.
2. Zapoznaj się z wytycznymi co do największego możliwego obwodu ramienia. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.

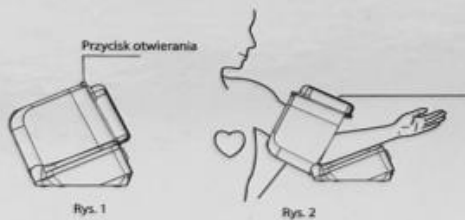

Poprawna pozycja podczas pomiaru

1. Usiądź wygodnie przy stole, na którym umieszczono ciśnieniomierz, oprzyj się plecami np. o oparcie krzesła.
2. Weź 5-6 głębokich wdechów, rozluźnij ramię i rękę.
3. Ułóż rękę tak, aby środkowa część mankieta znajdowała się na wysokości serca.
4. W czasie pomiaru nie należy napinać ramienia i mówić.

