


Odciąganie nie musi boleć

Jak dobrać odpowiedni rozmiar lejka?

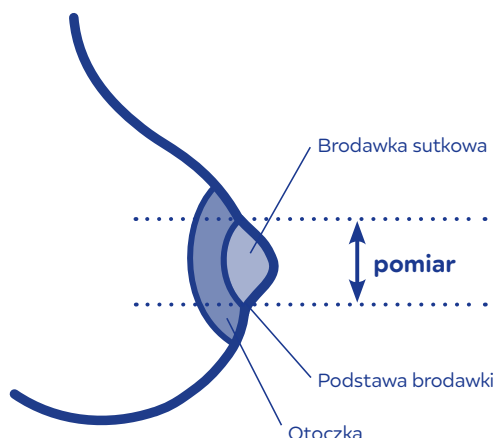

Lejek ma istotny wpływ na komfort i skuteczność odciągania pokarmu. Odpowiednio dobrany rozmiar lejka ułatwia osiągnięcie optymalnego przepływu mleka.

Rozmiar piersi nie musi odpowiadać rozmiarowi brodawki – średnica brodawki jest czynnikiem decydującym o wielkości lejka.

Za pomocą centymetra lub linijki zmierz średnicę brodawki sutkowej u jej podstawy (przez środek), nie uwzględniaj otoczki. Rozmiar odczytaj w milimetrach (mm).

PAMIĘTAJ!

Jeżeli jesteś na granicy rozmiarów to wypróbuj oba rozmiary lejka i wybierz najbardziej komfortowy dla siebie.

Czasami konieczny jest wybór innego rozmiaru lejka dla każdej piersi – zmierz brodawkę sutkową w obu piersiach.

Na podstawie dokonanego pomiaru dopasuj odpowiedni rozmiar lejka:

średnica brodawki 13-15 mm ➔ lejek 17 mm

średnica brodawki 15-17 mm ➔ lejek 19 mm

średnica brodawki 17-19 mm ➔ lejek 21 mm


średnica brodawki 20-22 mm ➔ lejek 24 mm

Laktator SmartSense



Wypróbuj lejki dołączone do zestawu laktatora Canpol babies. W zestawie znajdują się aż 4 rozmiary lejka – podstawowy wbudowany w laktator 24 mm oraz 3 wymienne wkładki w rozmiarach: 17, 19 i 21 mm.

1. Przyłóż delikatnie lejek do piersi, tak aby brodawka znajdowała się na środku.
2. Ustaw maksymalną siłę ssania odczuwalną jako komfortową. Odciąganie pokarmu nie powinno być bolesne.
3. Sprawdź w fazie odciągania właściwego, po fazie stymulacji, czy masz odpowiedni rozmiar lejka kierując się poniższymi ilustracjami.

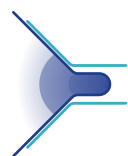


Gdy brodawka zostaje wciągana do tunelu lejka wraz z częścią otoczki – **lejek jest za duży**.

Wypróbuj mniejszy rozmiar wkładając jedną z wkładek w środek lejka.



Gdy brodawka znajduje się na środku tunelu i porusza się swobodnie oznacza, że **lejek jest prawidłowy**.

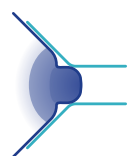

Gdy brodawka ociera się o ścianki tunelu – **lejek jest za mały**.

Jeżeli tak się dzieje przy użyciu reduktora, wróć do bazowego lejka 24mm



1. Wybierz wkładkę.



2. Włóż ją w otwór lejka, aby zmniejszyć jego średnicę.

Odciąganie nie musi boleć

Jak dobrać odpowiedni rozmiar lejka?

Wytnij kółka i sprawdź, do którego otworu mieści się Twoja brodawka sutkowa. Powinna ona wejść dokładnie w wycięty otwór bez dodatkowej przestrzeni dookoła.

Przypisany lejek to odpowiedni rozmiar dla Ciebie.

Jeżeli jesteś na granicy rozmiarów to wypróbuj oba rozmiary lejka i wybierz najbardziej komfortowy dla siebie.

UWAGA!



Aby wydrukować ten plik zmień domyślne ustawienia drukowania na "skala 100%", aby zachować prawidłową wielkość kółek.



lejek
17 mm



13 mm



14 mm



15 mm

lejek
19 mm



15 mm



16 mm



17 mm

lejek
21 mm



17 mm



18 mm



19 mm

lejek
24 mm



20 mm



21 mm



22 mm