

Jak korzystać?

Należy zdjąć folię zabezpieczającą z jednego okienka Medcoat. Następnie trzeba wyjąć tabletkę lub kapsułkę z opakowania, a następnie umieścić ją na aplikatorze i delikatnie przepchnąć w taki sposób, by została powleczone kolorową powłoką o wybranym wariantcie smakowym. Potem należy odczekać 5 sekund i dwukrotnie przekręcić powleczoną kapsułkę i oderwać ją od aplikatora, szybko pociągając. Tabletkę lub kapsułkę od razu połykamy, popijając wodą. Przez Medcoat można przepchnąć tabletki i kapsułki o różnej wielkości i kształcie, także te podzielone.