

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Stojak na kroplówki z kółkami, składany, 4 zaczepy

Kod produktu: STAND-TIM



1. Wykonanie

Stojak na kroplówki wykonany jest z aluminium, posiada cztery wytrzymałe zaczepy oraz plastikową podstawę z pięcioma kółkami z hamulcami. Dzięki prostej regulacji wysokości, posiada możliwość indywidualnego dostosowania do potrzeb użytkownika. Stojak posiada funkcję składania co ułatwia transport produktu.

2. Zastosowanie


Stojak jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym podawanie płynów infuzyjnych. Przeznaczony do stosowania w warunkach domowych i szpitalnych.

3. Montaż i regulacja

Montaż

Krok 1. Dolną część stojaka (D) włożyć do otworu montażowego znajdującego się na środku podstawy (E). Jest to rurka oznaczona cyfrą „2” z metalową tuleją w górnej części.

Krok 2. Od dołu podstawy (E) zamocować tulejkę (F), podkładkę (G) i wkręcić śrubę (H).

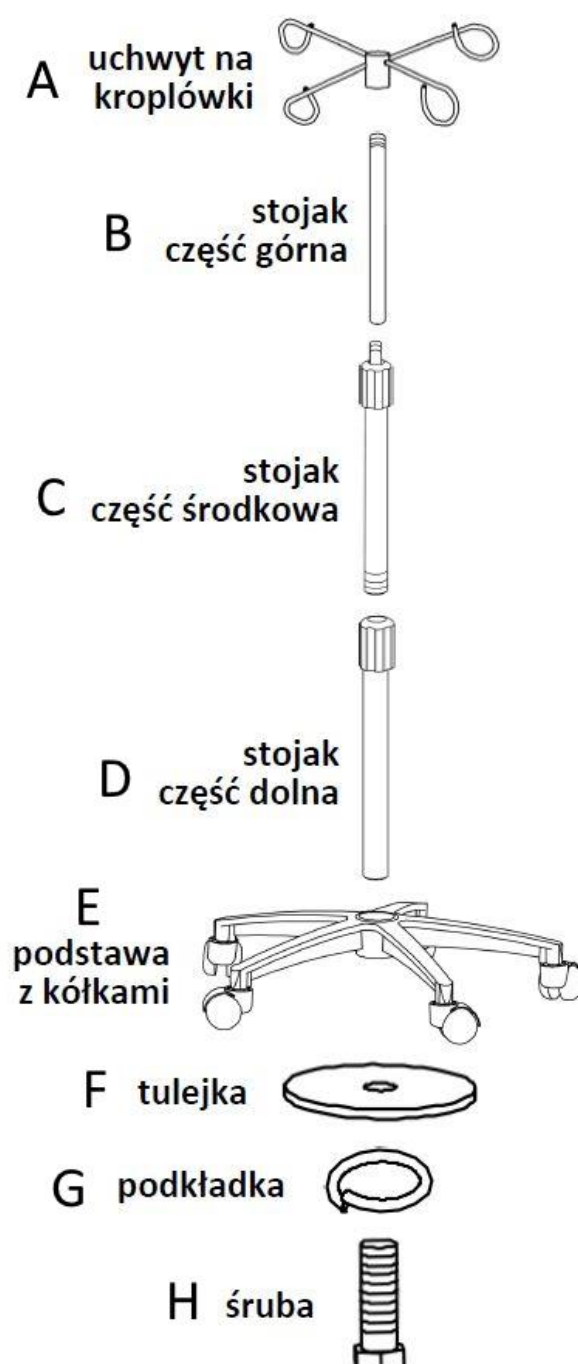

Krok 3. Wewnątrz dolnej części stojaka (D) umieszczona jest rurka oznaczoną cyfrą „1”, którą należy pozostawić w środku na dalszy czas montażu.

Z drugiej rurki oznaczonej cyfrą „1”, zdjąć czarną tuleję zabezpieczającą (nie będzie używana w dalszym montażu), a następnie skręcić ze sobą obie rurki oznaczone cyfrą „1”.

Po skręceniu obu rurek utworzona zostanie górna część stojaka (B).

Krok 4. Środkową część stojaka (C) nałożyć od góry na przygotowaną wcześniej górną część stojaka (B) i wkręcić ją w dolną część stojaka (D). Środkowa część stojaka (C) to rurka oznaczona cyfrą „2” z plastikową tuleją w górnej części.

Krok 5. Podnieść nieco do góry górną część stojaka (B) i wkręcić na nią uchwyt na kroplówki (A).

Dokręcić plastikową tuleję, blokując wysokość stojaka.

Stojak na kroplówki jest gotowy do użytku.

Regulacja wysokości

Plastikowa tuleja w środkowej części stojaka służy do regulacji wysokości całego stojaka. W celu regulacji poluzować plastikową tuleję, ustawić właściwą wysokość, a następnie dokręcić plastikową tuleję blokując nowe ustawienia.

Hamulce

Wieszak posiada 5 kół z hamulcami, które umożliwiają unieruchomienie stojaka w wybranym miejscu.

4. Specyfikacja techniczna

Regulacja wysokości	119 -218 cm
----------------------------	-------------

Waga stojaka	2,54 kg
Maks. obciążenie jednego zaczepu	2,5 kg
Średnica podstawy	56 cm
Wysokość podstawy	13 cm
Koła	5 kół o śr. 2''

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Stojak czyścić używając wody, gąbki i łagodnych środków dezynfekujących, a następnie dokładnie osuszyć. Nie należy używać do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny, rozpuszczalników.

Należy systematycznie sprawdzać: dokręcenie elementów montażowych, stan wieszaków z zaczepami, stan kółek z hamulcami.

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na **www.timago.com**

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



09/2024(II)