

1-częściowy worek stomijny, otwarty

Opieka stomijna



Instrukcja użycia

23326335 Version 1

Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Coloplast A/S.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021-02-22

Velcro® jest własnością firmy Velcro Industries B.V

Przeznaczenie

Worek stomijny jest przeznaczony do zbierania treści ze stomii.

Samoprzylepna płytka jest mocowana do worka stomijnego i ma przylegać do zdrowej skóry wokół stomii.

Wskazania

Ten wyrób jest przeznaczony dla osób ze stomią.

Ostrzeżenia

Ponowne użycie produktu jednorazowego nie jest zalecane ze względu na ryzyko wystąpienia zanieczyszczenia krzyżowego.

Regeneracja, mycie, dezynfekcja i/lub (ponowna) sterylizacja mogą powodować obniżenie parametrów produktu, co z kolei stwarza dodatkowe ryzyko fizycznego urazu lub zakażenia u użytkownika.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu typu convex należy się skonsultować z pracownikiem służby zdrowia.

Informacje

Jednorazowy worek stomijny.

Do czasu wyjęcia produktów w celu ich użycia należy je przechowywać w opakowaniu, które pełni funkcję ochronną, a etykieta znajdująca się na opakowaniu zawiera ważne informacje, takie jak numer serii, datę ważności i unikalny kod kreskowy.

Produktu nie trzeba usuwać przed badaniem metodą rezonansu magnetycznego, ponieważ nie zakłóca on pracy urządzenia.


Firma Coloplast nie ponosi odpowiedzialności za urazy ani szkody, jakie mogą powstać ze stosowania niniejszego produktu w sposób niezgodny z aktualnymi zaleceniami firmy Coloplast.

Specjalne warunki przechowywania

Produkt należy przechowywać w pozycji poziomej.


Przechowywać z dala od światła słonecznego.

Przygotowanie

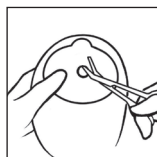


Za pomocą małych, zakrzywionych nożyczek i miarki na przyklepcu, wytnij otwór w przyklepcu, który będzie dokładnie dopasowany do wielkości i kształtu stomii. Do zmierzenia wielkości i kształtu stomii można użyć załączonej podziałki.


Dokładne dopasowanie otworu do stomii jest ważne, gdyż zmniejsza ryzyko wycieku i problemów ze skórą.

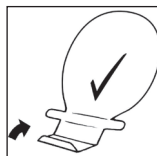

Umieść worek na płaskiej powierzchni, stroną z przyklepcem zwróconą do dołu. Zamknij ujście, zwijając jego dolną część trzykrotnie do góry, tak aby rzep Velcro® stał się widoczny.

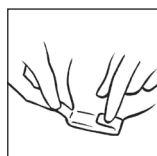

Złóż dwa skrzydełka do środka aby zamocować rzepy Velcro®.

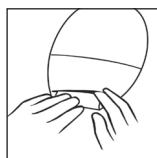

Ujście można schować, używając znajdującego się bezpośrednio nad nim punktowego rzepu Velcro® lub przy użyciu podłużnego rzepu Velcro® pośrodku worka.

(Nie dotyczy worków przezroczystych, pośrodku których nie ma rzepu Velcro®).




Dokładnie umyj stomię i skórę wokół niej. Przed nałożeniem przyklepca skóra musi być całkowicie sucha.

Stosowanie



Zdejmij folię ochronną z płytki.

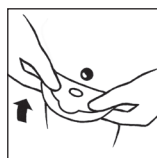


Wygladź przyklepiec w okolicy stomii i dociśnij do skóry. Płytkę stomijną powinna ściśle przylegać do stomii. Ważne jest zapewnienie ścisłego uszczelnienia, co pomoże zapobiegać podciekaniu treści jelitowej pod płytkę. Dociśnij płytkę zaczynając od obszaru przy stomii, aby zapewnić mocne przyleganie. Upewnij się, że płytkę szczelnie przylega. Wygladź płytkę palcami przesuwając nacisk od stomii w kierunku zewnętrznych krawędzi celem zapewnienia idealnego dopasowania płytki ze skórą.



Dociśnij worek, aby zapewnić mocne przyleganie i idealne dopasowanie przyklepca do skóry wokół stomii.

Opróżnianie worka

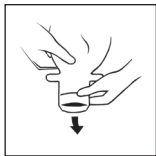

W razie potrzeby otworzyć ujście i opróżnić worek do toalety.



Oczyszczyć ujście, na przykład przy użyciu papieru toaletowego. Po opróżnieniu worka zwinąć i zabezpieczyć z powrotem ujście.

Usuwanie



Ostrożnie usunąć worek ze skóry pociągając za uszko do usuwania na przylepcu i powoli zroluj przylepiec w dół. Lekko dociśnij skórę wolną dłonią, aby ułatwić zdejmowanie.

Utylizacja

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku i należy go utylizować zgodnie z lokalnymi wytycznymi, np. razem z typowymi odpadami komunalnymi.

Nie należy splukiwać produktu w toalecie.

Naklejka filtru



W razie potrzeby, aby zapobiec wydobywaniu się gazu, umieścić na filtrze jedną z załączonych naklejek filtra.

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych

Jeżeli w trakcie użytkowania tego produktu lub w wyniku jego użytkowania doszło do poważnego zdarzenia niepożądanego, należy zgłosić to producentowi i właściwemu organowi krajowemu.

Objaśnienie symboli



Urządzenie medyczne



Oznaczenie wskazujące, że produkt jest zgodny z przepisami europejskimi dotyczącymi wyrobów medycznych.



Numer katalogowy



Termin ważności (RRRR-MM-DD)



Numer serii



Data produkcji (RRRR-MM-DD)



Producent



Przeczytaj instrukcję użycia



Do jednorazowego użytku



Wskazuje, że kod kreskowy zawiera niepowtarzalny numer identyfikacyjny urządzenia



(Global Trade Item Number) Globalny numer handlowy artykułu



Przechowywać z dala od światła słonecznego



Tą stroną do góry



Opakowanie nadające się do recyklingu



Produkt może przebywać w pobliżu rezonansu magnetycznego