



NÁVOD K POUŽITÍ 2



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ.....4



NÁVOD K POUŽITÍ



PT 0104 Poporodní břišní pás

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ:

Poporodní břišní pás je opakovatelně použitelný zdravotnický prostředek určený k podpoře břišních svalů.

INDIKACE:

- po porodu císařským řezem k ochraně pooperační rány a zmírnění bolestivých obtíží
- snižuje riziko rozestupu bílé čáry
- snižuje riziko vzniku pooperační kýly
- podporuje regeneraci natažené kůže břicha během těhotenství, po porodu císařským řezem i po přirozeném porodu

SKLADOVÁNÍ:

Výrobek skladujte v suché místnosti. Chraňte jej před vysokými teplotami a přímým slunečním zářením.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Výrobek je určen pro osoby, které vykazují příznaky popsané v indikacích.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ:

Použití výrobku konzultujte s odborníkem (gynekolog, porodní asistentka, fyzioterapeut). Výrobek by měl být používán pouze na neporušenou pokožku. Nepoužívejte přímo na rány, poškozenou nebo nemocnou pokožku. Používání mastí, olejů, krémů a podobných látek může mít negativní vliv na vlastnosti výrobku, snížit jeho trvanlivost a účinnost jeho funkce.

V případě přetrvávající nebo zesilující se bolesti, výskytu alergické reakce, podráždění pokožky nebo jakýchkoli jiných nežádoucích účinků, které souvisejí s používáním výrobku, jej přestaňte používat a poraďte se s lékařem.

Z hygienických důvodů a s ohledem na účinnost je výrobek určen k použití pouze jedním pacientem. Správná volba velikosti je podmínkou správné funkce výrobku. Před každým použitím výrobek zkontrolujte s ohledem na známky opotřebení nebo stárnutí. Optimální účinnost zaručuje pouze nepoškozený výrobek.

Výrobek by neměl být používán nepřetržitě po dobu 24 hodin, pokud lékař neurčí jinak.

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ PŘÍPRAVĚ VÝROBKU:

Před prvním použitím doporučujeme výrobek vyprat.

ÚDRŽBA:



ZPŮSOB NASAZOVÁNÍ:

Pás natáhněte přes nohy do výšky břicha a pasu.

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ PT 0104:

Polyamid 46 %, polypropylen 18 %, latex 18 %, bavlna 9 %, polyester 9 %

Každou důležitou událost, která souvisí s výrobkem, nahlaste výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel nebo pacient trvalé bydliště.

PŘIZPŮSOBENÍ VÝROBKU:

Tabulka velikostí je dostupná na obalu.

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

VÝROBCE:

SIGVARIS S.A.
ul. Mazowiecka 11/49
00-052 Varšava, Polsko
www.sigvaris.com



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



PT 0104 Szülés utáni haskötő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RENDELTETÉS:

A szülés utáni haskötő egy többször használatos orvostechnikai eszköz, amelyet a hasizmok támogatására terveztek.

JAVALLATOK:

- császármetszés után a műtési seb védelmére és a fájdalom enyhítésére
- csökkenti a hasizom kötőszövetes középvezetékének (linea alba) szétválásának kockázatát
- csökkenti a műtét utáni sérv kialakulásának kockázatát
- támogatja a terhesség alatt megnyúlt hasbőr regenerálódását, császármetszés után és természetes szülést követően

TÁROLÁS:

A terméket száraz helyiségben kell tárolni. Védje a magas hőmérséklettől és a közvetlen napfénytől.

CÉLCSOPORT:

A termék a javallatokban leírt tünetekkel rendelkező pácienseknek készült.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:

A termék használatát szakemberrel (nőgyógyász orvos, szülésznő, gyógytornász) kell egyeztetni.

A termék csak ép, sértetlen bőrön alkalmazható. Ne használja nyílt sebre, sérült vagy beteg bőrfelületre.

Kenőcsök, olajok, krémek és hasonló anyagok alkalmazása hátrányosan befolyásolhatja a termék tulajdonságait, csökkentheti annak tartósságát és hatékonyságát.

Amennyiben tartós vagy fokozódó fájdalom, allergiás reakció, bőrirritáció vagy bármilyen más nem kívánt mellékhatás jelentkezik a termék használata során, az alkalmazást azonnal abba kell hagyni és orvoshoz kell fordulni.

Higiéniai okokból és a hatékonyság biztosítása érdekében a termék kizárólag egyetlen beteg által használható.

A megfelelő méret kiválasztása alapvető feltétele a termék megfelelő működésének.

Minden használat előtt ellenőrizni kell a terméket elhasználódás vagy elöregedés jelei szempontjából.

Csak sértetlen termék garantálja az optimális hatékonyságot.

A terméket tilos megszakítás nélkül 24 órán keresztül viselni, kivéve, ha az orvos másként írja elő.

A TERMÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT:

Javasolt a terméket első használat előtt kimosni.

TISZTÁNTARTÁS:**FELHELYEZÉS MÓDJA:**

Az övet a lábnál kezdve húzza fel a has és a derék magasságáig.

ANYAGÖSSZETÉTEL PT 0104:

Poliamid 46%, Polipropilén 18%, Latex 18%, Pamut 9%, Poliészter 9%

Az eszközzel kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak, valamint azon tagállam illetékes hatóságának, ahol a felhasználó vagy a beteg lakóhellyel rendelkezik.

A TERMÉK MÉRETEZÉSE:

A mérettáblázat a csomagoláson található.

Orvostechnikai eszköz

Gyártó:

SIGVARIS S.A.

ul. Mazowiecka 11/49

00-052 Varsó, Lengyelország

www.sigvaris.com