

WZMACNIACZ DŹWIĘKU MINI JH-A50



Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzmy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA / WYKAZ ELEMENTÓW



SPOSÓB UŻYCIA

KROK 1: INSTALACJA BATERII

1. Upewnij się, że posiadasz cynkową baterię typu A10.
2. Otwórz komorę baterii.
3. Włóż baterię do komory znakiem „+” do góry.
4. Zamknij komorę baterii.

Wskazówka: Przed włożeniem baterii do urządzenia upewnij się, że zdjąłeś z niej opakowanie ochronne.

KROK 2: WKŁADANIE WZMACNIACZA DŹWIĘKU DO UCHA

1. Na początku ustaw poziom głośności na najniższą wartość.
2. Przesuń dźwignię wyłącznika ON/OFF w pozycję ZAŁĄCZONE (ON).
3. Jak będziesz gotowy na włożenie wzmacniacza do ucha, złap za jego górną część. Zwróć uwagę na to, żeby nie zakrywać mikrofonu palcami, ponieważ może to doprowadzić do powstania sprzężenia.
4. Włóż ostrożnie wzmacniacz dźwięku do ucha (zob. rys.).



Wskazówka: Upewnij się, że wzmacniacz dobrze przylega do ucha a mikrofon nie jest zasłonięty. Upewnij się, że urządzenie dobrze leży w uchu. W razie potrzeby wymień końcówkę dokanałową wybierając inny rozmiar.

KROK 3: REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Jeżeli masz zamiar zmienić głośność, wyjmij wzmacniacz z ucha i pokrętle głośności ustaw pożądany poziom. Przy jakiegokolwiek zmianie głośności zawsze wyjmij wzmacniacz z ucha!!!

KROK 4: PO UŻYCIU

1. Jeśli masz zamiar wyłączyć aparat słuchowy przesuń dźwignię wyłącznika ON/OFF z pozycji WYŁĄCZONY (OFF). - Przy kolejnym załączeniu wzmacniacza dźwięku głośność będzie na ostatnio ustawionym poziomie. 2. Włóż urządzenie do pudełka.

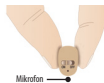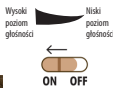

WYMIANA KOŃCÓWK DOKANAŁOWYCH

Jeśli masz zamiar wymienić silikonowe końcówki dokanałowe postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

1. Zdejmij aktualnie założoną końcówkę:



2. Załóż nową końcówkę:



CZYSZCZENIE

Nie wolno zanurzać żadnych elementów w wodzie lub innym płynie.

1. Za pomocą dołączonej do urządzenia szczoteczki usuń z mikrofonu kurz, włoski lub inne zanieczyszczenia, które mogły nagromadzić się w jego wnętrzu.
 2. Za pomocą narzędzia do czyszczenia końcówek delikatnie usuń kurz, włoski lub inne zanieczyszczenia, które nagromadziły się w otworze końcówki dokanałowej.
 3. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba przetrzyj korpus wzmacniacza i jego końcówki wilgotną szmatką.
- Wskazówka: Jeśli wzmacniacz dźwięku nie będzie używany przez dłuższy okres, wyjmij z niego baterię i wstaw go do pudełka. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

JEŚLI NIE SŁYSZYSZ DŹWIĘKÓW:

- Sprawdź, czy dźwignia wyłącznika ON/OFF jest w pozycji ZAŁĄCZONE (ON).
- Sprawdź, czy bateria jest prawidłowo włożona.
- Jeśli bateria jest na swoim miejscu, sprawdź, czy nie jest wyczerpana.
- Sprawdź, czy mikrofon lub końcówka dokanałowa nie są czymś zakryte.

JEŚLI GŁOŚNOŚĆ DŹWIĘKU JEST ZA SŁABA:

- Upewnij się, że wzmacniacz dźwięku jest prawidłowo umieszczony w uchu.
- Sprawdź położenie pokrętła głośności, a w razie potrzeby zwiększ jej poziom.
- Niski poziom naładowania baterii może skutkować słabszą głośnością.

WAŻNE OSTRZEŻENIA

- NIE WOLNO ROZBIERAĆ URZĄDZENIA.
- NIE WOLNO ZANURZAĆ WZMACNIACZA DŹWIĘKU W WODZIE.
- Nie wolno używać wzmacniacza dźwięku z głośnością ustawioną na maksimum przez dłuższy czas, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy zaprzestać używania wzmacniacza dźwięku, jeśli będziemy odczuwać ból lub dyskomfort. - Nie wolno używać urządzenia w gorącym lub wilgotnym otoczeniu.
- Nie wolno nosić wzmacniacza dźwięku na deszczu, w prysznicy lub s trąkcie pływania.
- Gdy wzmacniacz dźwięku nie będzie używany, należy go przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w pudełku do tego przeznaczonym.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci, zwierząt domowych, ze względu na to, że urządzenie zawiera małe elementy.
- Nie wolno dopuścić do upadku urządzenia, aby nie doszło do jego uszkodzenia lub zwarcia.

Instrukcja obsługi

model JH-A50

DANE TECHNICZNE

Zasilanie:	1 bateria typu A10
Maksymalny poziom dźwięku wyjściowego:	<120+3dB
Średnia wyskoczościowości:	105dB±4
Wzmocnienie wzmacniacza (max):	32dB±5
Wzmocnienie testu referencyjnego:	22±5dB
Szum wyjściowy:	≤45dB
Zakres częstotliwości:	F1<400Hz, F2>3500Hz
Całkowite odkształcenie fali harmonicznej:	≤25%



Producent: Huizhou Jinghao Medical Technology Co., Ltd, Floor
6, Huicheng Industry Building, No. 9, Huifeng Dong 'Er Road,
Zhongkai High-Tech Zone, Hishou, Guangdong, China

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
 - czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
 - usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
 - uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
 - szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.
- Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.