

Plastry wodoodporne

Zestaw dwóch rodzajów plastrów wodoodpornych

- przezroczyste
- hipoalergiczne
- centralnie umieszczony opatrunek na folii perforowanej z klejem akrylowym
- warstwa zabezpieczająca
- nieprzywierający opatrunek
- elastyczne, łatwo dopasowujące się do kształtu ciała



ZINSTRUKCJA UŻYCIA: Dokładnie oczyścić ranę i osuszyć jej okolice. Wyjmij plaster z opakowania. Usuń jeden z dwóch papierków ochronnych i naklej pierwszą połowę plastra, pod warunkiem, że gaza znajduje się pośrodku rany. Usuń drugi papierek ochronny i dokończ aplikację plastra. Ostrożnie dociśnij plaster. Poczekać kilka minut aż plaster idealnie będzie przylegał do skóry.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. W przypadku wystąpienia poważnych incydentów należy poinformować producenta lub właściwy urząd.

Natubay sp. z o.o.
ul. Hurtowa 2, 62-510 Konin