

Brava®

 **Coloplast**

pl Puder

Opieka stomijna



Instrukcja użycia

Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

23340644 Version 1

Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Coloplast A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021-11-04

Coloplast A/S
Holteådam 1
3050 Humlebaek
Dania
Tel: +45 49 11 11 11

Przeznaczenie

Puder jest przeznaczony do absorpcji wilgoci na nienaruszonej skórze wokół stomii.

Środki ostrożności

Ten produkt jest niejadalny i należy zachować ostrożność przy jego stosowaniu u wcześniaków lub niemowląt w inkubatorach, gdyż może zwiększać ryzyko wystąpienia zakażenia.

Informacje

Firma Coloplast nie ponosi odpowiedzialności za urazy ani szkody, jakie mogą powstać podczas stosowania niniejszego produktu w sposób niezgodny z aktualnymi zaleceniami firmy Coloplast.

Specjalne warunki przechowywania

Puder należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.

Sposób użycia

Przygotowanie

1. Umyj i osusz skórę wokół stomii.

Stosowanie

2. Odkręć pokrywkę i nakieruj butelkę na planowany obszar zastosowania.
3. Potrząsając butelką lub delikatnie ją ściskając, rozprowadź puder na odpowiednim fragmencie skóry.
4. Rozprowadź puder równomiernie za pomocą gazy.
5. Przed nałożeniem płytki stomijnej lub przylepca strzeżnij nadmiar pudru.
6. Zamknij szczelnie pokrywkę i przechowuj puder w chłodnym, suchym miejscu.

Utylizacja

Produkt można utylizować razem z odpadami komunalnymi lub zgodnie z lokalnymi wskazówkami. Nie należy spłukiwać produktu w toalecie.

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych

Jeżeli w trakcie użytkowania tego produktu lub w wyniku jego użytkowania doszło do poważnego zdarzenia niepożądanego, należy zgłosić to producentowi i właściwemu organowi krajowemu.

Objaśnienie symboli



Urządzenie medyczne



Oznaczenie wskazujące, że produkt jest zgodny z przepisami europejskimi dotyczącymi wyrobów medycznych.



Numer katalogowy



Termin ważności (RRRR-MM-DD)



Numer serii



Data produkcji (RRRR-MM-DD)



Producent



Przeczytaj instrukcję użycia



Wskazuje kod z niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym urządzenia



(Global Trade Item Number) Globalny numer handlowy artykułu



Przechowywać z dala od światła słonecznego



Opakowanie nadające się do recyklingu